



KOD KATALOGOWY	AS-KX-08
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOLANA
MODEL	ORTEZA KOLANA AS-KX-08
CODE	AS-KX-08
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	KNEE ORTHOSIS AS-KX-08

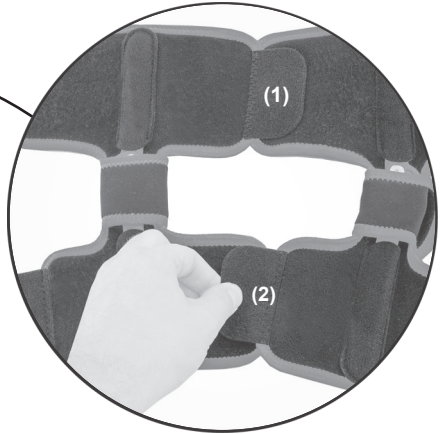


- 1. PL:** Przed zapięciem ortozy zegary powinny być ustawione dokładnie po bokach stawu kolanowego. Regulacji dokonujemy za pomocą tylnych zapięć (1, 2).
EN: Before fastening the brace, the drop locks should be positioned exactly on the sides of the knee joint. Adjustments are made using the rear fasteners (1, 2).

- 2. PL:** Załóż ortezę na nogę i zapnij rzepy według numeracji (3, 4).


EN: Put the orthosis on the leg and fasten the Velcro straps according to the following steps (3, 4).

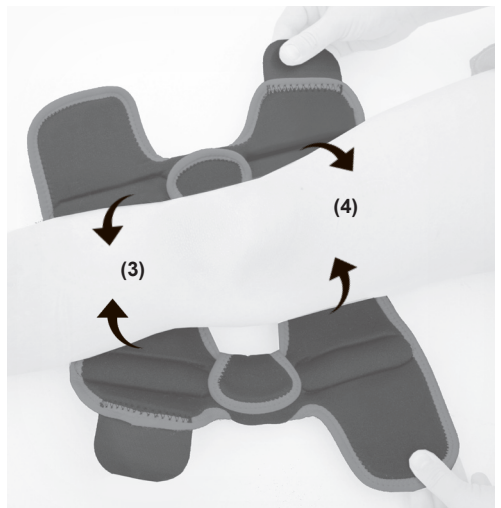

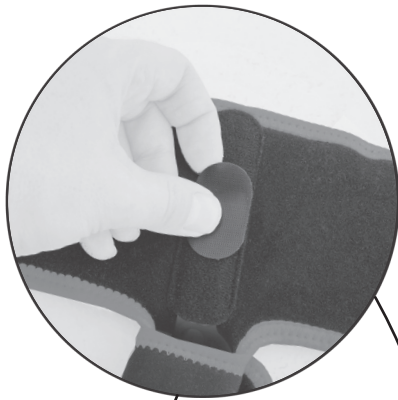

3. PL: Przed dopięciem pasów obwodowych (5,6) przypnij rzep na tunel szyny.

EN: Before fastening the circumference straps (5,6), attach the Velcro to the rail tunnel.

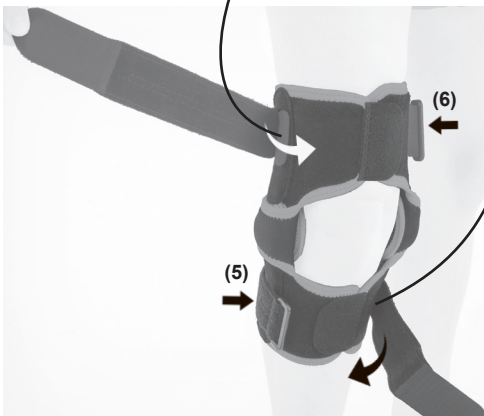

4. PL: Dopnij pasy do ortozy (5, 6), przepleć je przez klamkerki (7, 8) i zapnij w podanej kolejności.

EN: Fasten the straps to the brace (5, 6), interlace the straps through the buckles (7, 8) and fasten with Velcro in the following order.



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.