



KOD KATALOGOWY	AM-PCS-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-PCS-01
CODE	AM-PCS-01
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-PCS-01

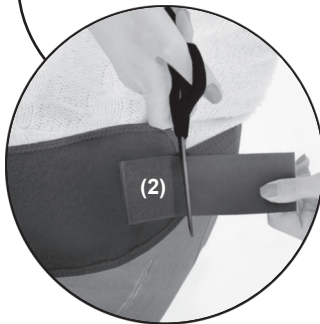

**1. PL:** Umieść pelotę brzuszną pod brzuchem i zapnij rzep (1). Jeśli pas zapina się na końcu peloty (2), należy odciąć nadmiar rzepa.

**EN:** Place the pad under the abdomen and close the Velcro fastener (1). If the strap closes at the end of the pad (2), cut off the needless Velcro.

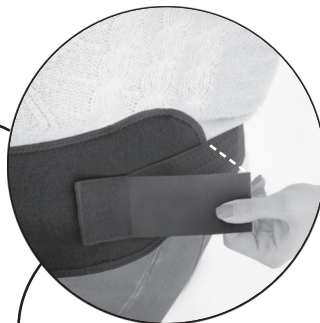

**2. PL:** Umieść tylną część ortozy w odcinku lędźwiowo-krzyżowym (3). Ustaw odpowiednią kompresję pasa i zapnij z przodu (4).

**EN:** Place the belt on the lumbosacral region (3). Set the appropriate compression of the belt and fasten at the front (4).



**3. PL:** Przypnij gumę do boku pasa (5), przełóż przez brzuch i zapnij po przeciwnej stronie (6).

**EN:** Attach the elastic strap to the side of the belt (5), pass it through the belly and fasten on the opposite side (6).



**4. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.