

KOD KATALOGOWY	OKG-07
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ OKG-07
CODE	OKG-07
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT OKG-07




**1. PL:** Załóż pętelkę temblaka na przedramię (1) i przełóż pasek przez ramię.

**EN:** Place the sling loop on your forearm (1) and the strap over your shoulder.





**2. PL:** Przy pomocy klamry (2) dopasuj pętelkę temblaka do obwodu przedramienia.

**EN:** Using the buckle (2), fit the loop of the sling to the circumference of the forearm.

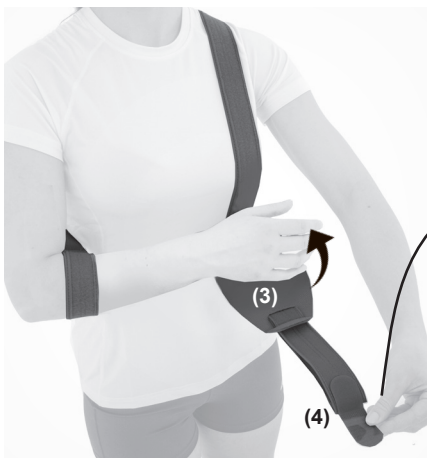

**3. PL:** Połóż rękę na elemencie termoforowanym temblaka (3) i zapnij taśmę na rzep (4).

**EN:** Place your hand on the thermoformed part of the sling (3) and close the Velcro tape (4).

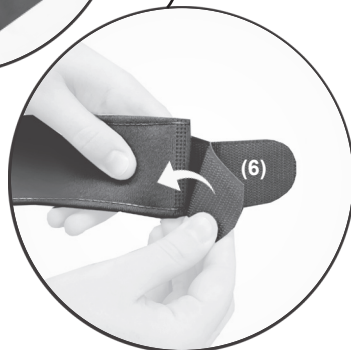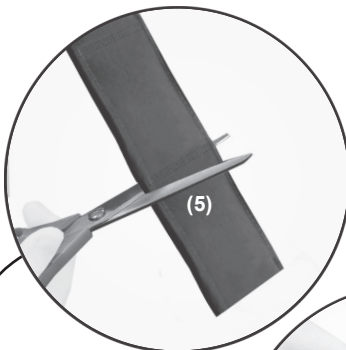

**4. PL:** Jeśli jest potrzeba, odetnij zbędną długość taśmy (5). Dopnij rzep (6) do paska i zapnij go.

**EN:** If necessary, cut off any unnecessary length of tape (5). Attach the Velcro (6) to the strap and close it.



- 5. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.