




KOD KATALOGOWY	OKG-10
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ OKG-10
CODE	OKG-10
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT OKG-10



1. **PL:** Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.

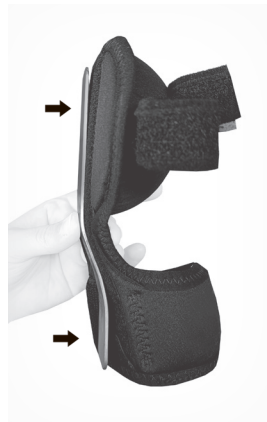

2. **PL:** Przyłóż rękę do ortozy. Jeśli istnieje taka potrzeba skorygój kształt usztywnienia.
EN: Place your hand on the orthosis. If necessary, adjust the shape of the support.

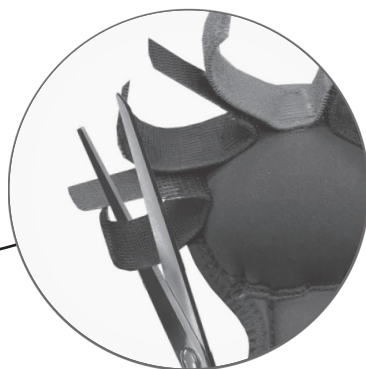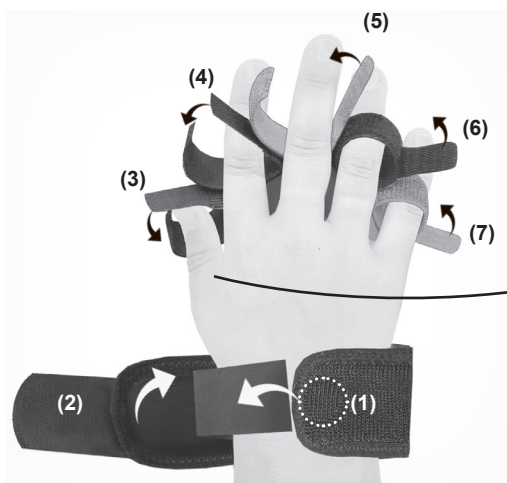

UWAGA!
ATTENTION!

PL: Jeśli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość pasków.

EN: If necessary, cut off the needless part of the straps.

3. PL: Umieść rękę w ortezie i zapnij rzepy w odpowiedniej kolejności (1,2,3,4,5,6,7).

EN: Place your hand in the brace and fasten the Velcro in the following order (1,2,3,4,5,6,7).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.