

KOD KATALOGOWY	OKG-20
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	OKG-20
CODE	OKG-20
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	OKG-20



PL: Elementy składowe ortozy:

EN: Components of the brace:

(A) Wrist brace (B) Finger element (C) Stiffeners (D) Finger band



1. PL: Umieść kciuk w ortezie (A).
EN: Place your thumb in the sleeve (A).




2. PL: Zapnij taśmę elastyczną (1) na rzep (2).
EN: Close the elastic band (1) with the Velcro (2).





3. PL: Owiń ortezę wokół nadgarstka i zapnij na rzep (3).
EN: Wrap the brace around your wrist and close it with the Velcro fastener (3).



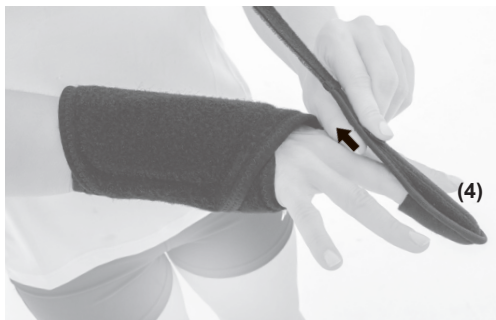


- 4. PL:** Umieść palec w kapturku (4). Podciągnij rzep (5) i przypnij do zewnętrznej części nadgarstka.
EN: Place your finger in the cap (4). Pull up the Velcro (5) and attach it to the outside of your wrist.

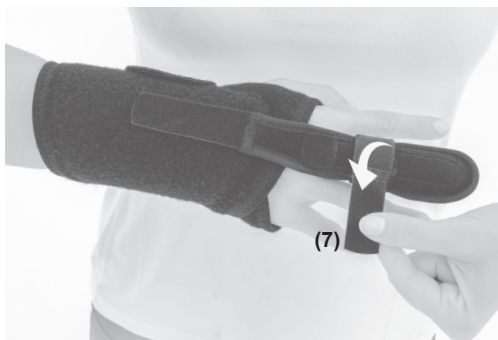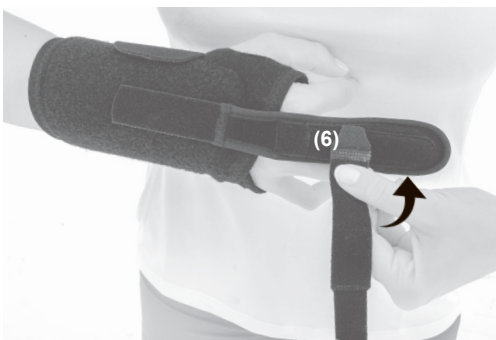


- 5. PL:** Przypnij taśmę obwodową z rzepem (6) do elementu palca i zapnij na rzep (7).
EN: Attach the circumferential tape (6) to the finger and fasten with Velcro (7).




- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

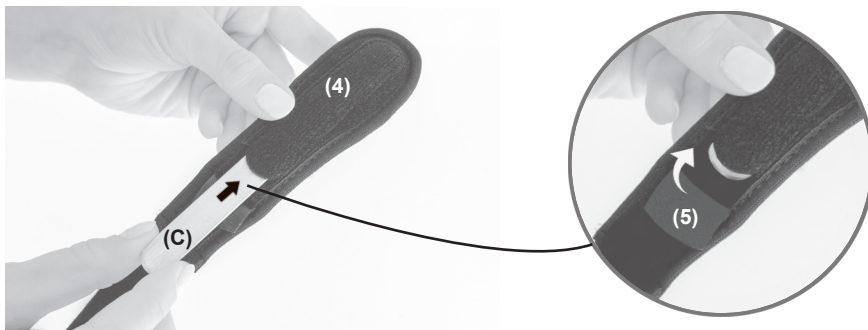


- 4. PL:** Wybierz rodzaj usztywnienia (C) i umieść je w kieszonce (4). Zapnij kieszonkę na rzep (5).
EN: Choose the type of stiffeners (C) and put it in the pocket (4). Close the pocket with Velcro (5).

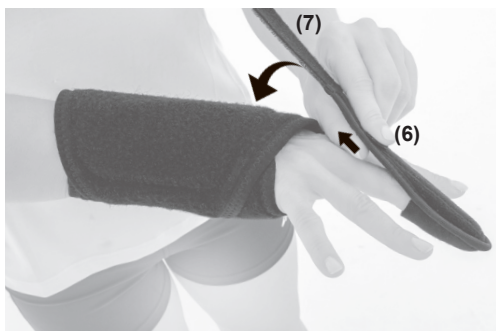


- 5. PL:** Umieść palec w kapturku (6). Podciągnij rzep (7) i przypnij do zewnętrznej części nadgarstka.
EN: Place finger in the cap (6). Pull up the Velcro (7) and attach it to the outside of your wrist.

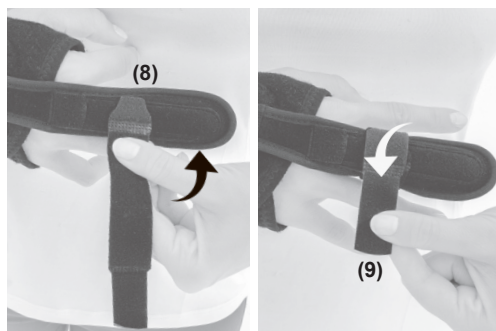

- 6. PL:** Przypnij taśmę obwodową z rzepem (8) do elementu palca i zapnij na rzep (9).
EN: Attach the circumferential tape (8) to the finger and fasten with Velcro (9).

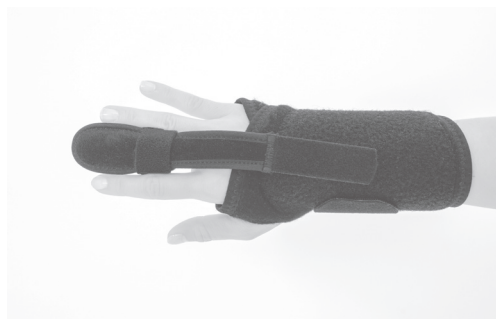


- 7. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

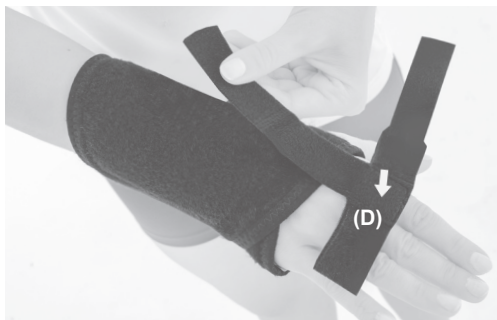

4. PL: Przyłóż opaskę (D) do palca w okolicy stawu śródrečno-palczkowego.

EN: Place the wristband (D) on the finger near the metacarpal joint.

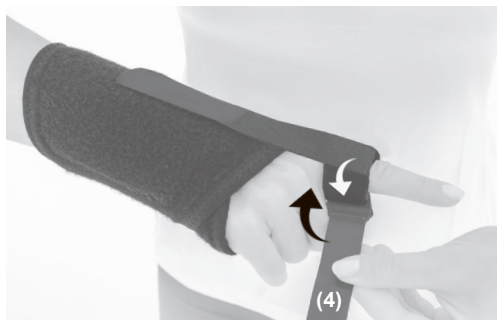

5. PL: Owiń opaskę dookoła palca i zapnij na rzep (4).

EN: Wrap the wristband around your finger and close it with Velcro (4).



6. PL: Podciągnij rzep (5) i przypnij do zewnętrznej strony nadgarstka.

EN: Pull up the Velcro (5) and attach it to the outside of your wrist.



7. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.

