



| | |
|----------------|-------------------------|
| KOD KATALOGOWY | AM-SO-11 |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA TUŁOWIA |
| MODEL | ORTEZA TUŁOWIA AM-SO-11 |
| CODE | AM-SO-11 |
| TRADE NAME | TORSO SUPPORT |
| MODEL | TORSO SUPPORT AM-SO-11 |

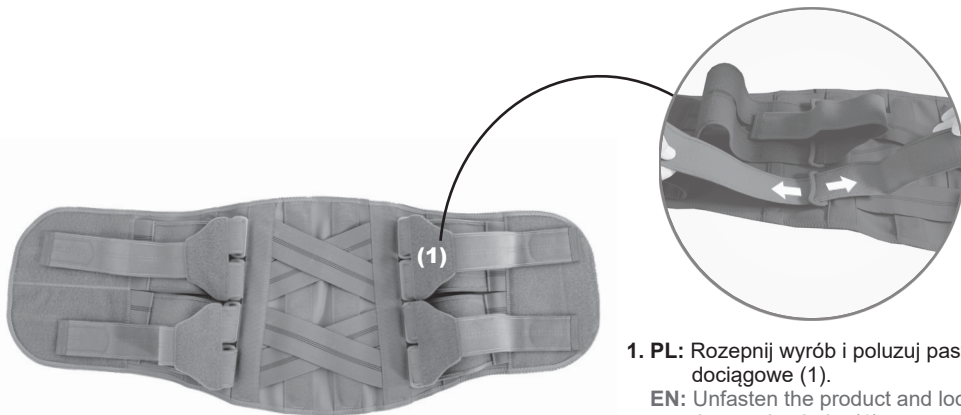

- 1. PL:** Rozepnij wyrób i poluzuj pasy dociągowe (1).
EN: Unfasten the product and loosen the tension belts (1).

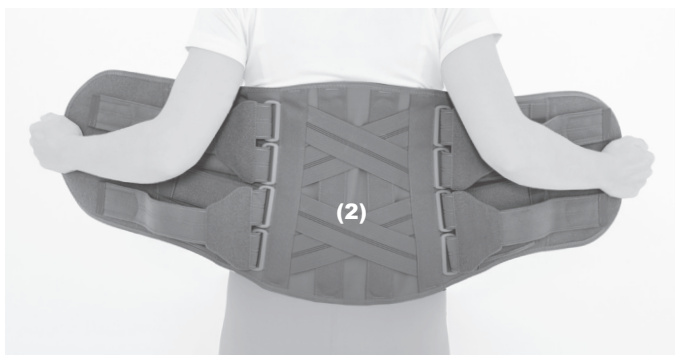

- 2. PL:** Przyłóż ortezę w okolice lędźwiowo-krzyżową kręgosłupa (2) i zapnij przednie zapięcie na rzep (3).
EN: Place the brace on your lower back (2) and fasten the Velcro closure (3).



3. PL: Ustaw odpowiednią kompresję wyrobu za pomocą pasów dociągowych i zapnij rzepy w podanej kolejności (4,5).

EN: Set the proper compression of the product using the tension belts and fasten the Velcro in the order given (4,5).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.