



AM-RB

PL: DZIANINOWY RĘKAW POD ORTEZĘ
EN: KNITTED LIMB SLEEVE

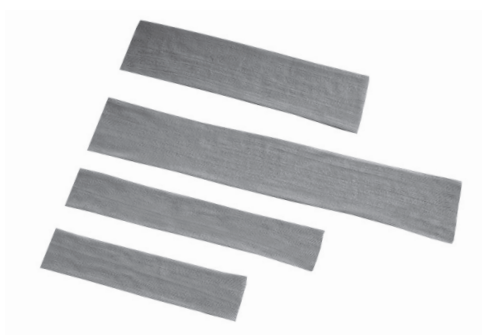

PL: RĘKAW NA NADGARSTEK

EN: WRIST SLEEVE

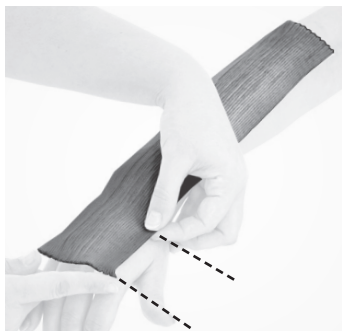

1. **PL:** Przyłóż rękaw do dłoni i ustal miejsce przecięcia rękawa.
EN: Put the sleeve on your hand and check where to cut it off.

PL: Uwaga! Nacięcie nie powinno być większe niż 5 mm.
EN: Attention! The cut should not be larger than 5 mm.



2. **PL:** Wsuń dłoń w rękaw w taki sposób, aby kciuk znajdował się w nacięciu. Następnie załóż ortezę.
EN: Slide your hand into the sleeve so that your thumb is in the hole. Then put on the brace.

PL: RĘKAW NA KOŃCZYNĘ GÓRNĄ

EN: SLEEVE FOR THE UPPER LIMB




1. **PL:** Wsuń rękaw na kończynę, następnie załóż ortezę.

EN: Slide the sleeve over the limb, then put on the brace.

PL: RĘKAW NA KOŃCZYNĘ DOLNĄ

EN: SLEEVE FOR THE LOWER LIMB

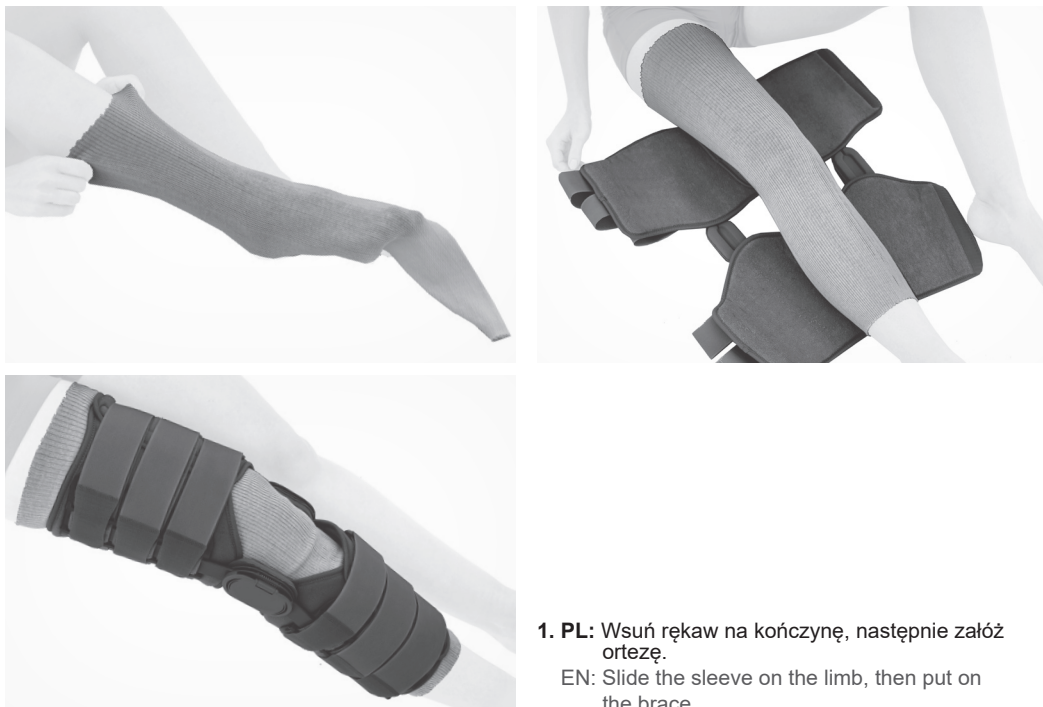

1. **PL:** Wsuń rękaw na kończynę, następnie załóż ortezę.

EN: Slide the sleeve on the limb, then put on the brace.