



KOD KATALOGOWY	MASTER-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ MASTER-01
CODE	MASTER-01
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT MASTER-01




- 1. PL:** Przed założeniem ortozy rozepnij ją w taki sposób, aby łuski (A,B) były połączone z jednej strony.  
**EN:** Before putting on the brace, open it so that the shells (A,B) are connected on one side.

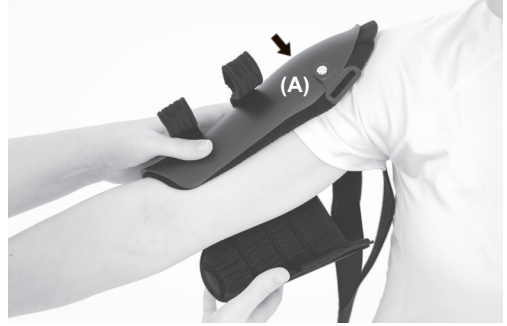


- 2. PL:** Umieść łuskę ortozy (A) na ramieniu.  
**EN:** Place the shell (A) on your upper arm.

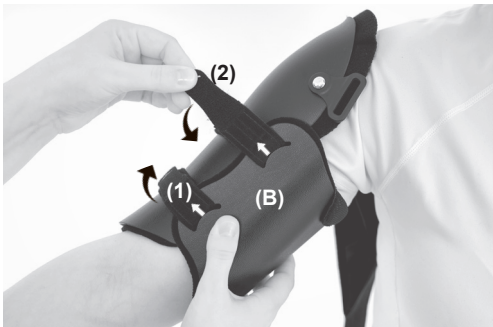

- 3. PL:** Umieść łuskę ortozy (B) po przeciwnej stronie ręki. Przepleć paski (1,2) przez otwory dopasowując ortezę do kończyny.  
**EN:** Place the shell (B) on the opposite side of your hand. Interlace the straps (1,2) adjusting the orthosis to the limb.

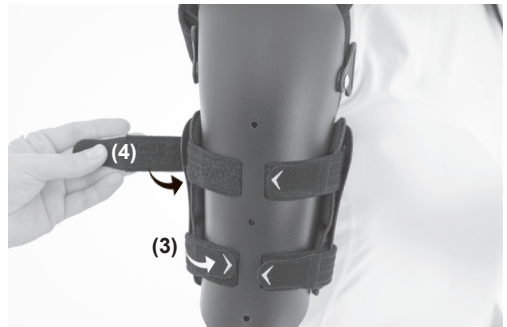

- 4. PL:** Zapnij rzepy (3,4) w podanej kolejności.  
**EN:** Close the Velcros (3,4) according to the following steps.

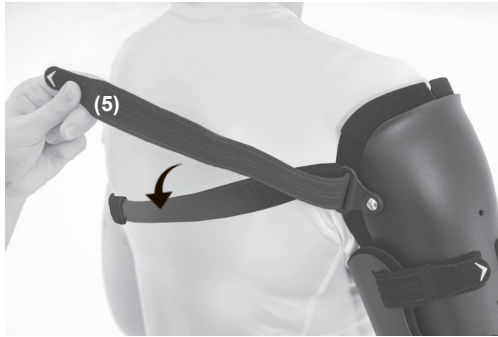

- 5. PL:** Ustaw odpowiednią długość pasa obwodowego (5). Umieść osłonę pasa (6) w odpowiednim miejscu.  
**EN:** Set the appropriate length of the circumferential strap (5). Place the belt cover (6) in the right place.



- 6. PL:** Zapnij pas (7) na rzep.  
**EN:** Fasten the Velcro strap (7).



- 7. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.