



KOD KATALOGOWY	AM-SX-08
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOSTKI
MODEL	ORTEZA KOSTKI AM-SX-08
CODE	AM-SX-08
TRADE NAME	ANKLE ORTHOSIS
MODEL	ANKLE ORTHOSIS AM-SX-08

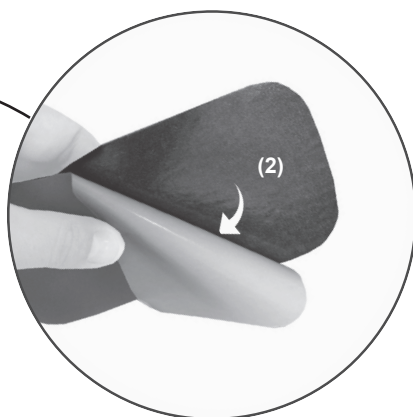

- 1. PL:** Rozepnij ortezę i umieść stopę na wkładce (1).
Jeśli zajdzie potrzeba, przyklej dodatkową
wkładkę (2) z pianki odciażającej z klejem.
- EN:** Unbuckle the brace and place your foot on the
inshole (1). If necessary, attach an additional
inshole (2) made of foam with adhesive.


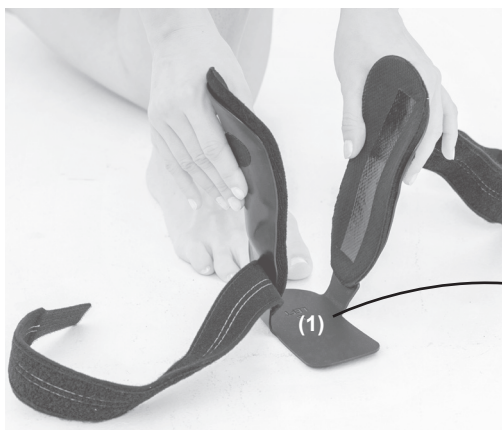


- 2. PL:** Przyłóż łuski (3) do stawu skokowego, w taki sposób, aby odpowiednio przylegały do kostek. Przypnij pasek (4) do rzepa stabilizującego (5).
- EN:** Check that the shells are properly placed on the ankle (3). Adjust the strap (4) to reach correct tension and fasten with the Velcro (5).

- 3. PL:** Zapnij pasek (6) na rzep (7) zawijając go nad stawem skokowym.
- EN:** Fasten the Velcro strap (6) (7) over the ankle joint.



- 4. PL:** Ustaw odpowiednie napięcie paska (8) i zapnij na rzep (9).
- EN:** Adjust the strap (8) to reach correct tension and fasten with the Velcro (9).

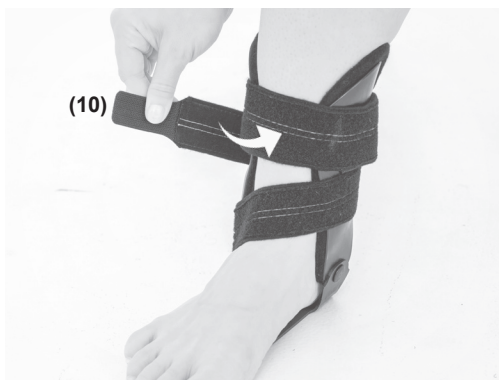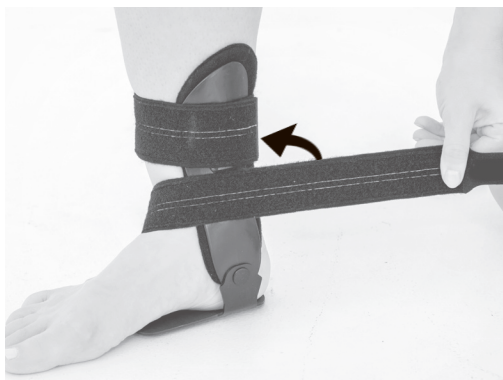

5. PL: Opleć pasek obwodowy wokół nogi i zapnij na rzep (10).

EN: Wrap the strap around the ankle and close it with the Velcro fastener (10).



6. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.