



KOD KATALOGOWY	AM-SOB-03/AIR
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	AM-SOB-03/AIR
CODE	AM-SOB-03/AIR
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-SOB-03/AIR



- 1. PL:** Rozepnij przednią część temblaka.
EN: Unfasten the front part of the sling.

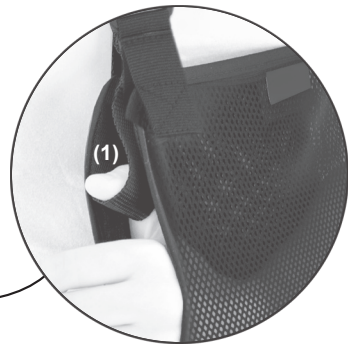

- 2. PL:** Załóż ortezę na rękę. Następnie umieść kciuk w specjalnej pętelce (1) i zapnij rękaw na rzep (2).
EN: Place the brace on your arm. Then insert your thumb into the special loop (1) and secure the sleeve with Velcro (2).

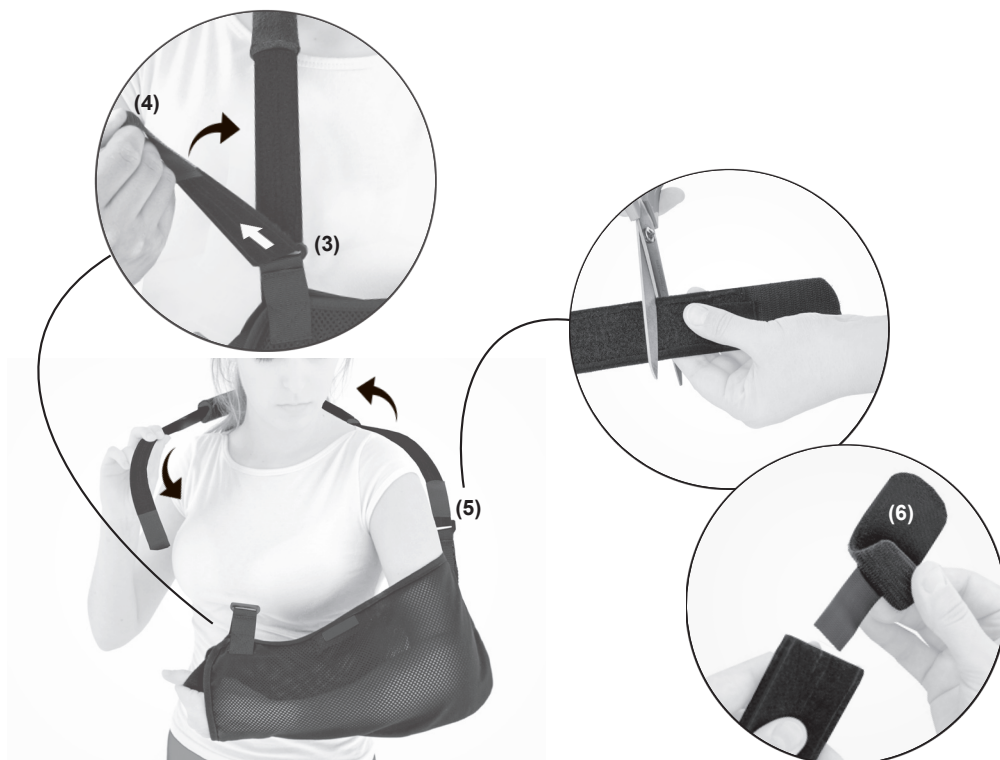

3. PL: Przełóż pas przez szyję, przepleć go przez klamerkę (3) i zapnij na rzep (4). Jeśli istnieje potrzeba skrócenia długości pasa odetnij jego zbędną długość z tylnej części (5) i zapnij rzep (6). Następnie ustaw osłonę szyi w odpowiednim miejscu.

EN: Place the belt around your neck, weave it through the buckle (3) and fasten it with Velcro(4). If you need to shorten the belt length, cut off the excess length from the back (5) and fasten the Velcro (6). Then position the neck guard in the appropriate place.



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.