


KOD KATALOGOWY	MASTER-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ MASTER-03
CODE	MASTER-03
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT MASTER-03

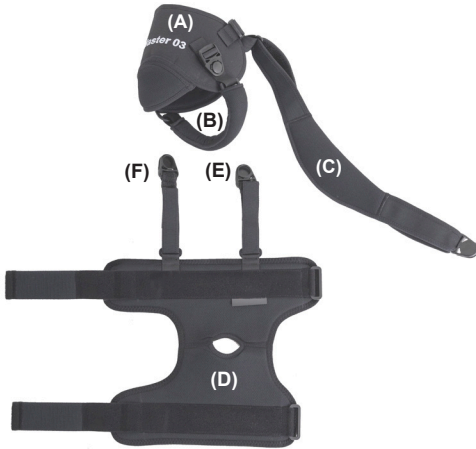

- A. Element barku / Shoulder element
- B. Pas stabilizujący / Stabilizing belt
- C. Pas pachowy / Armpit belt
- D. Element przedramienia / Forearm element
- E,F. Pasy mocujące z klamrami / Fastening belts with buckles



- 1. PL:** Rozepnij ortezę.  
**EN:** Unfasten the brace.




- 2. PL:** Umieść ortezę barku (A) na ramieniu.  
**EN:** Place the shoulder brace (A) over your shoulder (1).




- 3. PL:** Przelóż pas pachowy (C) do przodu, umieszczając osłonę (1) pod pachą.  
**EN:** Bring the armpit belt (C) forward, placing the special pad shield (1) under your armpit.

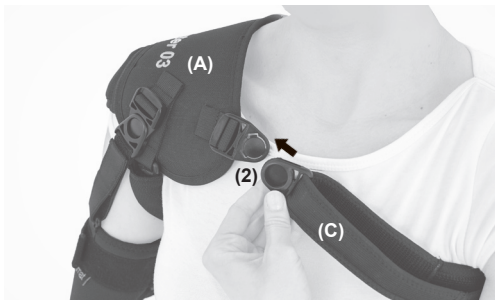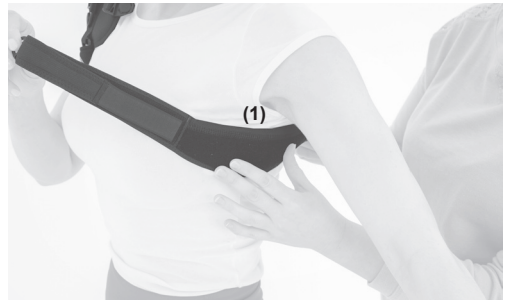

- 4. PL:** Przypnij pas pachowy (C) do elementu barku (A) za pomocą klamry (2).  
**EN:** Attach the armpit strap (C) to the shoulder element (A) with the buckle (2).


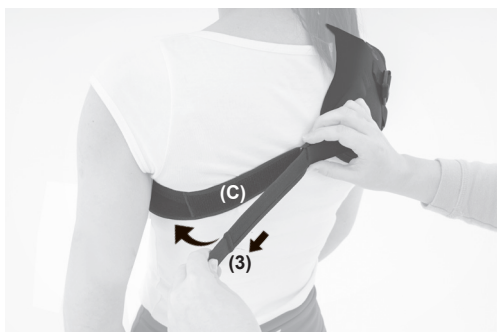


- 5. PL:** Ustaw odpowiednie napięcie pasa pachowego C) za pomocą rzepów (3,4).  
**EN:** Set the correct tension in the armpit C) using the Velcro (3,4).

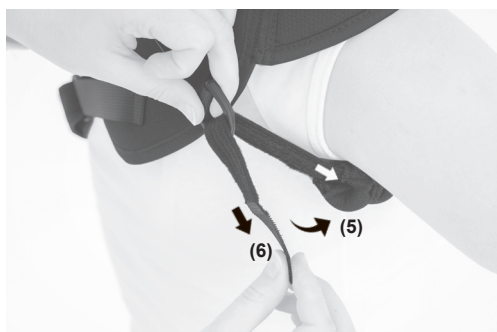


- 6. PL:** Ustaw odpowiednią długość pasa w taki sposób, aby odpowiednio stabilizował element barkowy (A). W tym celu przesunąć osłonę pasa (5) i dokonać regulacji długości pasa zapinając go na rzep (6).  
**EN:** Set the appropriate length of the belt in such a way as to properly stabilize the shoulder element (A). To do this, slide the belt cover (5) and adjust the belt length by fastening it with Velcro (6).



- 7. PL:** Przesuń osłonę pasa (5) osłaniając pasek z rzepem (6).  
**EN:** Fasten the belt cover (5) on the Velcro strap (6).

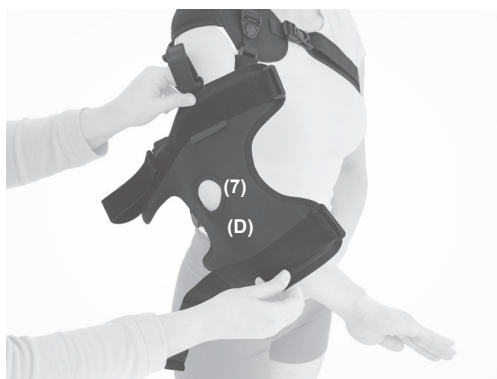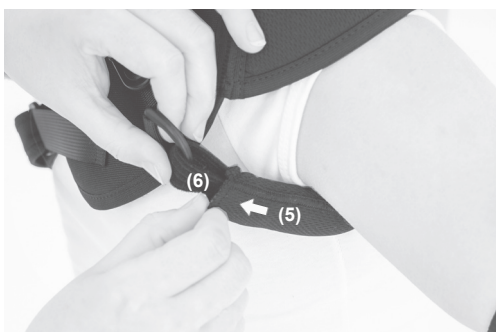

- 8. PL:** Przyłóż element przedramienia (D) do kończyny w taki sposób, aby otwór znajdował się w stawie łokciowym (7).  
**EN:** Place the forearm element (D) against the limb in such a way that the hole is in the elbow joint (7).


- 9. PL:** Przepleć taśmy przez klamry, ustaw odpowiednią kompresję i zapnij na rzepy (8,9).  
**EN:** Interlace the straps through the buckles, set the appropriate compression and fasten with Velcro (8,9).

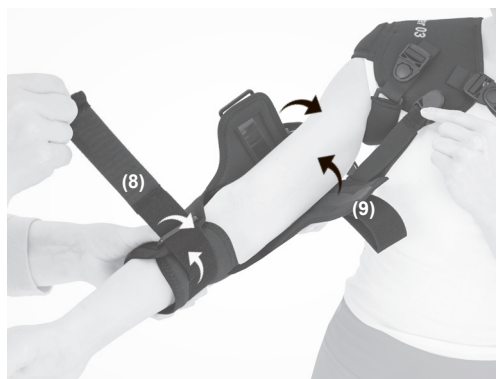

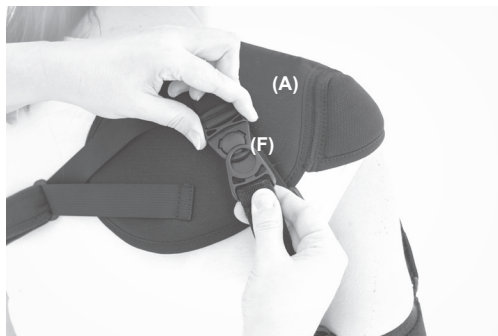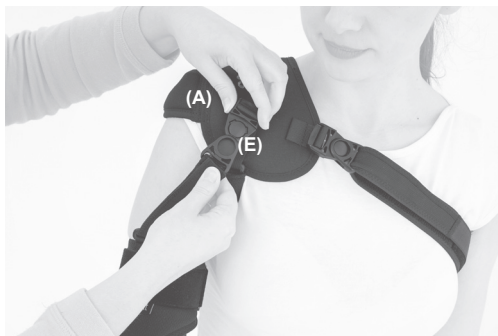

**10. PL:** Przypnij pasy z kłamrami (E,F) do elementu barku (A).

**EN:** Attach the straps with the buckles (E,F) to the shoulder element (A).

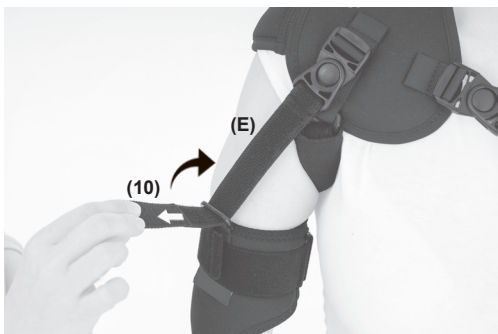

**11. PL:** Ustaw odpowiednie napięcie pasów (E,F) i zapnij na rzepy (10,11).

**EN:** Adjust the tension of the belts (E,F) and fasten with Velcro (10,11).



**PL: UWAGA!** Jeżeli istnieje potrzeba, skoryguj długość pasa pachowego (C).

**EN: WARNING!** If necessary, correct the length of the armpit belt (C).



**12. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.