



KOD KATALOGOWY	AM-PPB-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-PPB-01
CODE	AM-PPB-01
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-PPB-01

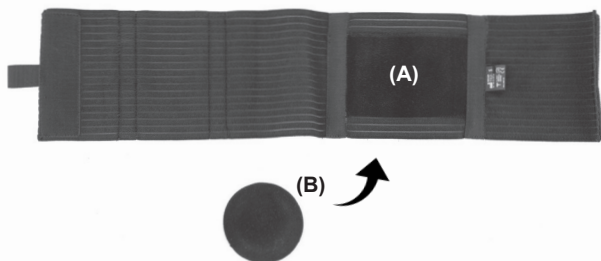

**PL:** A. Pas przepuklinowy  
B. Pelota silikonowa

**EN:** A. Hernia belt  
B. Silicone pad

**1. PL:** Rozepnij ortezę.  
**EN:** Unfasten the brace.

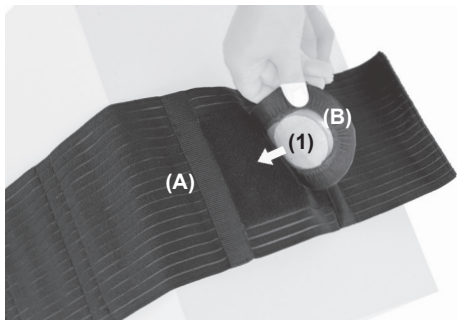

**2. PL:** Przypnij pelotę silikonową (B) do pasa (A) na rzep (1). Przyłóż pelotę w miejscu przepukliny (2).  
**EN:** Attach the silicone pad (B) to the strap (A) with Velcro (1). Put the pad on the hernia (2).



**3. PL:** Umieść kciuk w pętelce (3). Ustaw odpowiednią kompresję pasa (A) i zapnij na rzep (4).  
**EN:** Place your thumb in the loop (3). Set the correct compression of the belt (A) and fasten with Velcro (4).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.