


KOD KATALOGOWY	AM-SB-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA BIODRA
MODEL	ORTEZA BIODRA AM-SB-01
CODE	AM-SB-01
TRADE NAME	HIP ORTHOSIS
MODEL	HIP ORTHOSIS AM-SB-01

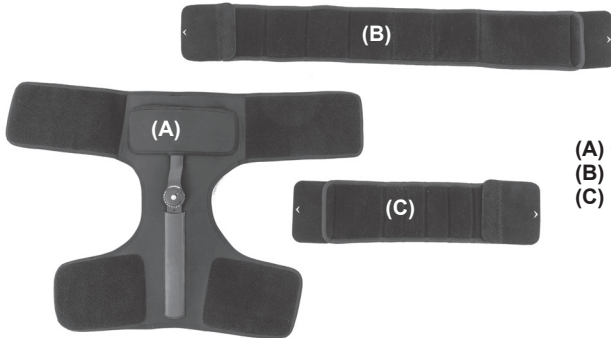

(A) ORTEZA / BRACE
(B) PAS BIODROWY / HIP BELT
(C) PAS UDOWY / THIGH BELT




1. PL: Przed założeniem ortezy na kończynę, zegar powinien być ustawiony w określonym przez lekarza prowadzącego zakresie ruchomości stawu biodrowego.

EN: Before you put the brace on, the range of motion in the drop lock should be adjusted according to doctor's recommendations.






2. PL: Przyłóż ortezę (A) do nogi w taki sposób, aby zegar (1) znajdował się na wysokości krętarza większego kości udowej. Tylko prawidłowo założona orteza pozostaje w osi stawu biodrowego i przylega równomiernie do całej kończyny.

EN: Place the brace (A) on the leg in such a way that the drop lock (1) is at the height of the greater trochanter of the femur. Only a properly fitted orthosis remains in the axis of the hip joint and adheres evenly to the entire limb.

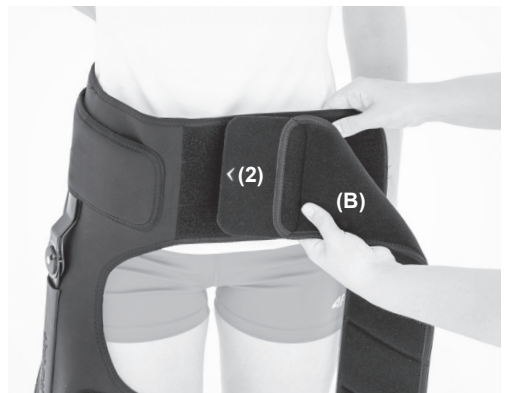

3. PL: Ustaw odpowiedni obwód ortezy. W tym celu przypnij pas biodrowy (B) do przedniej części ortezy na rzep (2).

EN: Set the appropriate circumference of the orthosis. To do this, attach the hip belt (B) to the front part of the Velcro fastener (2).

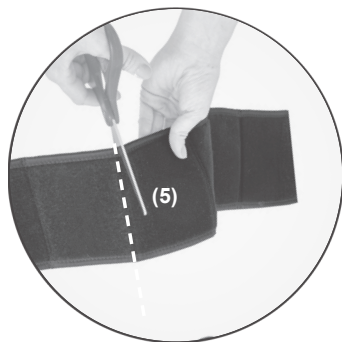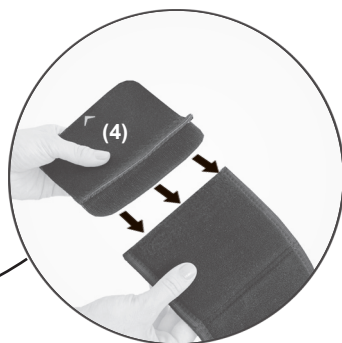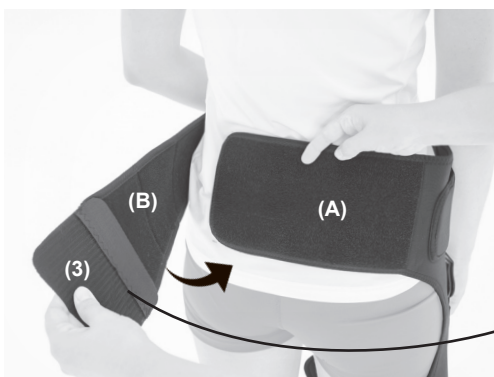




4. PL: Zapnij pas biodrowy (B) na rzep (3) do tylnej części ortozy (A). Jeżeli istnieje potrzeba skrócenia pasa biodrowego (B), odepnij element rzepowy (4), odetnij zbędną długość (5) i przypnij rzep ponownie.

EN: Fasten the hip belt (B) with the Velcro fastener (3) to the back of the brace (A). If there is a need to shorten the hip belt (B), unfasten the Velcro element (4), cut off the unnecessary length (5) and attach the Velcro again.



5. PL: Przypnij pas udowy (C) na rzep (6).

EN: Fasten the thigh strap (C) with the Velcro fastener (6)

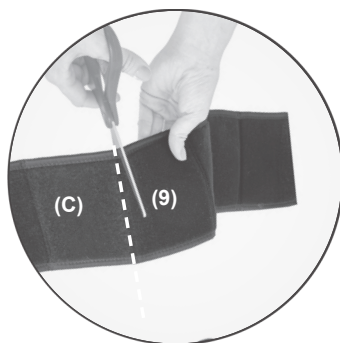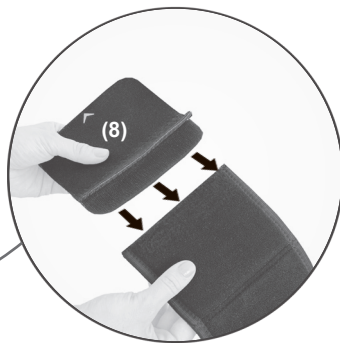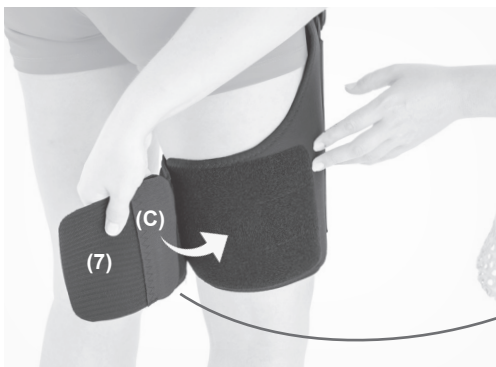

6. PL: Zapnij pas udowy (C) na rzep (7). Jeżeli istnieje potrzeba skrócenia pasa (C), odepnij element rzepowy (8), odetnij zbędną długość (9) i przyepnij rzep ponownie.

EN: Close the thigh belt (C) with the Velcro (7). If there is a need to shorten the belt (C), unfasten the Velcro element (8), cut off its unnecessary length (9) and attach the Velcro again.



7. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.