

KOD KATALOGOWY	AM-WSP-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
MODEL	AM-WSP-02
CODE	AM-WSP-02
TRADE NAME	SPINAL ORTHOSIS
MODEL	AM-WSP-02



A. Orteza / Brace

B. Pelota brzuszna / Abdominal pad

1. **PL:** Rozepnij ortezę, poluzuj zapięcia (1,2) i załóż ortezę na ramiona.
EN: Unfasten the brace, loosen fasteners (1,2) and put it on your shoulders.




2. **PL:** Przytnij przednią część ortozy na rzepy (3,4) do peloty brzusznej (B). Zwróć uwagę na to, aby orteza była zapięta symetrycznie.
EN: Attach the front part of the Velcro fastener (3,4) to the abdominal pad (B). Make sure that the brace is buckled symmetrically.



3. PL: Zapnij dolne pasy dociągowe na rzep (5,6).
Jeśli istnieje potrzeba za pomocą regulatorów (7)
ustaw odpowiednią długość pasów.

EN: Fasten the lower strap with Velcro (5,6).
If necessary, use the adjusters (7) to set the
appropriate length of the belts.

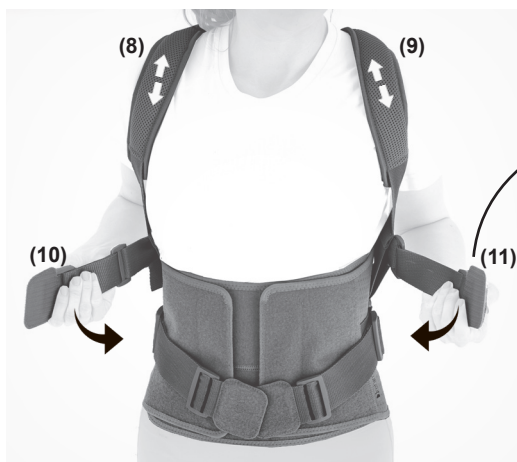

4. PL: Ustaw osłony szelek (8,9) w odpowiednim miejscu.
Zapnij górne pasy dociągowe na rzepy (10,11).
Jeśli istnieje potrzeba, za pomocą regulatorów (12)
ustaw odpowiednią długość pasów.

EN: Put the harness covers (8,9) in the right place.
Close the top straps with the Velcro fastener
(10, 11). If necessary, use the adjusters (12) to
set the desired length of the belts.



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.