



KOD KATALOGOWY	AM-SB-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA BIODRA
MODEL	ORTEZA BIODRA AM-SB-02
CODE	AM-SB-02
TRADE NAME	HIP ORTHOSIS
MODEL	HIP ORTHOSIS AM-SB-02


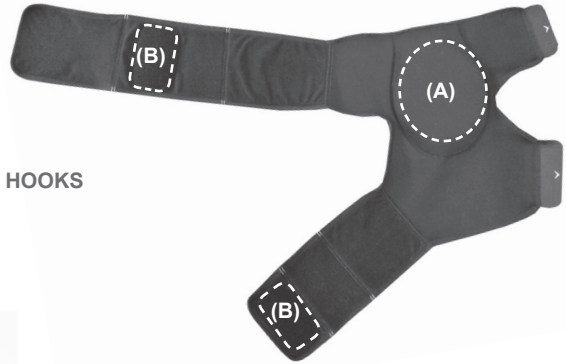


(A) OSŁONA BIODRA / HIP COVER
(B) RZEPY ZABEZPIEZAJĄCE / SAFETY HOOKS

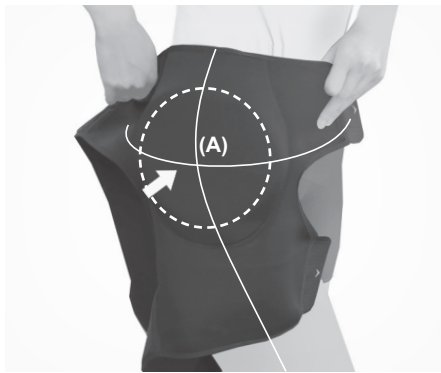

1. PL: Rozepnij ortezę i odczep rzepy zabezpieczające (B). Przyłóż ortezę do nogi w taki sposób, aby osłona biodra (A) znajdowała się na wysokości krętarza większego kości udowej. Tylko prawidłowo założona orteza pozostaje w osi stawu biodrowego i przylega równomiernie do całej kończyny.

EN: Open the brace and release the Velcro fasteners (B). Place the brace on the leg in such a way that the hip cover (A) is at the height of the greater trochanter of the femur. Only a properly fitted orthosis remains in the axis of the hip joint and adheres evenly to the entire limb.

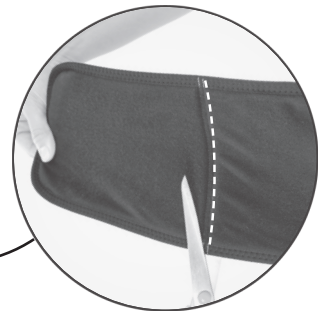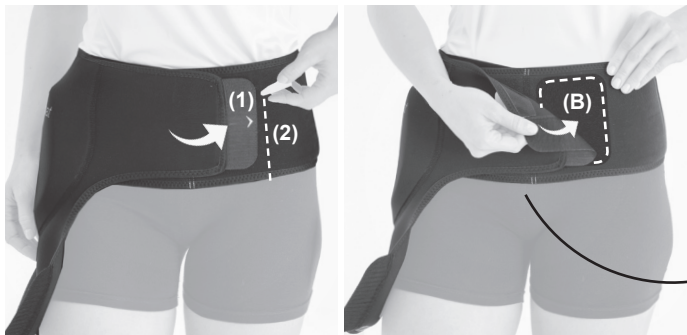


2. PL: Zapnij pas biodrowy na rzep (1). Zaznacz koniec zapięcia (2). Przyepnij rzep zabezpieczający (B) w zaznaczonym miejscu i ponownie zapnij pas na rzep.

EN: Close the waist belt with the Velcro fastener (1). Mark the end of the clasp (2). Attach the Velcro fastener (B) to the marked place and close the Velcro strap again.

3. PL: Jeżeli istnieje potrzeba skrócenia pasa biodrowego, odetnij jego zbędną długość w wyznaczonym miejscu pomiędzy liniami szycia.

EN: If there is a need to shorten the hip belt, cut off its unnecessary length in the designated place between the sewing lines.

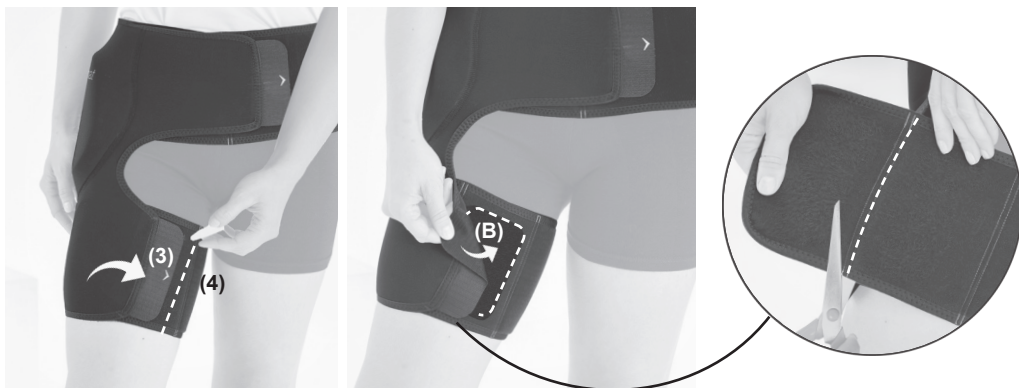

4. PL: Zapnij pas udowy na rzep (3). Zaznacz koniec zapięcia (4). Przypnij rzep zabezpieczający (B) w zaznaczonym miejscu i ponownie zapnij pas na rzep.

EN: Close the thigh belt with the Velcro fastener (3). Mark the end of the clasp (4). Attach the Velcro fastener (B) to the marked place and close the Velcro strap again.

5. PL: Jeżeli istnieje potrzeba skrócenia pasa udowego, odetnij jego zbędną długość w wyznaczonym miejscu pomiędzy liniami szycia.

EN: If there is a need to shorten the thigh belt, cut off its unnecessary length in the designated place between the sewing lines.



6. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.