


KOD KATALOGOWY	AM-WSP-12
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-WSP-12
CODE	AM-WSP-12
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-WSP-12

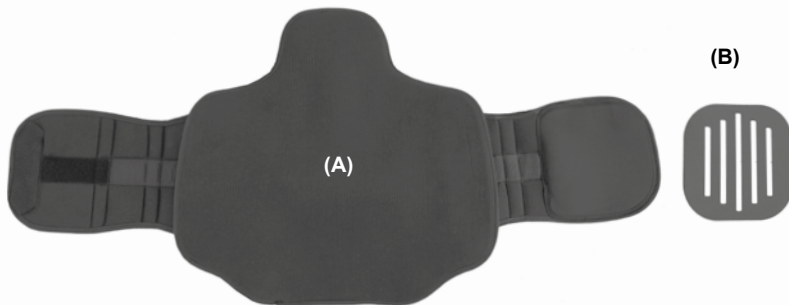

(A) Orteza lędźwiowo-piersiowa / Lumbo-thoracic brace  
 (B) Pelota brzuszna / Abdominal pad




**1. PL:** Rozepnij wyrób i poluzuj System Kompresyjny TLS (1) w taki sposób, aby element napinający (2) znajdował się w odpowiednim miejscu.

**EN:** Unfasten the product and loosen the TLS Compression System (1), so that the tensioner (2) is in the proper place.



**2. PL:** Przyłóż ortezę (A) do sylwetki, w celu jej dopasowania.

**EN:** Put the brace (A) on your body to adjust it.

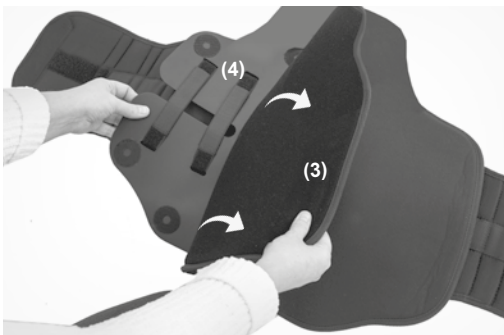



- 3. PL:** Dokonaj regulacji zapięć znajdujących się na usztywnieniu, aby dopasować wyrób do sylwetki. W tym celu odepnij element miękki (3) od usztywnienia (4) i za pomocą rzepów (5) ustaw pożądany kształt wyrobu. Regulacji dokonaj po prawej i lewej stronie, po czym ponownie przypnij element miękki.
- EN:** Adjust the fasteners on the frame to adjust the product to the figure. To do this, detach the padding (3) from the frame (4) using the Velcro fasteners (5) and set the desired shape of the product. Make adjustments on the right and left sides, then reattach the padding.



- 4. PL:** Aby dopasować usztywnienie do krzywizny kręgosłupa, odepnij zapięcie systemu TLS (6) i za pomocą rzepa (7) dokonaj regulacji. Następnie ponownie przypnij zapięcie systemu TLS.
- EN:** To adjust the brace to the curvature of the spine, unfasten the TLS system fastener (6) and use the Velcro (7) to make adjustments. Then reattach the TLS clasp.



- 5. PL:** Istnieje możliwość regulacji miejsca przypięcia systemu TLS.
- EN:** It is possible to adjust the place of attaching the TLS system.

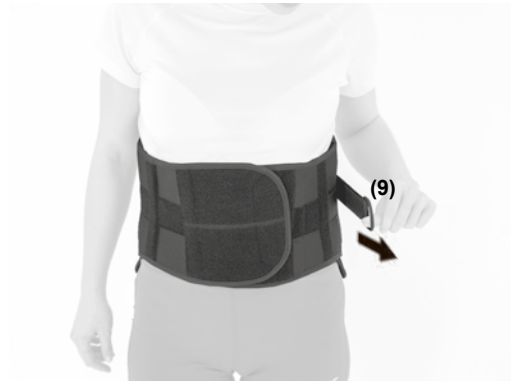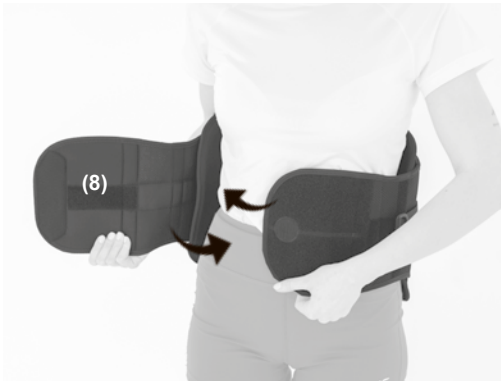

**6. PL:** Dopasowany do sylwetki wyrób ponownie przyłóż do odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa i zapnij z przodu na rzep (8). Ustaw odpowiednią kompresję wyrobu za pomocą klamkerki z rzepem (9). Zapnij element (10) na przedniej części wyrobu.

**EN:** Put the product fitted to the figure again to the lumbo-sacral section of the spine and fasten it with Velcro at the front (8). Set the appropriate compression of the product using the Velcro fastener (9). Fasten the element (10) on the front part of the product.



**7. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.

**PL: UWAGA!** Produkt może być stosowany bez peloty brzusznej (B).

**EN: ATTENTION!** The product can be used without the abdominal pad (B).