


KOD KATALOGOWY	AM-PES-07
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-PES-07
CODE	AM-PES-07
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-PES-07




(A) Orteza / Brace



1. **PL:** Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.

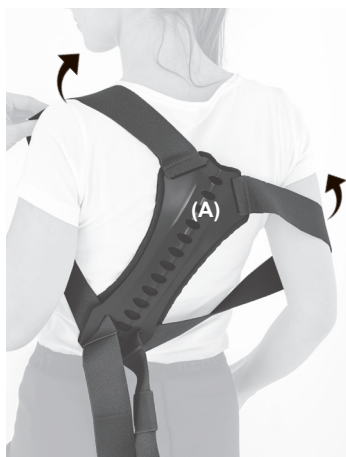

2. **PL:** Załóż ortezę (A) na ramiona i przyłóż do sylwetki w celu jej dopasowania.
EN: Put the brace (A) on your arms and adjust it to your figure.

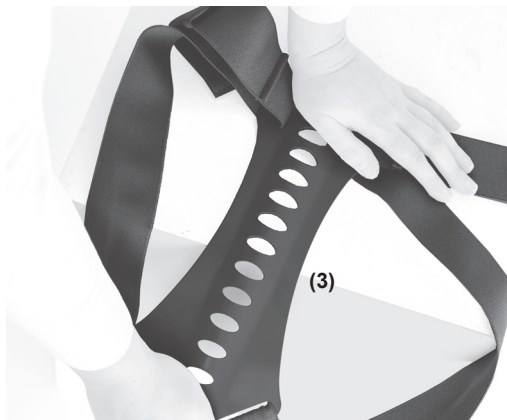

- 3. PL:** Jeśli istnieje potrzeba skorygowania kształtu stelaża (1) odepnij wyściółkę (2) i uformuj stelaż do pożądanego kształtu, według powyższego rysunku (3). Następnie ponownie przypnij wyściółkę.
EN: If there is a need to correct the shape of the frame (1), detach the padding (2) and form the frame to the desired shape, according to the picture above (3). Then attach the padding back on.

PL: UWAGA!

Pamiętaj, że kształtowanie stelaża dokonujemy na wyrobie, który nie jest założony na pacjenta.

EN: ATTENTION!

Remember that the shaping of the frame is made on a product that is not put on a patient.



- 4. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij ortezę z przodu na rzep (4).
EN: Set the right compression and fasten the brace at the front with the Velcro (4).



5. PL: Jeśli istnieje potrzeba, umieść koniec zapięcia w szlufce (5).

EN: If there is a need, place the end of the fastener in the belt loop (5).



6. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.