


KOD KATALOGOWY	AM-SO-09
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-SO-09
CODE	AM-SO-09
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-SO-09




**A. Orteza / Brace**  
**B. Pelota brzuszna / Abdominal pad**

- 1. PL:** Rozepnij ortezę (A) i poluzuj zapięcia (1,2).  
**EN:** Unfasten the brace (A) and loosen fasteners (1,2).

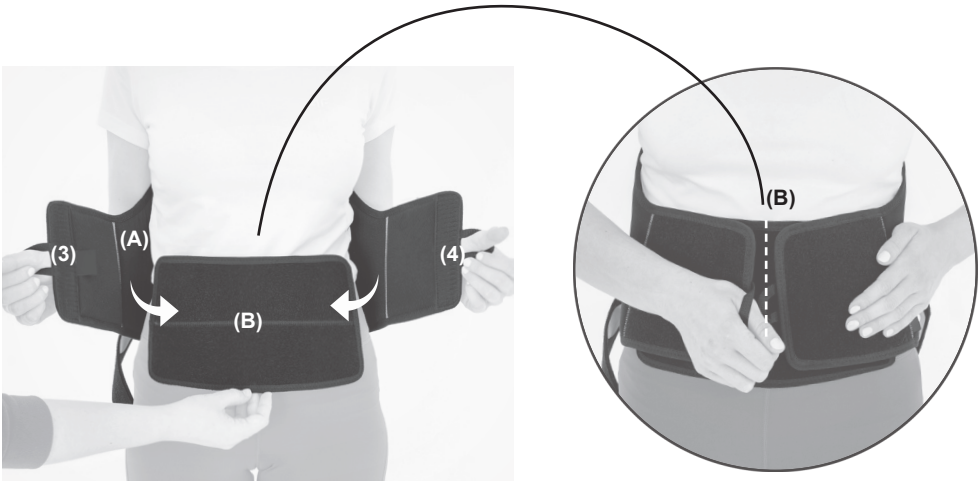

- 2. PL:** Za pomocą uchwytów przypnij przednią część ortezi na rzepy (3,4) do peloty brzusznej (B).  
 Zwróć uwagę na to, aby orteza była zapięta symetrycznie.  
**EN:** Fasten the front part of the brace with Velcro using the handles (3,4) to the abdominal pad (B).  
 Make sure that the brace is buckled symmetrically.

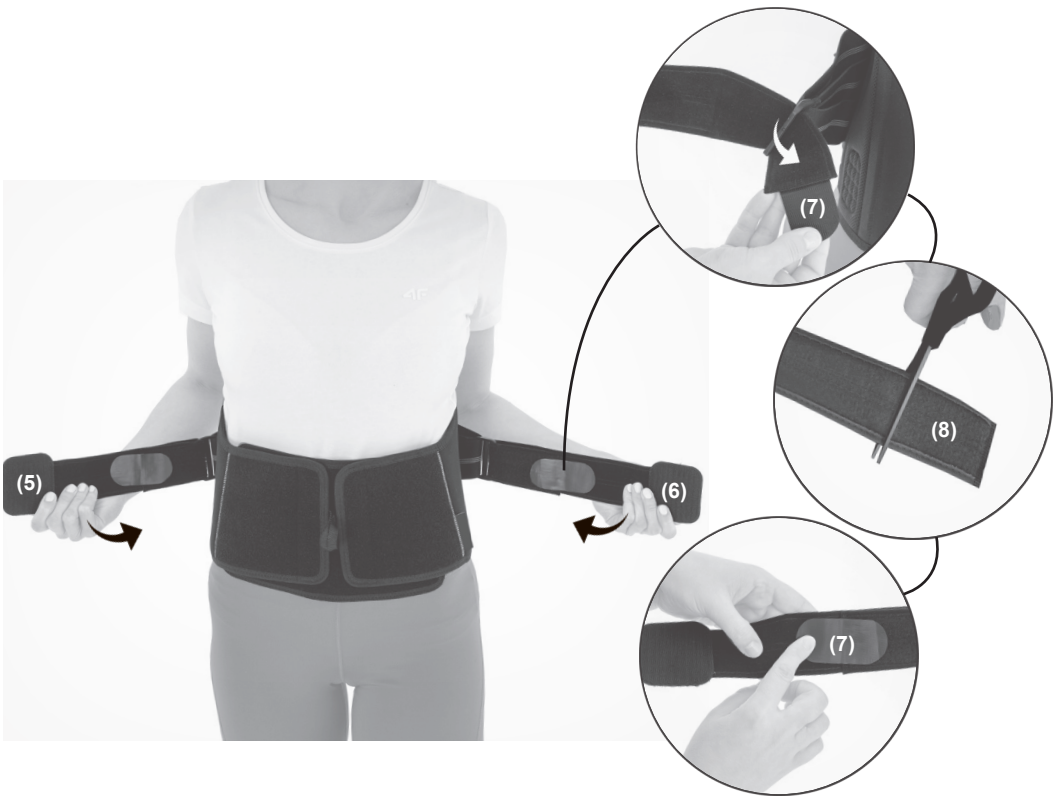

- 3. PL:** Zapnij pasy dociągowe na rzepy (5,6). Jeśli istnieje potrzeba odepnij rzepy (7), odetnij zbędną długość pasa (8), i ponownie przypnij rzepy (7). Następnie zapnij pasy dociągowe, ustawiając odpowiedni kompresję.
- EN:** Fasten the tension belts (5,6). If necessary, unfasten the Velcro (7), cut off the excess length of the belt (8), and fasten the Velcro again (7). Use the handles to fasten the front part of the brace with Velcro. Then fasten the tightening straps, setting the appropriate compression.



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
- EN:** Product is ready to use.