


KOD KATALOGOWY	AM-OSK-Z/2
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	AM-OSK-Z/2
CODE	AM-OSK-Z/2
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	AM-OSK-Z/2

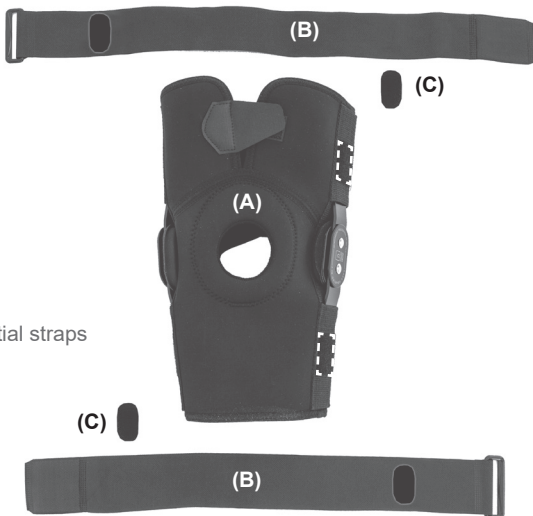

PL: A. Orteza
B. Pasy obwodowe
C. Rzepy

EN: A. Brace
B. Circumferential straps
C. Velcros


PL: Rozepnij ortezę i odcep wszystkie przypięte elementy.

EN: Unfasten the brace and unhook all attached parts.




1. PL: Załóż ortezę (A) na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka (1) znalazła się w otworze okółrępkowym, a zegary szyn znajdowały się w osi stawu kolanowego.

EN: Put the brace (A) on the leg and pull it up in such a way that the kneecap (1) is in the patellar donut and the drop locks of the splint are on the axis of the knee joint.

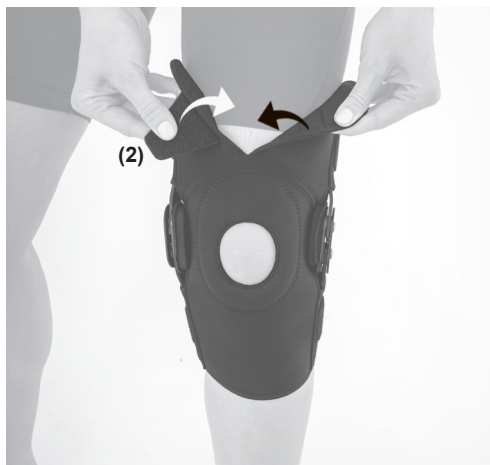

2. PL: Zapnij ortezę na rzep (2).

EN: Fasten the Velcro (2).

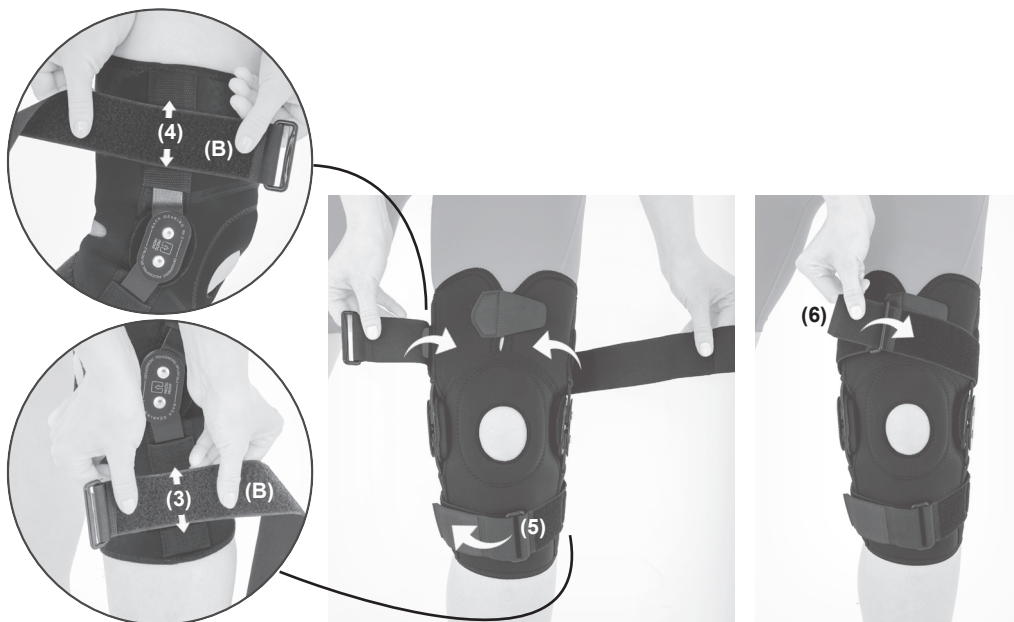

3. PL: Przypnij pasy obwodowe (B) do kanałów szyn (3,4) na rzepy. Przepleć taśmy przez klamry i zapnij, w podanej kolejności (5,6).

EN: Fasten the circumferential straps (B) to the splints channel (3,4) with Velcro. Interlace the straps through the buckles and fasten in the order given (5,6).


PL: UWAGA! Istnieje możliwość odwrócenia paska w taki sposób, aby klamerka znajdowała się od zewnętrznej lub wewnętrznej strony kończyny, w zależności od potrzeby.

EN: ATTENTION! It is possible to reverse the strap so that the buckle is on the outside or inside part of the limb, depending on the need.





4. PL: Po przeciwnej stronie klamerek zapiętej ortozy zaznacz miejsca skrzyżowania pasów obwodowych z kanałem szyny (7,8).

EN: On the opposite side of the buckles of the fastened orthosis, mark the places where the straps cross with the splint channel (7,8).

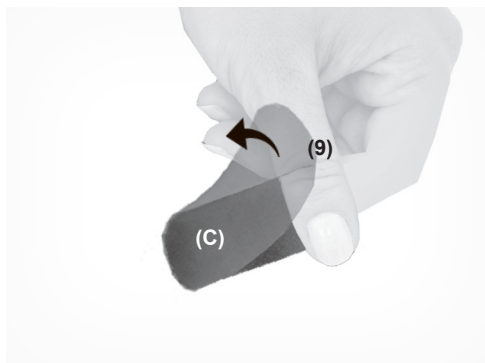

5. PL: Odklej folię zabezpieczającą (9) z rzepów (C).

EN: Peel off the protective foil (9) from the Velcro (C).

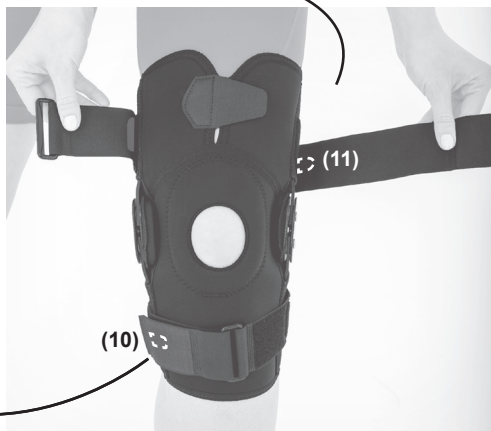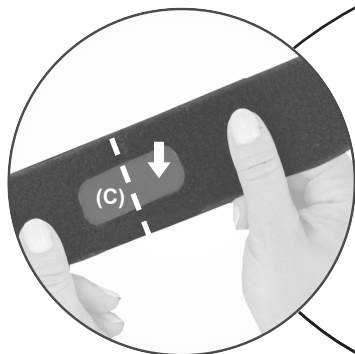

6. PL: W miejscach wcześniej zaznaczonych na pasach przyklej do wewnętrznej strony rzepy (C) i mocno dociśnij (10,11).

EN: In the places previously marked on the straps, attach the outer side of the Velcro (C) and press (10,11).



7. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.