



KOD KATALOGOWY	OT-20
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	OT-20
CODE	OT-20
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	OT-20

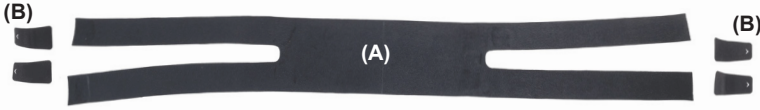

A. Orteza / Brace
B. Rzepy / Velcro



I. PL: ZASTOSOWANIE - DLA KOBIEŃ W CIĄŻY

EN: APPLICATION - FOR PREGNANT WOMEN.

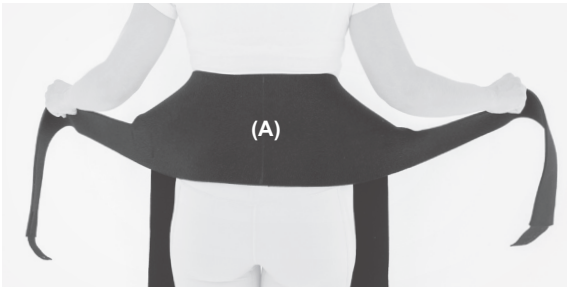




1. PL: Przyłóż ortezę (A) w okolice lędźwiowo-krzyżową kręgosłupa.

EN: Apply the brace (A) to the lumbosacral area of the spine.

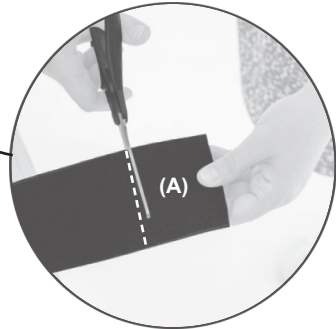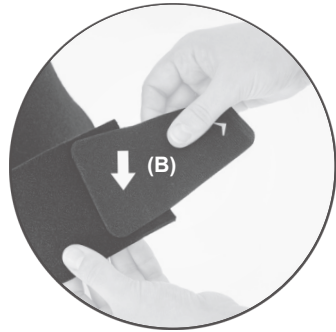

2. PL: Zapnij dolne pasy obwodowe na rzepy (B). Jeśli istnieje potrzeba, odepnij rzepy (B), odetnij zbędną długość pasa (A), i ponownie przypnij rzepy. Następnie zapnij pasy obwodowe, ustawiając odpowiednią kompresję.

EN: Fasten the lower circumference straps with Velcro (B). If necessary, unfasten the Velcro (B), cut off the excess length of the belt (A), and fasten the Velcro again. Then fasten the circumferential belts, setting the appropriate compression.

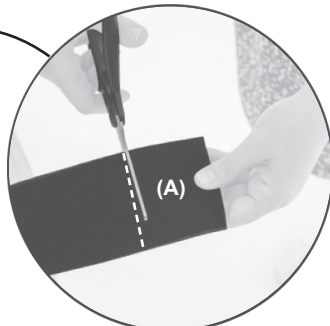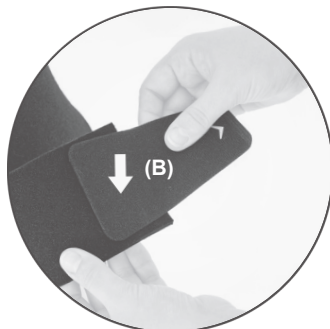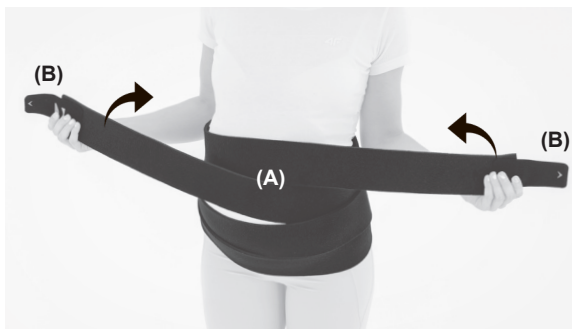

3. PL: Zapnij pasy obwodowe górne na rzepy (B). Jeśli istnieje potrzeba odepnij rzepy (B), odetnij zbędną długość pasa (A) i ponownie przypnij rzepy. Następnie zapnij pasy dociągowe, ustawiając odpowiednią kompresję.

EN: Fasten the upper perimeter straps with Velcro (B). If necessary, unfasten the Velcro (B), cut off the excess length of the belt (A) and fasten the Velcro again. Then fasten the tightening straps, setting the appropriate compression.





4. PL: Gotowy wyrób.


EN: Product is ready to use.



1. **PL:** Przyłóż ortezę (A) do tułowia.
EN: Put the brace (A) on your trunk.

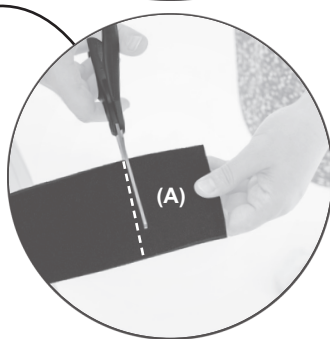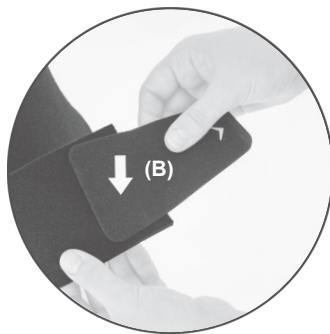

2. **PL:** Zapnij dolne pasy obwodowe na rzepy (B). Jeśli istnieje potrzeba, odepnij rzepy (B), odetnij zbędną długość pasa (A), i ponownie przypnij rzepy. Następnie zapnij pasy obwodowe, ustawiając odpowiednią kompresję.
EN: Fasten the lower circumference straps with Velcro (B). If necessary, unfasten the Velcro (B), cut off the excess length of the belt (A), and fasten the Velcro again. Then fasten the circumferential belts, setting the appropriate compression.

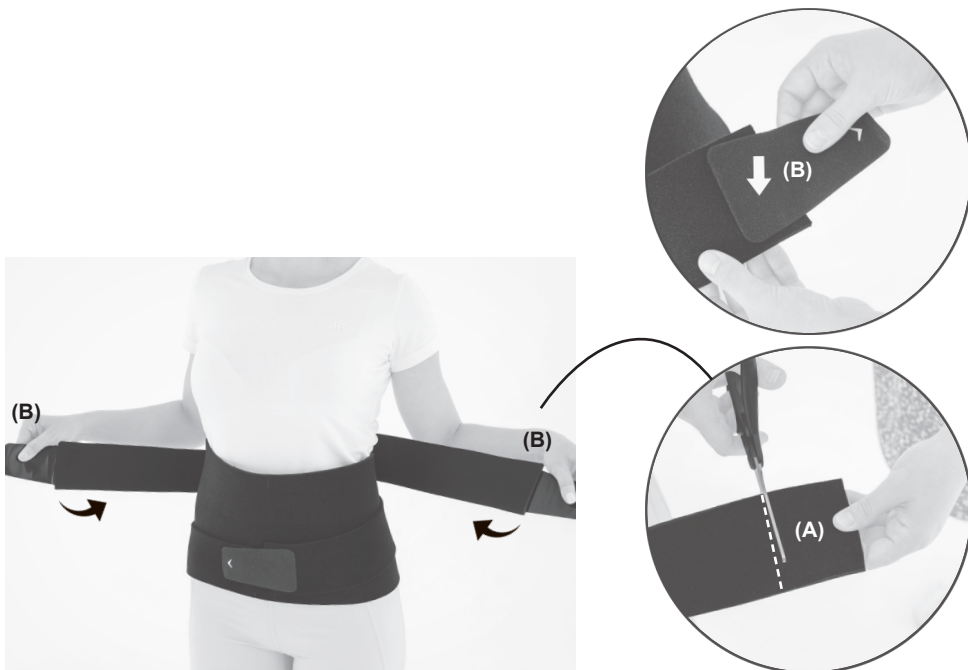

2. PL: Zapnij pasy obwodowe górne na rzepy (B). Jeśli istnieje potrzeba, odepnij rzepy (B), odetnij zbędną długość pasa (A) i ponownie przypnij rzepy. Następnie zapnij pasy dociągowe, ustawiając odpowiednią kompresję.

EN: Fasten the upper circumference straps with Velcro (B). If necessary, unfasten the Velcro (B), cut off the excess length of the belt (A) and fasten the Velcro again. Then fasten the tightening straps, setting the appropriate compression.



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.