



KOD KATALOGOWY	OKG-25
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	OKG-25
CODE	OKG-25
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	OKG-25

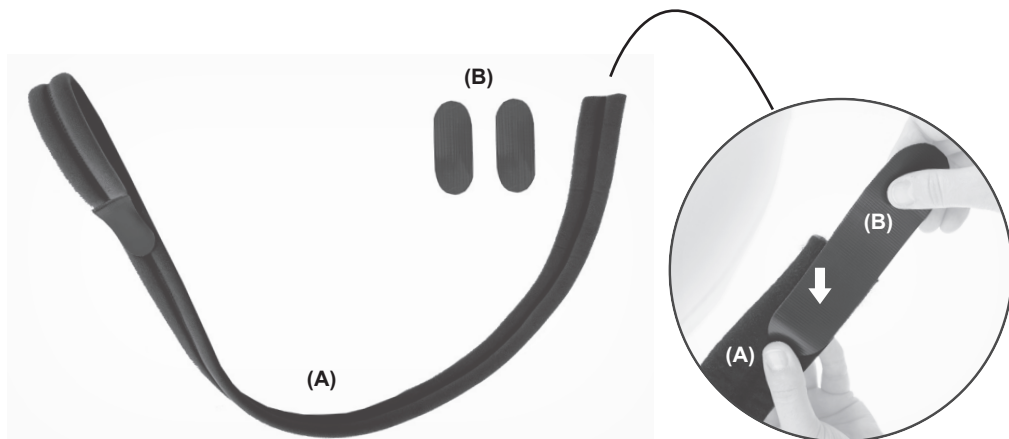

(A) Temblak / Sling
(B) Rzep zapinający / Fastening Velcro

- PL:** Przypnij rzep (B) do temblaka (A) w odpowiednim miejscu.
EN: Attach the Velcro (B) to the sling (A) in the right place.

WERSJA/VERSION 1 _____


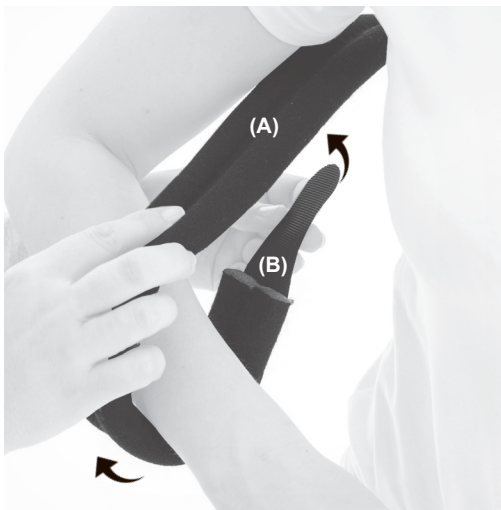


- PL:** Zapnij temblak (A) na przedramieniu na rzep (B).
EN: Fasten the sling (A) on the forearm with Velcro (B).



3. PL: Przełóż temblak przez plecy według wskazanego kierunku (1), przyłóż rękę do temblaka w linii nadgarstka (2) i zapnij na rzep (3).

EN: Put the sling through your back in the indicated direction (1), put your hand to the sling in the line of the wrist (2) and fasten with Velcro (3).

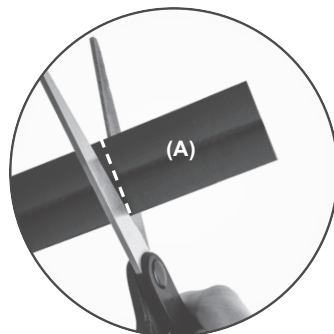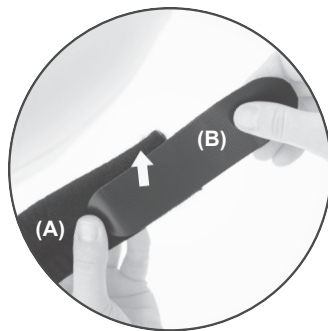



4. PL: Jeśli istnieje potrzeba skrócenia temblaka (A), odepnij rzep (B) i odetnij zbędna długość.

EN: If there is a need to shorten the sling (A), unfasten the Velcro (B) and cut off unnecessary length.





5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.

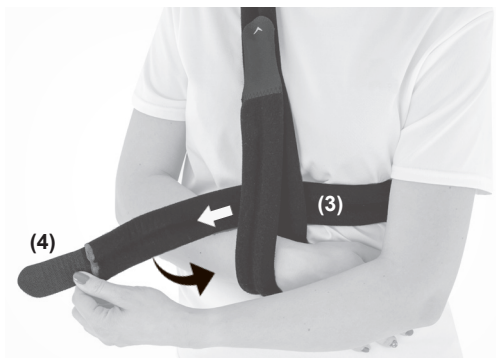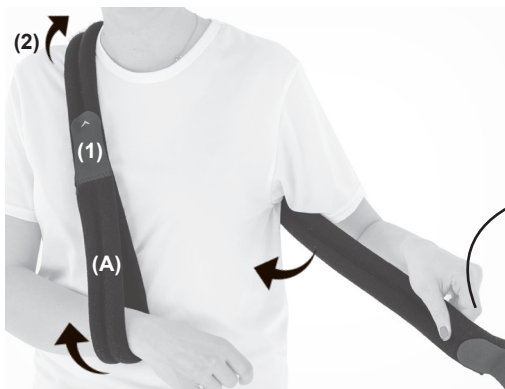

1. PL: Zapnij temblak (A) w linii nadgarstka na rzep (1). Przełóż temblak przez ramię według wskazanego kierunku (2), przełóż pasek pod temblakiem (3) i zapnij na rzep (4).

EN: Fasten the sling (A) at the wrist with Velcro (1). Pass the sling over the shoulder in the indicated direction (2), pass the strap under the sling (3) and fasten with Velcro (4).

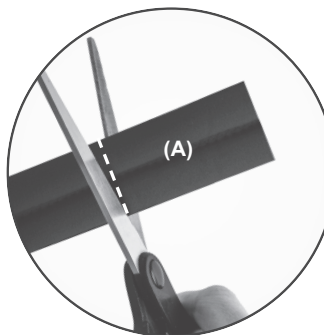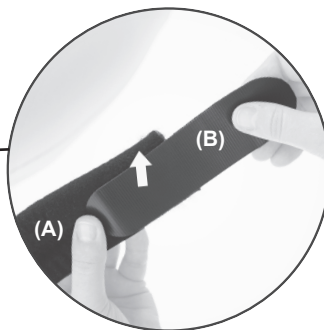


2. PL: Jeśli istnieje potrzeba skrócenia temblaka (A), odepnij rzep (B) i odetnij zbędną długość.

EN: If there is a need to shorten the sling (A), unfasten the Velcro (B) and cut off unnecessary length.



2. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.

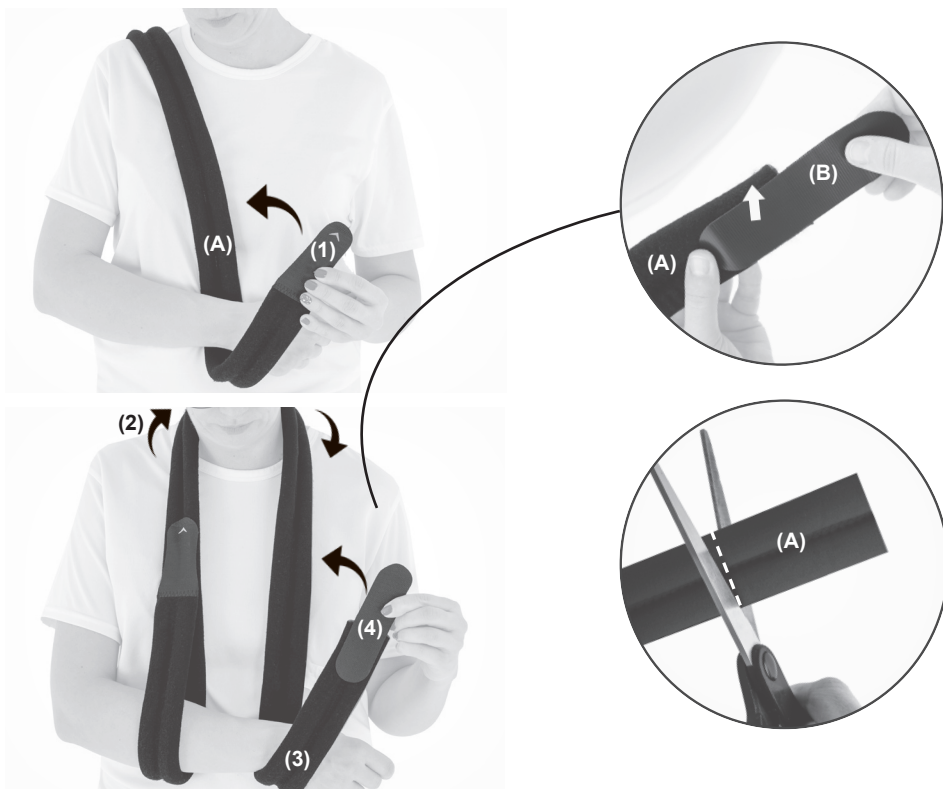

1. PL: Zapnij temblak (A) na przedramieniu na rzep (1). Przelóż temblak za głowę według wskazanego kierunku (2), przelóż pasek pod ręką (3) i zapnij na rzep (4).

EN: Fasten the sling (A) on the forearm with Velcro (1). Place the sling behind the head in the indicated direction (2), place the strap under the hand (3) and fasten it with Velcro (4).

2. PL: Jeśli istnieje potrzeba skrócenia temblaka (A), odepnij rzep (B) i odetnij zbędną długość.

EN: If there is a need to shorten the sling (A), unfasten the Velcro (B) and cut off unnecessary length.



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.