



KOD KATALOGOWY	AS-KX-02
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOLANA
MODEL	ORTEZA KOLANA AS-KX-02
CODE	AS-KX-02
TRADE NAME	KNEE ORTHOSIS
MODEL	KNEE ORTHOSIS AS-KX-02

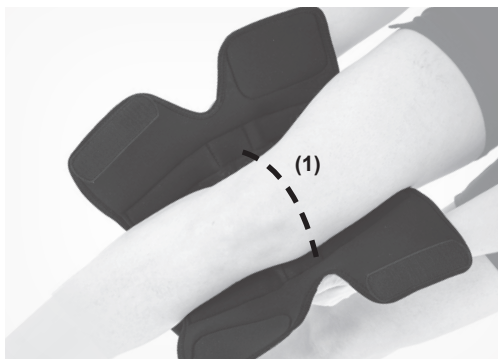

1. PL: Rozepnij ortezę i przyłóż do nogi (1) w taki sposób, aby zegary szyny znajdowały się w osi stawu kolanowego.

EN: Unfasten the brace and place it on the leg (1) in such a way that the drop lock are in the axis of the knee joint.

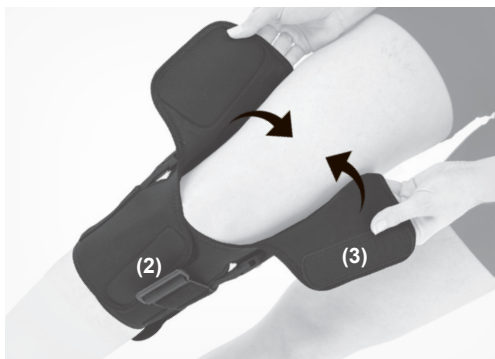

2. PL: Zapnij ortezę na rzepy w podanej kolejności (2,3).

EN: Fasten the brace at the back with Velcro according to the following steps (2,3).



3. PL: Przepleć paski przez klamki i zapnij według podanej kolejności (4,5).

EN: Interlace the straps through the buckles and fasten the Velcro straps according to the following steps (4,5).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.

