



KOD KATALOGOWY	OT-21
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	OT-21
CODE	OT-21
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	OT-21

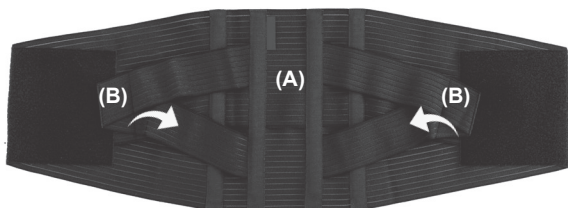

(A) Orteza / Brace
(B) Pasy dociągowe / Tension belts

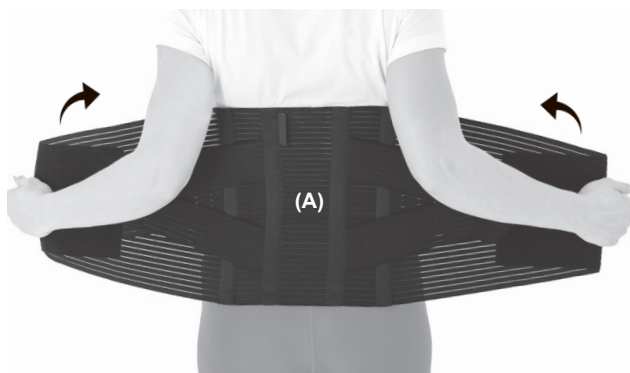

1. **PL:** Rozepnij ortezę (A) i poluzuj pasy dociągowe (B).
EN: Unfasten the brace (A) and loosen the tension belts (B).



2. **PL:** Przyłóż ortezę (A) w okolice lędźwiowo-krzyżową kręgosłupa, ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzep (1).
EN: Put the brace (A) in the lumbosacral part of the spine, set the appropriate compression and fasten with the Velcro (1).



- 3. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij pasy dociągowe na rzepy (2,3).
EN: Set the appropriate compression and fasten the Velcro straps (2,3).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.