
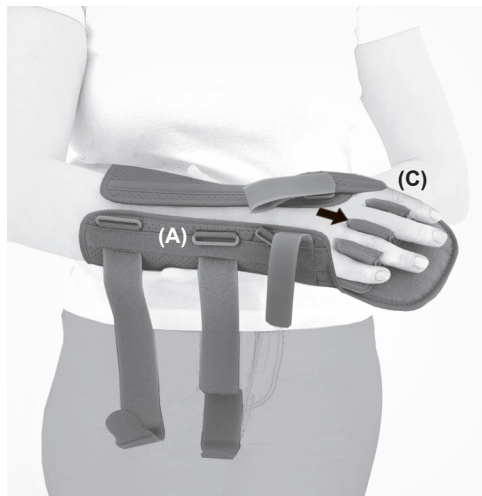



KOD KATALOGOWY	AM-OSN-L-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	AM-OSN-L-01
CODE	AM-OSN-L-01
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	AM-OSN-L-01

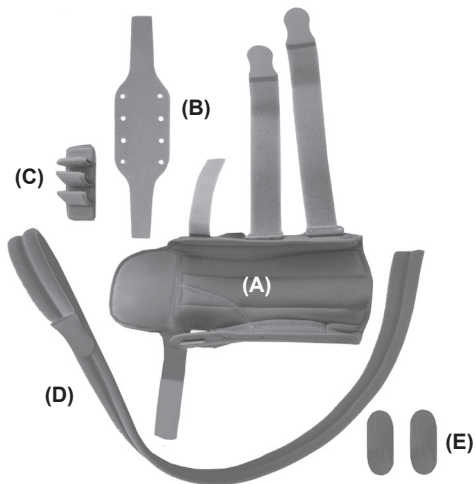


- A. Orteza / Brace
- B. Osłona palców / Fingers cover
- C. Separator palców / Fingers separator
- D. Temblak / Sling
- E. Rzep zapinający / Fastening Velcro

- 2. PL: Połóż rękę na ortezie (A) i umieść palce w separatorze (C).
- EN: Place your hand on the brace (A) and put your fingers in the separator (C).

- 1. PL: Rozepnij ortezę.
- EN: Unfasten the brace.

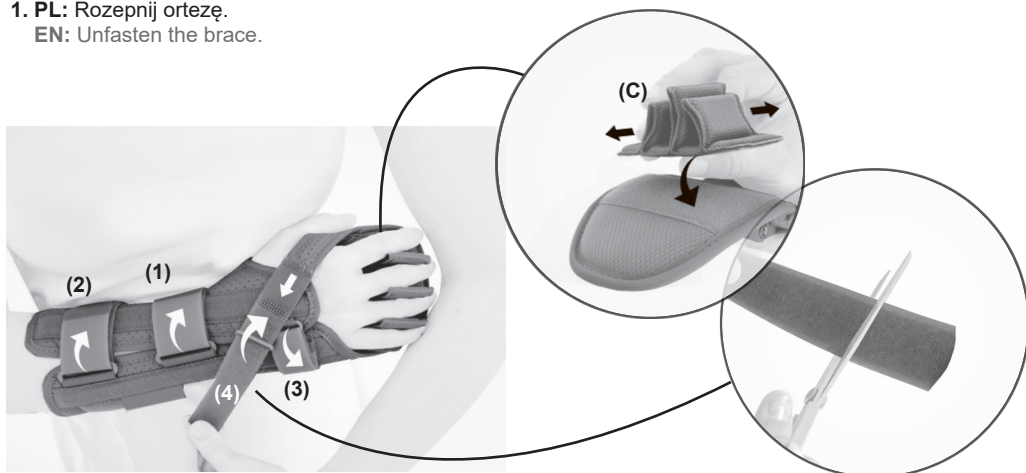


- 3. PL: Zapnij taśmy obwodowe w nadgarstku (1) i w przedramieniu (2) na rzepy. Jeśli istnieje potrzeba skoryguj ustawienie separatora (C). Następnie zapnij taśmy (3,4) w podanej kolejności. Jeśli istnieje potrzeba, odetnij ich zbędną długość.
- EN: Fasten the circumferential straps on the wrist (1) and in the forearm (2) with Velcro fasteners. You can correct the setting of the separator (C). Then fasten the tapes (3,4) in the order shown. If necessary, cut off their excess length.

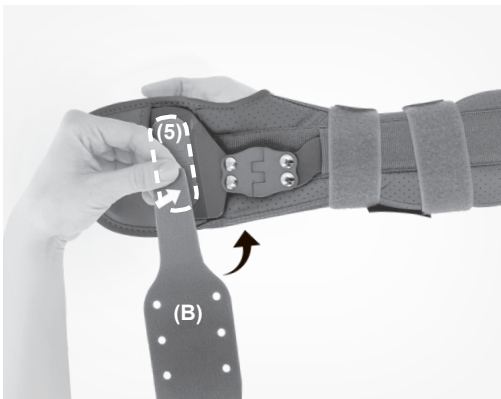


**4. PL:** Przypnij osłonę palców (B) do rzepa (5), oplatając nią palce.

**EN:** Attach the finger cover (B) to the Velcro (5) and wrap it around your fingers.

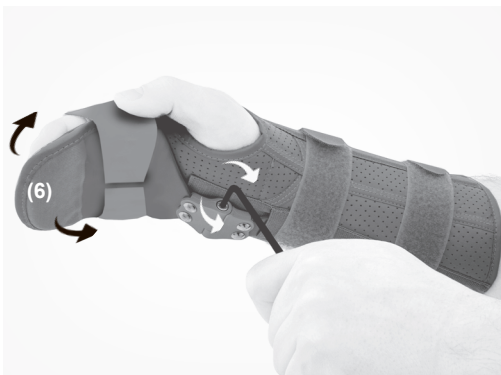

**5. PL:** Za pomocą kluczyka imbusowego, ustaw odpowiednią pozycję dłoni (6).

**EN:** Adjust the required hand position with the Allen key (6).

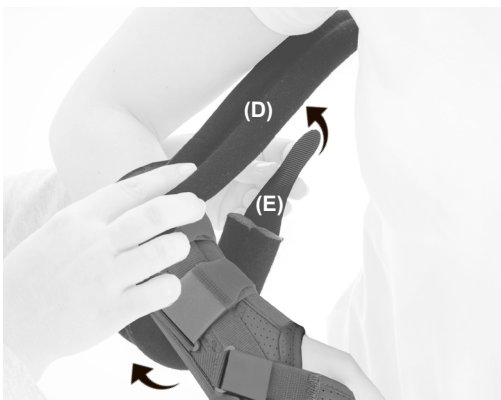



**6. PL:** Zapnij temblak (D) na przedramieniu na rzep (E).

**EN:** Fasten the sling (D) on the forearm with Velcro (E).



**7. PL:** Przełóż temblak przez plecy według wskazanego kierunku (7), przyłóż rękę do temblaka w linii nadgarstka (8) i zapnij na rzep (9).

**EN:** Put the sling through your back in the indicated direction (7), put your hand to the sling in the line of the wrist (8) and fasten with Velcro (9).

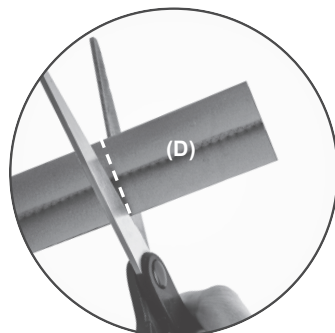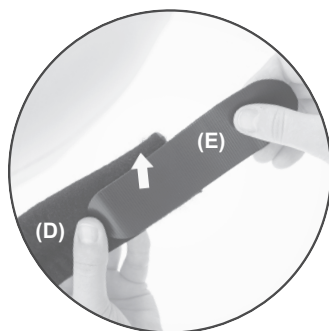

**8. PL:** Jeśli istnieje potrzeba skrócenia temblaka (D), odepnij rzep (E) i odetnij zbędną długość.

**EN:** If there is a need to shorten the sling (D), unfasten the Velcro (E) and cut off unnecessary length.



**9. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.