

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| KOD KATALOGOWY | AM-OSS-05/CCA PRO |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA STOPY      |
| MODEL          | AM-OSS-05/CCA PRO |
| CODE           | AM-OSS-05/CCA PRO |
| TRADE NAME     | FOOT ORTHOSIS     |
| MODEL          | AM-OSS-05/CCA PRO |



**1. PL:** Przed założeniem ortezy odepnij pasy (1) i poluzuj BOA® Fit System (2).

**EN:** Before using the brace on, unfasten the straps (1) and loosen the BOA® Fit System (2).



**2. PL:** Załóż orteżę na nogę i podciągnij za szlufkę (3).


**EN:** Put the brace on your leg and pull up the belt loop (3).



**3. PL:** Za pomocą BOA® Fit System (4) ustaw odpowiednią kompresję.

**EN:** Use the BOA® Fit System (4) to set the appropriate compression.



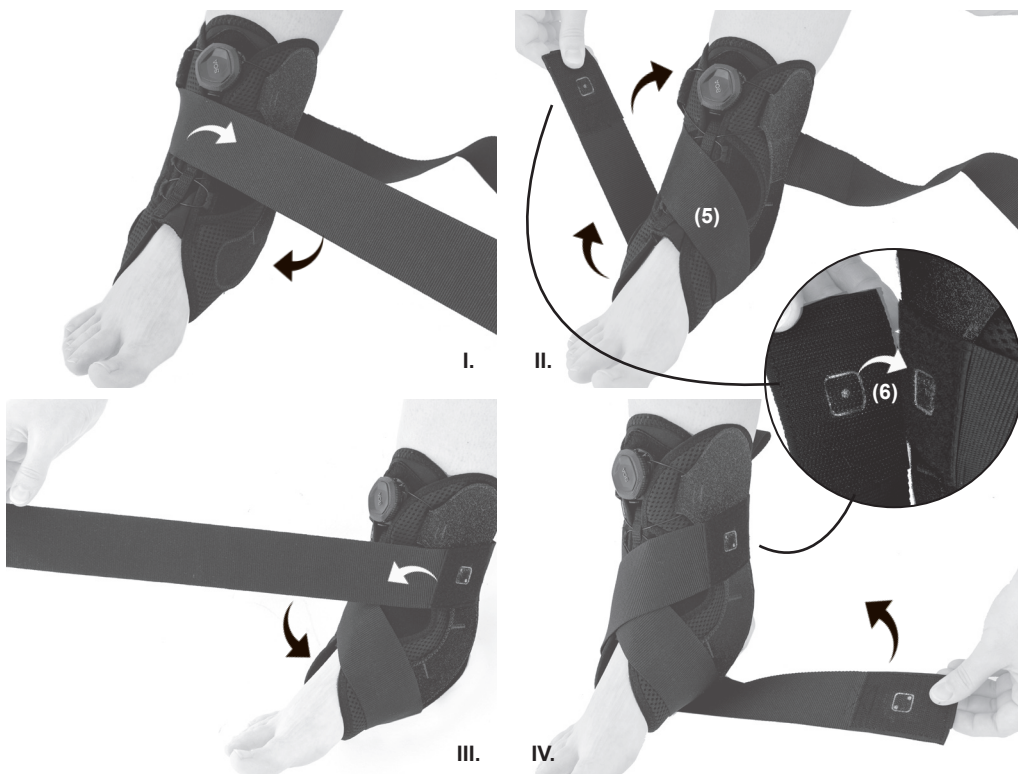

**4. PL:** Zapnij pasy ósemkowe zachowując kolejność ich zapinania. Przełóż taśmę (5) pod stopę i zapnij na rzep w oznaczonym miejscu (6) ustawiając przy tym odpowiednie napięcie pasa. Powtórz schemat zapinania z drugim pasem.

**EN:** Fasten the seat belts in figures of eight, observing the order in which they are fastened. Place the tape (5) under the foot and fasten the Velcro in the marked place (6), setting the appropriate tension of the strap. Repeat the fastening pattern with the second belt.



**5. PL:** Jeśli istnieje potrzeba skorygowania napięcia taśm stabilizujących chwycić za pętelki (7), odepnij pasy i podciągnij do góry. Ponownie przypnij taśmy do ortozy.

**EN:** If you need to adjust the tension of the stabilizing straps, grab the loops (7), unfasten the straps and pull them up. Reattach the straps to the brace.



- 6. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.