



KOD KATALOGOWY	OKD-28
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ OKD-28
CODE	OKD-28
TRADE NAME	LOWER LIMB ORTHOSIS
MODEL	LOWER LIMB ORTHOSIS OKD-28


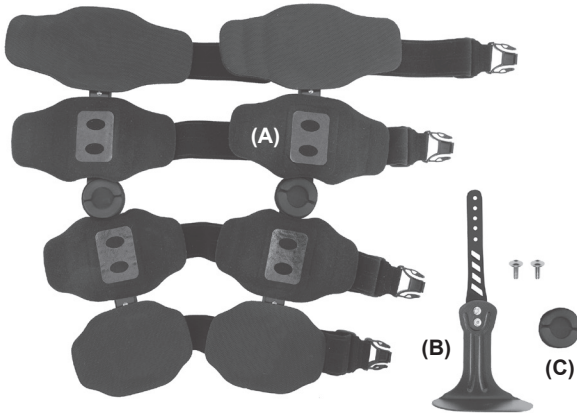


A. Orteza / Brace
B. Strzemię stopy / Foot stirrup
C. Osłona kostki / Ankle cover

- 1. PL:** Rozepnij klamry, aby przygotować ortezę do założenia.
EN: Unfasten the buckles to prepare the brace for use.


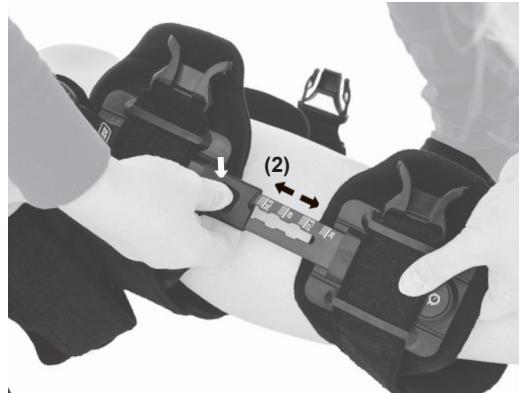



- 2. PL:** Stabilizator zawsze zakładaj na siedząco. Przed zapięciem ortozy, zegary powinny być ustawione dokładnie po bokach stawu kolanowego (1) (w lini szpary stawowej) w określonym przez lekarza prowadzącego zakresie ruchomości.
EN: The po-op knee brace should be put while seating. Before you buckle the straps, the drop locks should be on height of the femurs condyles (1) (in joint space). The ROM should be adjusted according to the specialist recommendation.
- 3. PL:** Dopasuj długość ortozy. Jeśli jesteś wysoki/ wysoka zwiększ długość bocznych szyn udowych i puszczelowych za pomocą innowacyjnego systemu Press-Slide (2).
EN: Adjust the length of the brace. If you are tall, lengthen the side splints by innovative Press-Slide system (2).

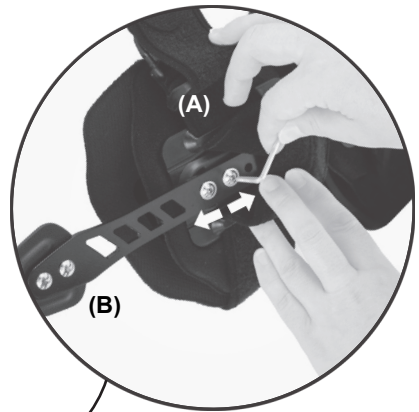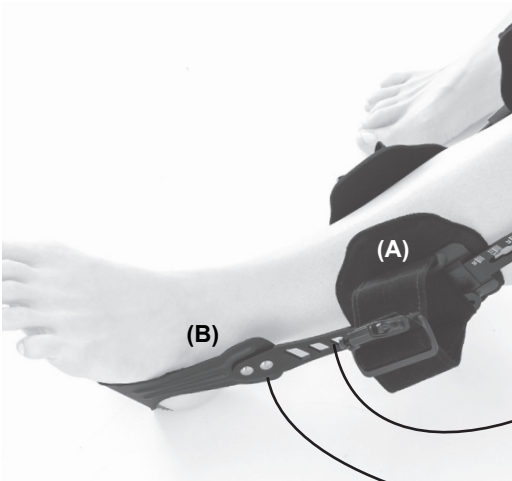


4. PL: Umieść strzemię (B) pod stopą i przykręć do ortezy (A) na śrubki za pomocą kluczyka. Jeśli jest potrzeba zamontuj osłonę kostki (C). Przyklej rzep w odpowiednim miejscu i przyczep poduszkę.

EN: Place the foot stirrup (B) under the foot and screw it to the orthosis (A) using a key. If necessary, install the ankle cover (C). Stick the Velcro in the appropriate place and attach the pillow.

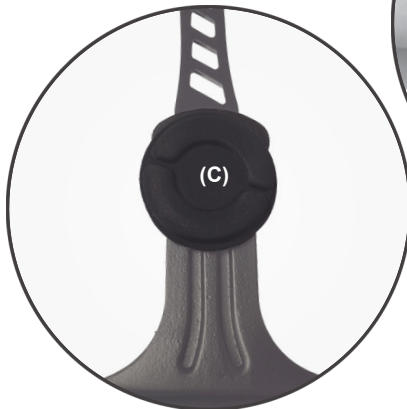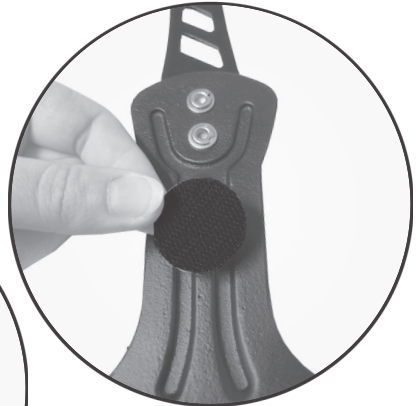

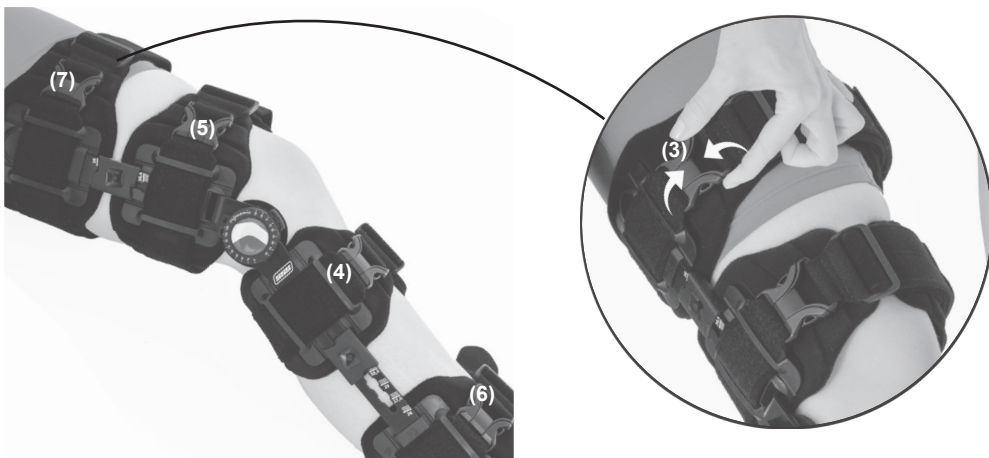


- 5. PL:** Zapinanie ortozy na klamry (3) zawsze zaczynaj od pasków leżących najbliżej stawu kolanowego (4,5,6,7).
EN: First, buckle (3) the straps which are the closest to the knee (4,5,6,7).

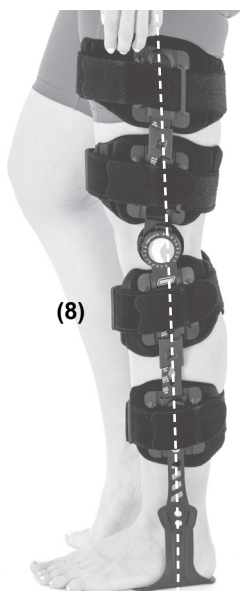


- 6. PL:** Regulowane paski powinny być takiej długości, aby po zapięciu ortozy dobrze przylegała do nogi, a szyny przebiegały wzdłuż bocznej osi nogi (8).

EN: The adjustable straps should be of such a length that, when fastened, the orthosis fits snugly to the leg, and the splints run along the lateral axis of the leg (8).

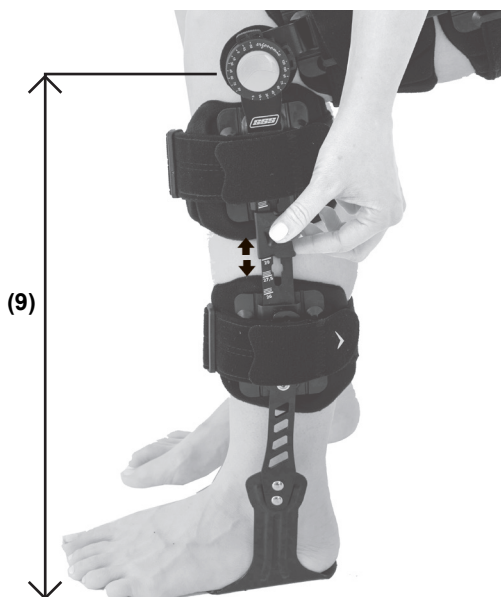

- 7. PL:** Sprawdź czy ustawienie wysokości szyn ze strzemieniem jest poprawne i odległość od zegara do podłoża (9) nie jest za niska/wysoka w stosunku do odległości od szpary kolanowej do krawędzi stopy.

EN: Check whether the height of the splints with foot stirrup is suitable and the distance from the drop lock to the ground (9) is not too low/high in relation to the distance from the knee gap to the edge of the foot.

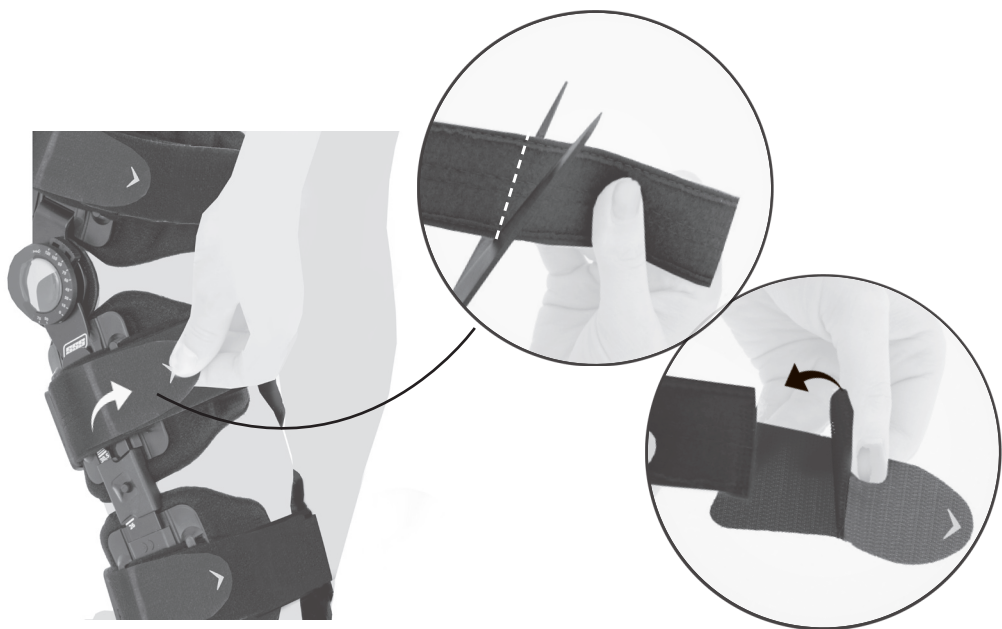

8. **PL:** Jeśli jest potrzeba odetnij zbędną długość pasków i zapnij rzepy.
EN: If necessary, cut off the excess length of the straps and fasten the Velcro



9. **PL:** Gotowy wyrób.
UWAGA! Tylko prawidłowo założona orteza pozostaje w osi stawu kolanowego i przylega równomiernie do całej kończyny.
EN: Product is ready to use.
ATTENTION! Only correct adjustment of the knee brace provides perfect fitting!