


KOD KATALOGOWY	AM-OSN-U-18
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ AM-OSN-U-18
CODE	AM-OSN-U-18
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT AM-OSN-U-18

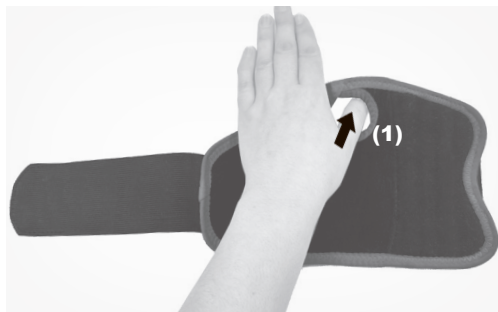

1. PL: Rozepnij wyrób i umieść kciuk w ortezie (1).

EN: Unfasten the product and and place your thumb in the brace (1).



2. PL: Ustaw usztywnienie w odpowiednim miejscu. Zwróć uwagę, aby pasek przebiegał w linii nadgarstka.

EN: Place the stiffener in the appropriate place. Make sure that the strap runs in line with your wrist.



3. PL: Przepleć pasek przez klamerkę (2), ustaw odpowiednią kompresję i zapnij na rzep (3).

EN: Interlace the strap through the buckle (2), set the appropriate compression and fasten it with Velcro (3).



4. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.