



KOD KATALOGOWY	AM-OSN-U-23
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ AM-OSN-U-23
CODE	AM-OSN-U-23
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT AM-OSN-U-23

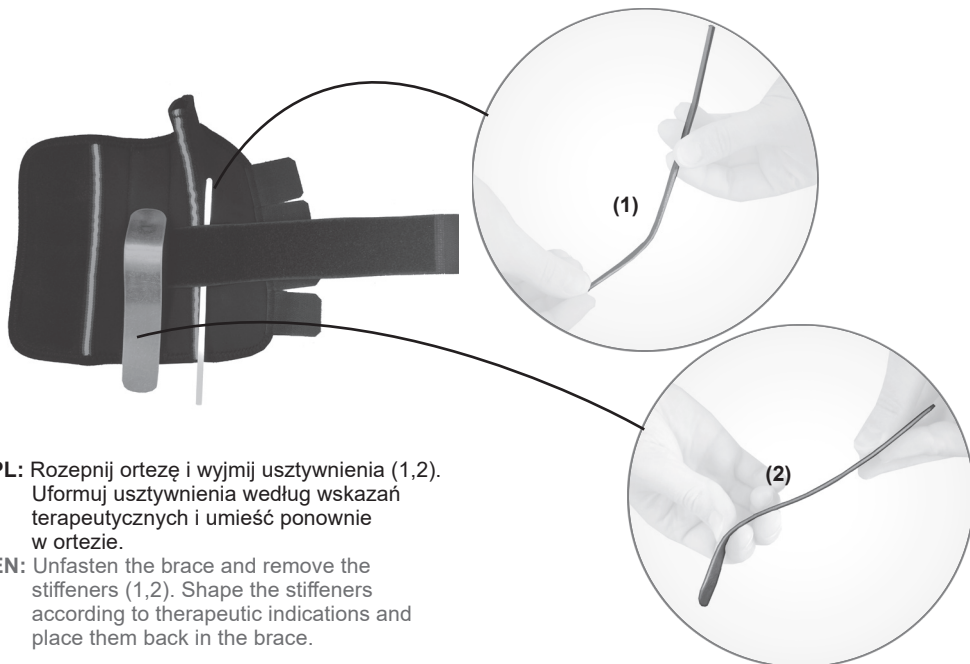

1. PL: Rozepnij ortezę i wyjmij usztywnienia (1,2).


Uformuj usztywnienia według wskazań terapeutycznych i umieść ponownie w ortezie.

EN: Unfasten the brace and remove the stiffeners (1,2). Shape the stiffeners according to therapeutic indications and place them back in the brace.

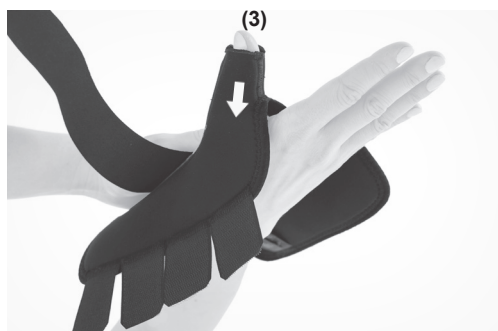

2. PL: Załóż wyrób na rękę umieszczając kciuk w ortezie (3).

EN: Put the product on your hand by placing your thumb in the brace (3).

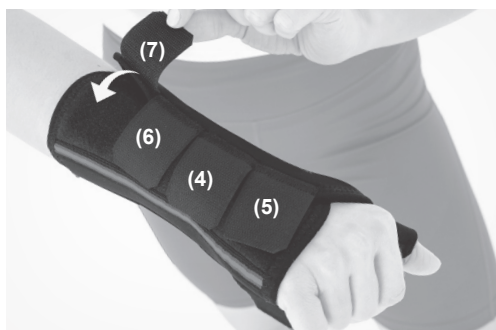


3. PL: Zapnij wyrób na rzepy w podanej kolejności (4,5,6,7).

EN: Fasten the product with Velcro in the given order (4,5,6,7).

PL: Uwaga! Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia zainstalowane w ortezie w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu lub innej części ciała.

EN: Attention! Before putting the brace on a patient, it is necessary to precisely adjust all the elements installed in the product in order to obtain the desired positioning of the secured joint or other part of the body.

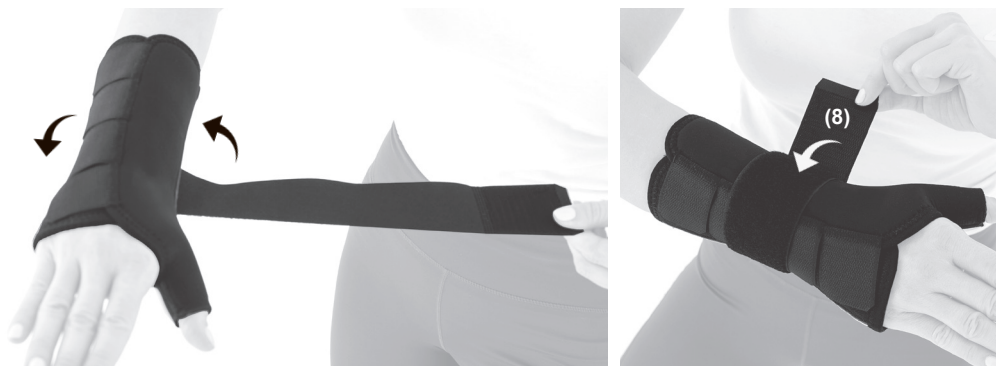

4. **PL:** Opleć taśmę wokół nadgarstka we wskazanym kierunku ustawiając odpowiednią kompresję i zapnij na rzep (8).
EN: Wrap the tape around the wrist in the indicated direction, setting the appropriate compression and fasten with Velcro (8).



5. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.