

KOD KATALOGOWY	AM-OSN-U-24
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ AM-OSN-U-24
CODE	AM-OSN-U-24
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	UPPER-EXTREMITY SUPPORT AM-OSN-U-24



1. PL: Rozepnij wyrób i wsuń dłoń w ortezę, a kciuk umieść w otworze (1).

EN: Unfasten the product and insert your hand into the brace and place your thumb in the hole (1).



2. PL: Opleć taśmę wokół nadgarstka we wskazanym kierunku ustawiając odpowiednią kompresję i zapnij rzep (2).

EN: Wrap the tape around your wrist in the indicated direction, setting the appropriate compression and fasten the Velcro (2).



3. PL: Opleć kciuk we wskazanym kierunku, ustaw odpowiednie napięcie taśmy elastycznej i zapnij rzep (3,4).

EN: Wrap your thumb in the indicated direction, set the appropriate tension of the elastic band and fasten the Velcro (3,4).





- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.