

KOD KATALOGOWY	OKD-34
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	OKD-34
CODE	OKD-34
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	OKD-34



1. PL: Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.



2. PL: Przyłóż ortezę (1) w odpowiednim miejscu.
EN: Place the brace (1) in the appropriate place.



3. PL: Przelóż pasek przez klamerkę (2), ustaw odpowiednią kompresję i zapnij na rzep (3).
EN: Close the brace with Velcro (2), set the proper compression and close with Velcro (3).



4. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

