


KOD KATALOGOWY	OT-23
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	OT-23
CODE	OT-23
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	OT-23

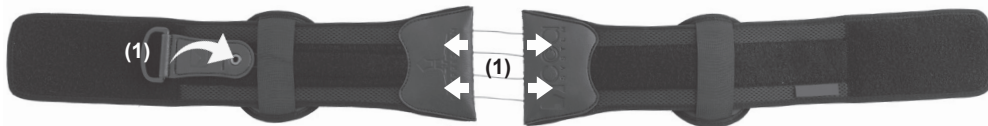


- 1. PL:** Rozepnij ortezę i poluzuj system CCA (1).
EN: Unfasten the brace and loosen the CCA system (1).



- 2. PL:** Przyłóż ortezę do odcinka krzyżowego kręgosłupa (2).
EN: Unfasten the brace, place it on the sacral spine (2).



- 3. PL:** Umieść peloty boczne w odpowiednim miejscu przesuwając je na przelotce po pasie (3).
EN: Place the side supports in the appropriate place by sliding them on the belt loop (3).

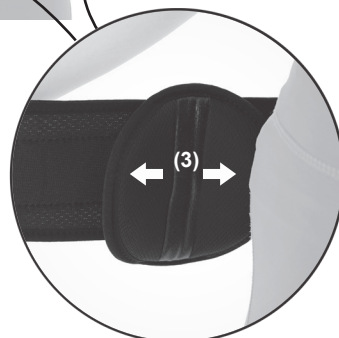



4. PL: Zapnij ortezę z przodu na rzep (4).

EN: Fasten the brace at the front with Velcro (4).



5. PL: Ustaw odpowiednią kompresję wyrobu przez naciągnięcie linki za pomocą uchwyty z rzepem (5). Zapnij element (6) w przedniej części wyrobu.

EN: Set the appropriate compression of the product by pulling the lace using the hook and loop fastener (5). Fasten the element (6) in the front part of the product.



6. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.