



KOD KATALOGOWY	AM-OSN-L-07
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA NADGARSTKA
MODEL	ORTEZA NADGARSTKA AM-OSN-L-07
CODE	AM-OSN-L-07
TRADE NAME	WRIST ORTHOSIS
MODEL	WRIST ORTHOSIS AM-OSN-L-07

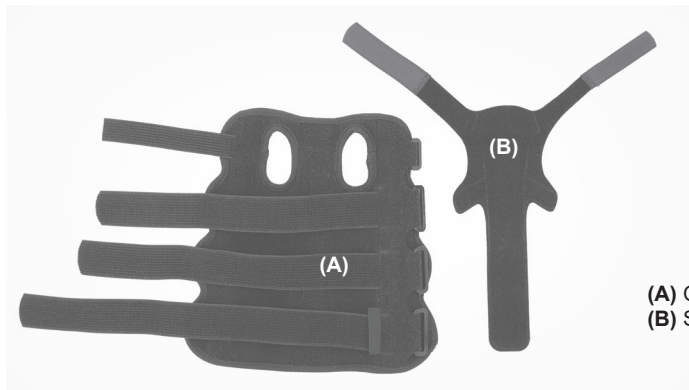

(A) Orteza / Brace
(B) Stabilizator kciuka / Thumb support

1. PL: Rozepnij ortezę wyplatając rzepy z klamerek.

EN: Unfasten the brace by unthreading the Velcro straps from the buckles.

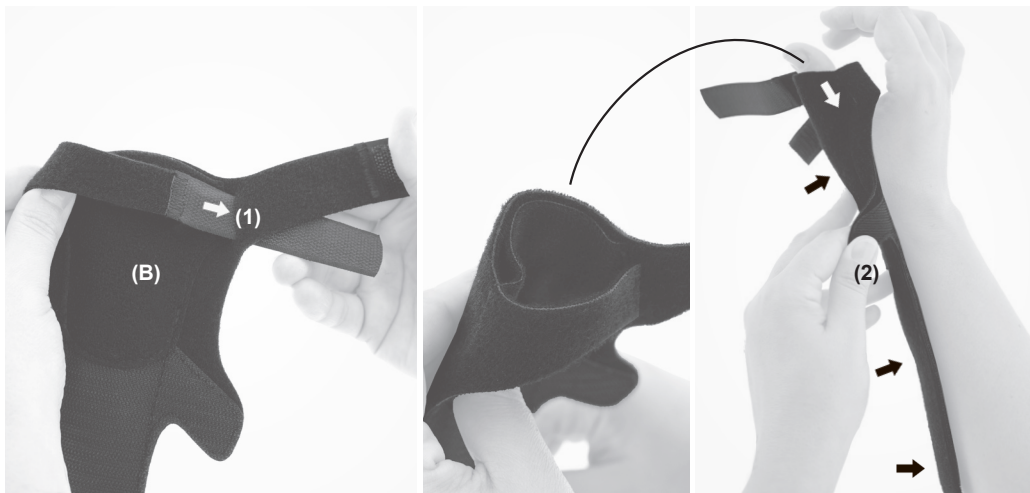

2. PL: Przepleć taśmę obwodową na usztywnieniu kciuka (B) przez otwór (1), i dopasuj usztywnienie do dłoni (2).

EN: Thread the circumferential strap on the thumb support (B) through the opening (1), and adjust the support to fit the hand (2).



UWAGA! ATTENTION!



PL: Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia zainstalowane w ortezie w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu lub innej części ciała.

EN: Warning! Before putting the brace on a patient, it is necessary to precisely adjust all the elements installed in the product in order to obtain the desired positioning of the secured joint or other part of the body.




3. PL: Załóż ortezę na rękę umieszczając kciuk w ortezie (3). Przepleć taśmę (4) przez klamrę i zapnij taśmę stabilizującą nadgarstek (5).

EN: Put the brace on your hand, placing the thumb into the thumb section (3). Thread the strap (4) through the buckle and fasten the wrist stabilizing strap (5).

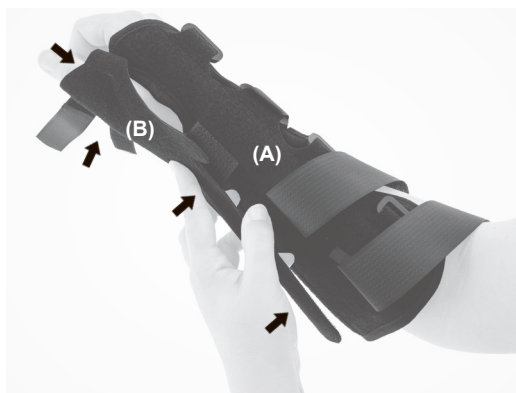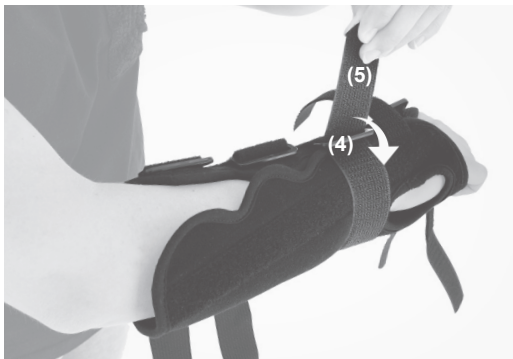


4. PL: Przypnij stabilizator (B) do ortezy (A) w odpowiednim miejscu.




EN: Attach the stabilizer (B) to the brace (A) in the appropriate position.

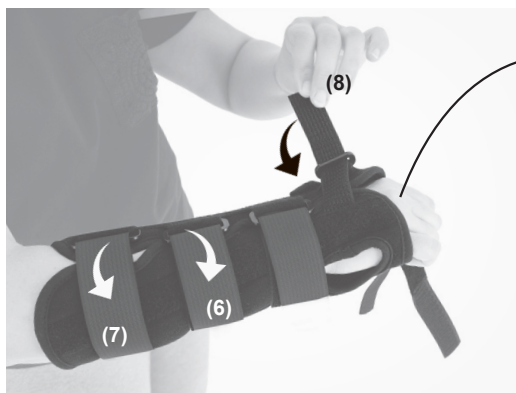

5. PL: Przepleć paski przez klamerki i zapnij według podanej kolejności (6,7,8). Jeśli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość paska.

EN: Thread the straps through the buckles and fasten them in the given order (6,7,8). If necessary, trim any excess strap length.

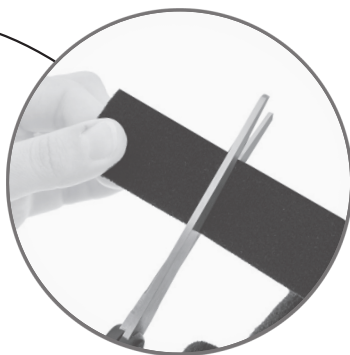

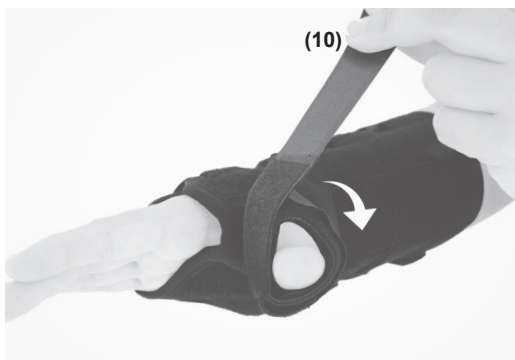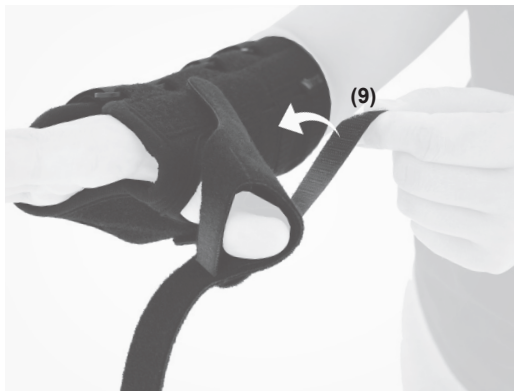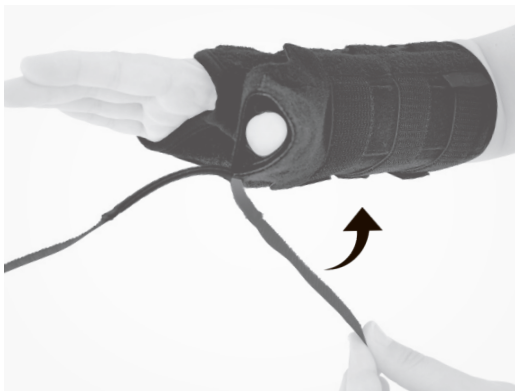

- 6. PL:** Zapnij rzepy obwodowe kciuka według wskazanego kierunku (9,10).
EN: Fasten the thumb circumferential Velcro straps in the indicated direction (9,10).



- 7. PL:** Gotowy wyrób.
EN: The product is ready to use.