


INSTRUKCJA USTAWIENIA ZAKRESU RUCHOMOŚCI KĄTA ZGIĘCIA I WYPROSTU W SZYNE ACL PRECISION

Orteza została wyposażona w szynę boczną, która posiada blokadę kąta **zgięcia (A)** w zakresie: 0°, 10°, 30°, 40°, 60°, 75°, 90° oraz blokadę **wyprostu (B)** w zakresie: 10°, 20°, 30°, 40°.

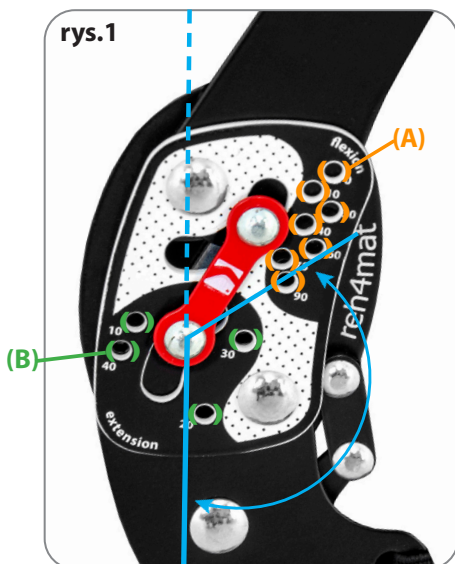

1. Ustaw ortezę w przybliżonym położeniu, w którym chcesz ograniczyć **zgięcie/wyprost** (rys.1)
2. Wkręć wkręt/wkręty w otwór oznaczony odpowiednią wartością kąta i sprawdź poprawność działania oraz zakres ruchów zegara (rys.2)

ZAKRES RUCHÓW I JEGO WARTOŚCI KĄTOWE USTALA LEKARZ PROWADZĄCY!

UWAGA: Jeżeli orteza wyposażona jest w dwie szyny boczne, regulacji należy dokonać osobno na obydwu szynach, ustawiając ten sam kąt zgięcia lub wyprostu. Szyny boczne nie wymagają konserwacji



REH4MAT sp. z o.o.

ul. Zenitowa 5a, 35-301 Rzeszów | Polska

tel. +48 16 621 42 20


tel. +48 16 621 41 35

e-mail: biuro@reh4mat.com

www.reh4mat.com

HOW TO SET UP THE FLEXION AND EXTENSION IN ACL PRECISION SPLINT - INSTRUCTION

The brace is equipped with a side splint with a bending **flexion (A)** in the scope of: 0°, 10°, 30°, 40°, 60°, 75°, 90° and **the extension (B)** in the scope of: 10°, 20°, 30°, 40°.

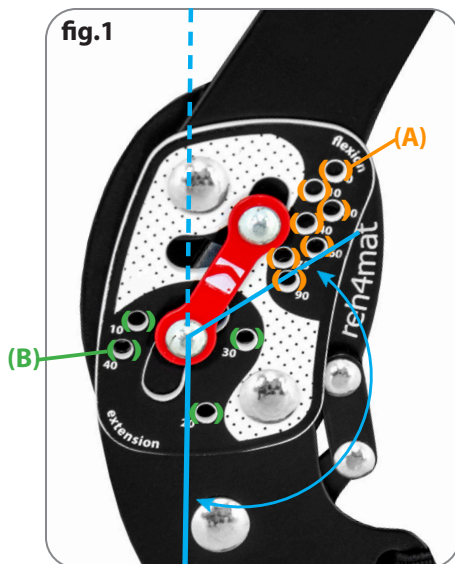

1. Position the brace in the approximate position where you want to limit the **flexion/extension (fig.1)**
2. Drive the screw/bolts into the hole marked with the appropriate angle value and check the correct operation and the range of clock movements (**fig.2**)

THE ANGLE OF FLEXION AND EXTENSION IS SPECIFIED BY THE DOCTOR OR PHYSIOTHERAPIST!

ATTENTION: If the brace is equipped with 2 side splints, adjustment is done on each side splint separately setting the same angle of flexion and extension. Side splints do not require maintenance



REH4MAT sp. z o.o.

ul. Zenitowa 5a, 35-301 Rzeszów | Poland

tel. +48 16 621 42 20

tel. +48 16 621 41 35

e-mail: export@reh4mat.com

www.reh4mat.com