


|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| KOD KATALOGOWY | AM-WSP-13                |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA TUŁOWIA           |
| MODEL          | ORTEZA TUŁOWIA AM-WSP-13 |
| CODE           | AM-WSP-13                |
| TRADE NAME     | TORSO SUPPORT            |
| MODEL          | TORSO SUPPORT AM-WSP-13  |

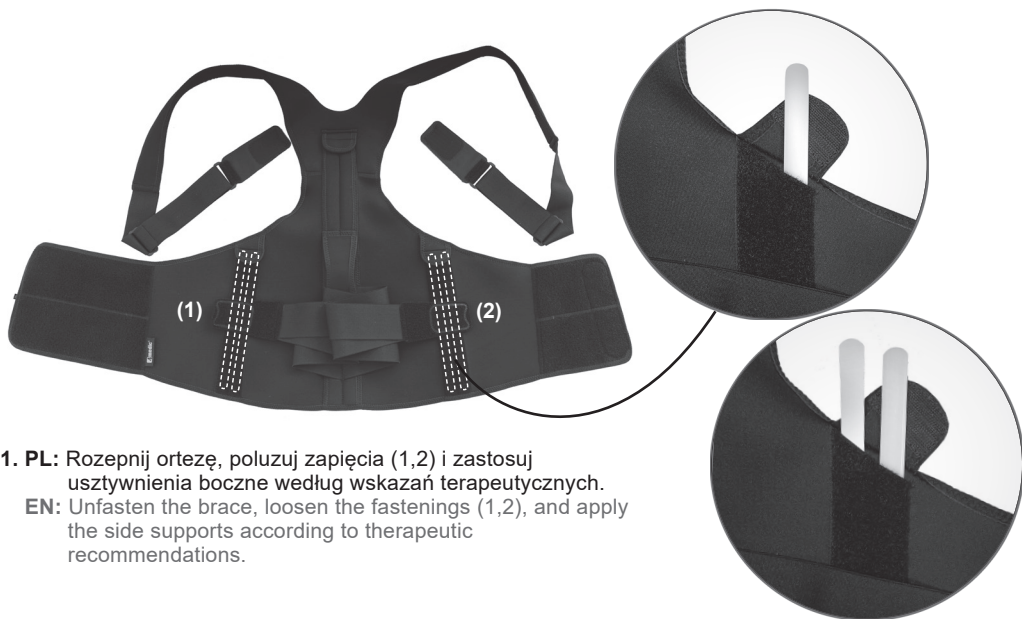

- 1. PL:** Rozepnij ortezę, poluzuj zapięcia (1,2) i zastosuj usztywnienia boczne według wskazań terapeutycznych.  
**EN:** Unfasten the brace, loosen the fastenings (1,2), and apply the side supports according to therapeutic recommendations.




- 2. PL:** Załóż wyrób na ramiona, ustaw odpowiednią kompresję i zapnij przednią część ortozy na rzep (3).  
**EN:** Put the brace on your shoulders, adjust the compression, and fasten the front part of the brace with the Velcro (3).



**3. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję pasów dociągowych i zapnij je na rzepy (4,5) w przedniej części ortozy.

**EN:** Set the appropriate compression of the tension belts and fasten them with Velcro (4,5) in the front part of the brace.

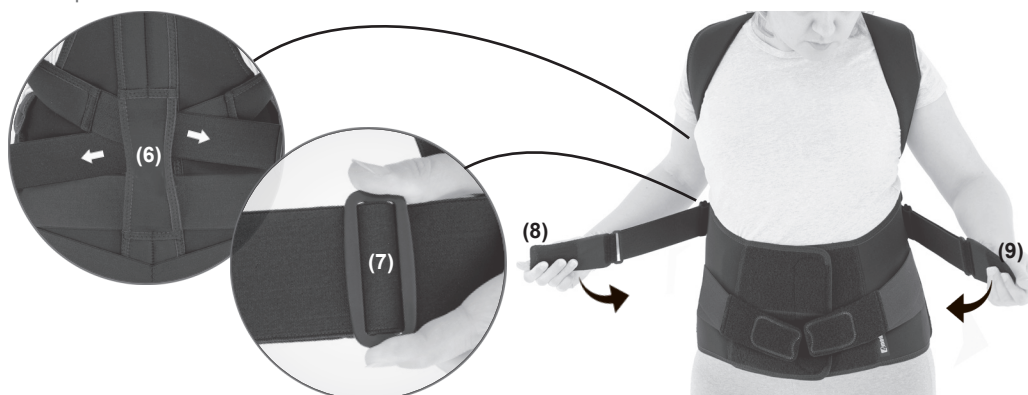

**4. PL:** Przepleć szelki przez szlufkę (6), za pomocą regulatora (7) ustaw odpowiednią kompresję szelek i przypnij z przodu na rzepy (8,9).

**EN:** Thread the straps through the loop (6), use the adjuster (7) to set the appropriate strap compression, and fasten them at the front with the Velcro closures (8, 9).



**5. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** The product is ready to use.