


KOD KATALOGOWY	AM-WSP-15
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	AM-WSP-15
CODE	AM-WSP-15
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	AM-WSP-15



- 1. PL:** Rozepnij ortezę, poluzuj zapięcia (1,2,3,4).
EN: Unfasten the brace, loosen the fasteners (1,2,3,4).

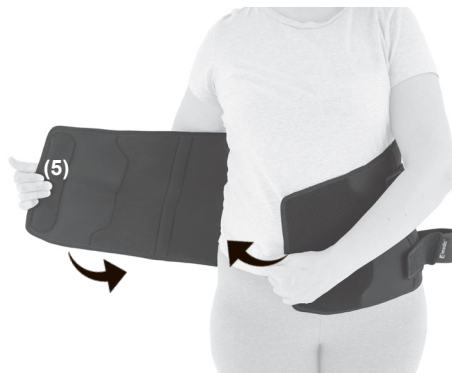

- 2. PL:** Ustaw ortezę w dolnej partii pleców i zapnij jej przednią część na rzep (5).
EN: Position the brace on the lower back and fasten its front part with the Velcro (5).



- 3. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij pasy dociągowe dolne (6,7) następnie górne (8,9).
EN: Set the appropriate compression and fasten the lower tension straps (6,7), then the upper ones (8,9).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.