



KOD KATALOGOWY	OSS-OS-06
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA STOPY
MODEL	OSS-OS-06
CODE	OSS-OS-06
TRADE NAME	FOOT ORTHOSIS
MODEL	OSS-OS-06



- 1. PL:** Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.

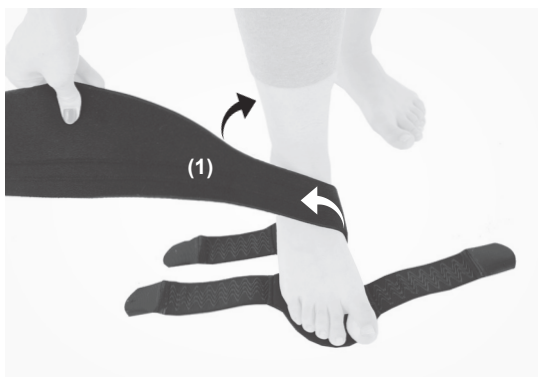

- 2. PL:** Umieść stopę na ortezie i opleć górny element (1) wokół nogi we wskazanym kierunku.
EN: Place your foot on the brace and wrap the upper section (1) around the leg in the indicated direction.

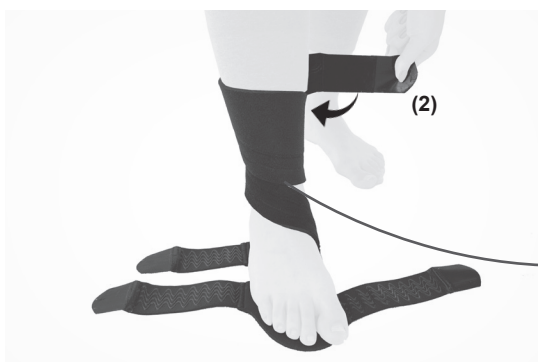

- 3. PL:** Zapnij rzep (2) i zwróć uwagę, aby pas nie nachodził na siebie tylko się stykał.
EN: Fasten the Velcro (2) and make sure the strap does not overlap but only meets edge to edge.



- 4. PL:** Ustaw odpowiednie napięcie i zapnij pas stabilizujący na rzep (3) według wskazanego kierunku.
EN: Adjust the appropriate tension and fasten the stabilizing strap with the Velcro (3) in the indicated direction.



- 5. PL:** Ustaw odpowiednie napięcie i zapnij pasy ósemkowe na rzepy (4,5).
EN: Adjust the appropriate tension and fasten the figure-eight straps with the Velcro closures (4,5).



- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: The product is ready to use.