

KOD KATALOGOWY	AM-D-06
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	AM-D-06
CODE	AM-D-06
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	AM-D-06



1. PL: Rozepnij ortezę (A) i wyjmij usztywnienie kciuka (B). Uformuj usztywnienie według wskazań terapeutycznych i umieść ponownie w ortezie.



EN: Unfasten the brace (A) and remove the thumb splint (B). Adjust the shape of the splint as per therapeutic recommendations and place it back into the brace.



UWAGA! ATTENTION!

PL: Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia zainstalowane w ortezie w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu lub innej części ciała.

EN: Before applying the brace to the patient, ensure that all components are precisely adjusted to achieve the desired positioning of the secured joint or body part.

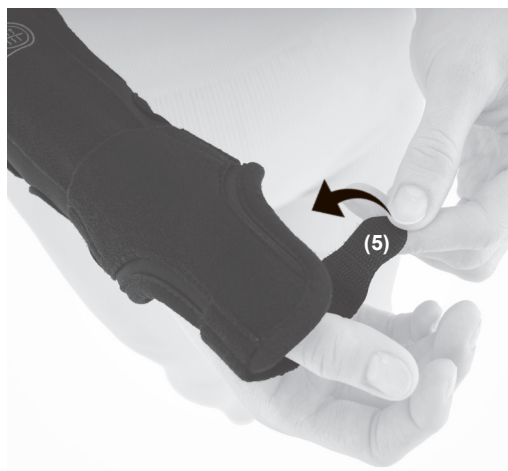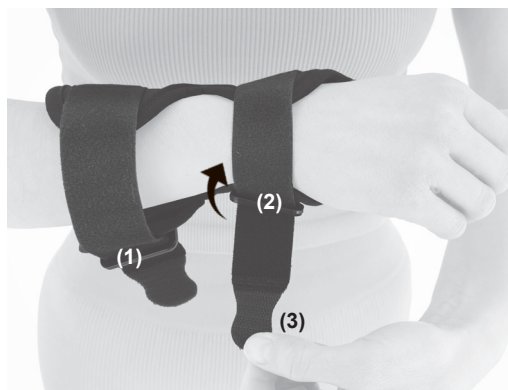

2. PL: Załóż ortezę (A) na rękę. Przeplec taśmy przez klamki (1,2) ustaw odpowiednie napięcie i zapnij na rzepy (3,4,5).

EN: Put the brace (A) on your hand. Thread the straps through the buckles (1,2), adjust the proper tension, and fasten them with the Velcro closures (3,4,5).



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.