


KOD KATALOGOWY	AM-SL-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA ŁOKCIA
MODEL	AM-SL-04
CODE	AM-SL-04
TRADE NAME	ELBOW ORTHOSIS
MODEL	AM-SL-04

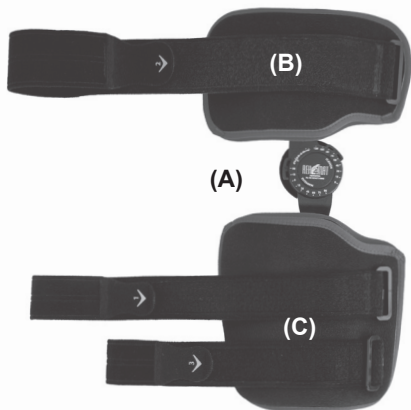

- A. Usztywnienie ręki / Hand support
 B. Wyściółka ramienia / Arm padding
 C. Wyściółka przedramienia / Forearm padding





1. PL: Rozepnij ortezę wyplatając paski z klamerek.

EN: Unfasten the brace by threading the straps out of the buckles.



2. PL: Przyłóż ortezę do ręki w taki sposób aby zegar szyny znajdował się na nadkłyku bocznym koci ramiennej.

EN: Unfasten the brace by threading the straps out of the buckles. Place the brace on the arm so that the hinge dial is positioned over the lateral epicondyle of the humerus.

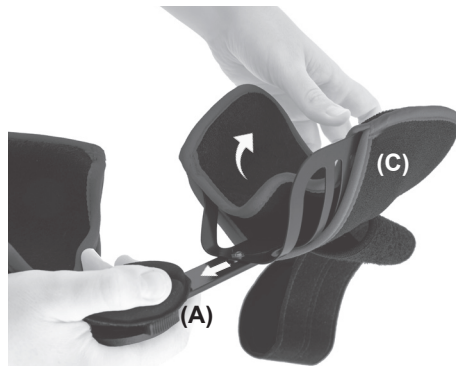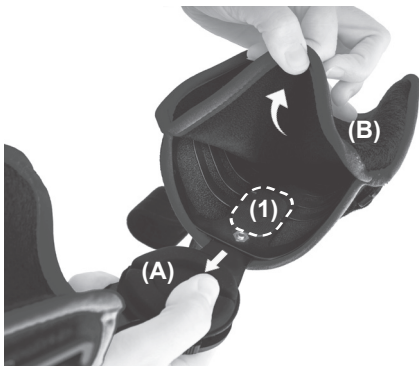

3. PL: Jeśli jest potrzeba dokonaj regulacji długości szyny. W tym celu odepnij wyściółki (B, C) od rzepa (1) i wyjmij szynę (A).


EN: If necessary, adjust the length of the brace bar. To do this, detach the padding (B, C) from the Velcro (1) and remove the bar (A).

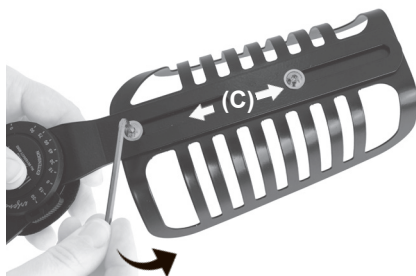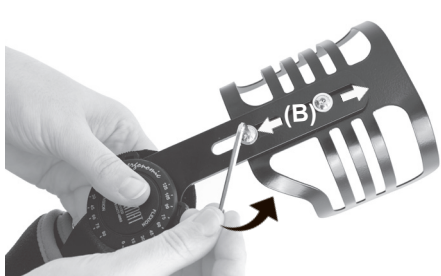

- 4. PL:** Za pomocą klucza imbusowego dokonaj regulacji usztywnienia w części ramienia (B) i przedramienia (C).
EN: Using an Allen key, adjust the reinforcement in the upper arm (B) and forearm (C) sections.



- 5. PL:** Umieść wyściółki ponownie na szynie.
EN: Place the padding back onto the bar.

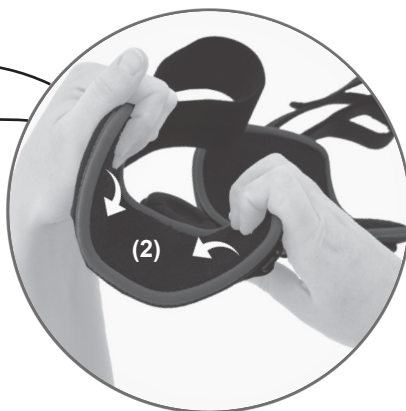

- 6. PL:** Dokonaj regulacji obwodowej (2) doginając w dłoniach usztywnienia i dopasowując je do kończyny.
EN: Adjust the circumferential fit (2) by bending the reinforcements by hand and adapting them to the limb.



7. PL: Ponownie załóż ortezę na rękę w taki sposób, aby zegar szyny znajdował się na nadkłyku bocznym kości ramiennej. Zapnij pasy obwodowe za pomocą rzepów w podanej kolejności (3,4,5).

EN: Put the brace back on the arm so that the hinge dial is positioned over the lateral epicondyle of the humerus. Fasten the circumferential straps with the Velcro closures in the specified order (3,4,5).



8. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.

