



KOD KATALOGOWY	AS-U-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ AS-U-04
CODE	AS-U-04
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	LOWER-EXTREMITY SUPPORT AS-U-04

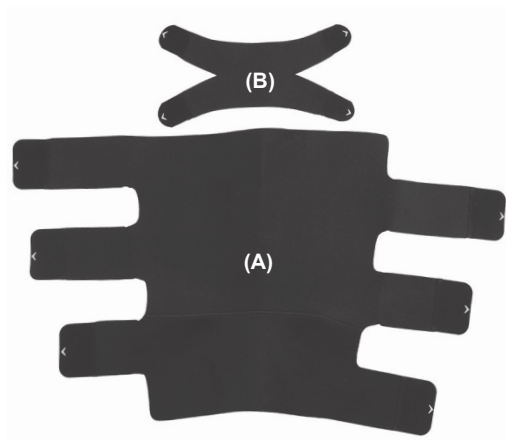



(A) Orteza / Brace

(B) Kapa kolanowa / Knee cap pad

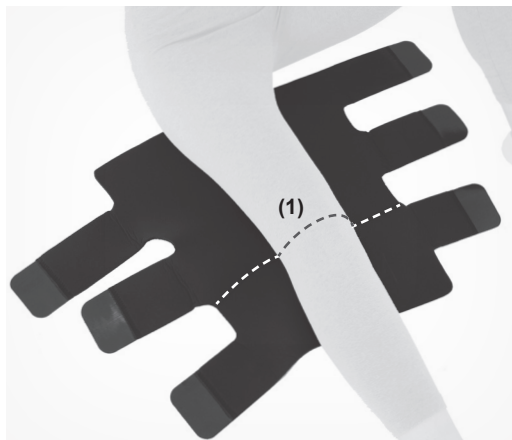

1. PL: Rozepnij ortezę (A) i połóż nogę w odpowiednim miejscu (1).

EN: Unfasten the brace (A) and place your leg in the correct position (1).

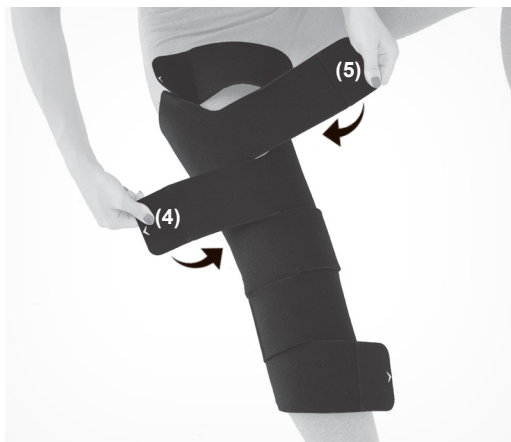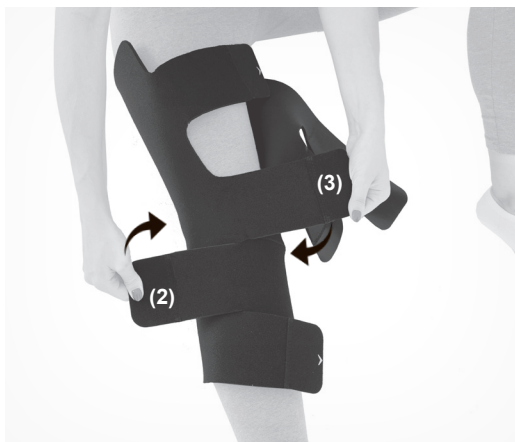



2. PL: Ustaw odpowiednią kompresję pasów i zapnij je w podanej kolejności (2,3,4,5).

EN: Adjust the strap compression and fasten them in the order indicated (2,3,4,5).



3. PL: Tak samo zapnij następne pasy w podanej kolejności (6,7,8).

EN: Adjust the strap compression and fasten them in the order indicated (6,7,8).

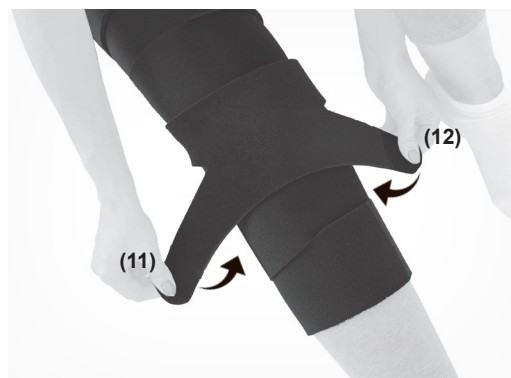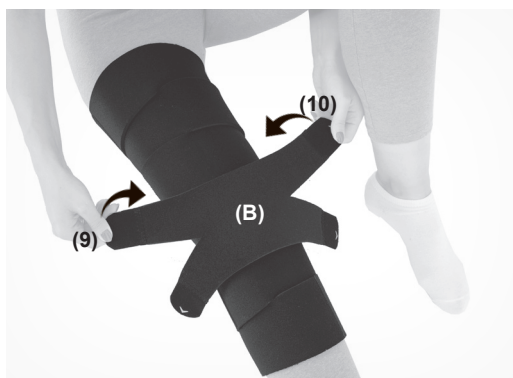

4. PL: Przypnij kapę kolanową (B) w odpowiednim miejscu i zapnij na rzepy (9,10,11,12).

EN: Attach the knee cap pad (B) in the correct position and fasten it with the Velcro straps (9,10,11,12).



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.