




KOD KATALOGOWY	OKG-27
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	OKG-27
CODE	OKG-27
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	OKG-27

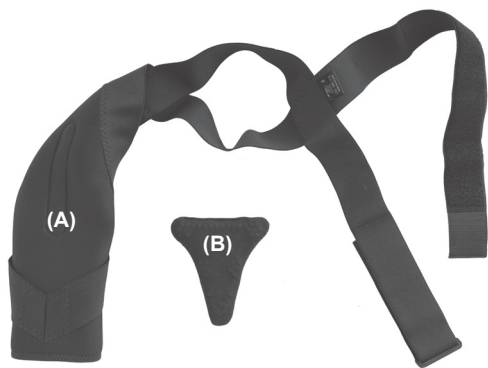


(A) Orteza / Brace
(B) Pelota / Pressure pad

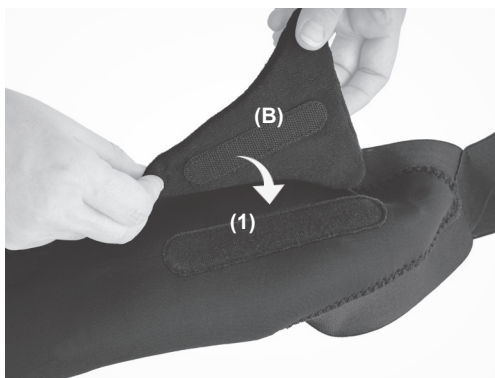

- 1. PL:** Przed założeniem ortozy przypnij pelotę (B) na rzep (1) do wewnętrznej strony rękawa.
EN: Before putting on the brace, attach the pad (B) with the Velcro (1) to the inner side of the sleeve.


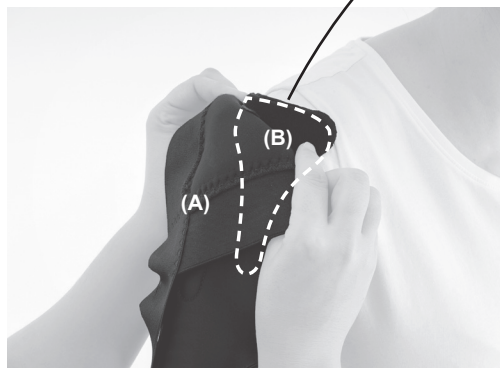


- 2. PL:** Załóż ortezę na ramię w taki sposób, aby pelota znajdowała się w odpowiednim miejscu na ramieniu (2). W razie potrzeby skoryguj miejsce przypięcia peloty.
EN: Put the brace on the arm so that the pad is positioned correctly on the arm (2). If necessary, adjust the position where the pad is attached.

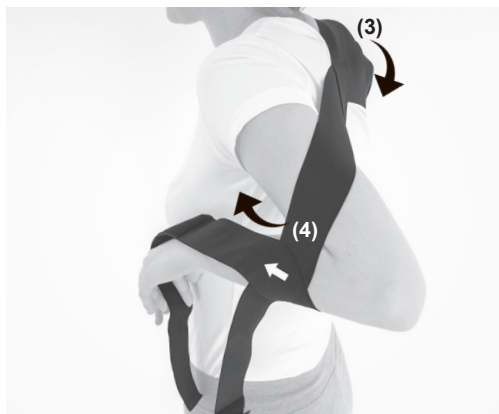

3. PL: Przełóż ortezę przez plecy (3). Następnie przełóż pętlę gumową (4) przez rękę. Ustaw łączenia pasów poniżej linii pachy (5).

EN: Place the brace across the back (3). Then pass the elastic loop (4) over the arm. Position the strap connections below the armpit line (5).

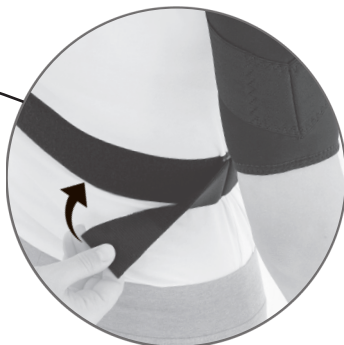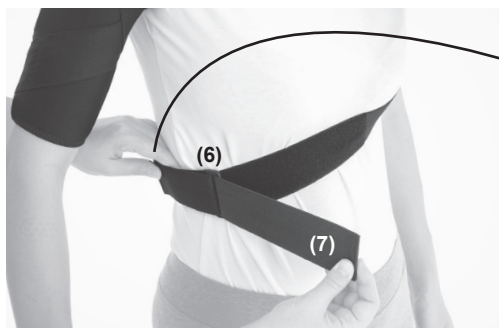

4. PL: Przełóż pas przez klamrę (6). Ustaw odpowiednie napięcie i zapnij na rzep (7). Regulacji dokonujemy z przodu i z tyłu.

EN: Thread the strap through the buckle (6). Adjust the appropriate tension and fasten it with the Velcro (7).



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.