


KOD KATALOGOWY	OT-22
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	OT-22
CODE	OT-22
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	OT-22



1. **PL:** Rozepnij ortezę i poluzuj zapięcia (1,2).  
**EN:** Unfasten the brace and loosen the fastenings (1,2).



2. **PL:** Załóż wyrób na ramiona, ustaw odpowiednią kompresję i zapnij przednią część ortozy na rzep (3).  
**EN:** Put the brace on your shoulders, adjust the compression, and fasten the front part of the brace with the Velcro (3).

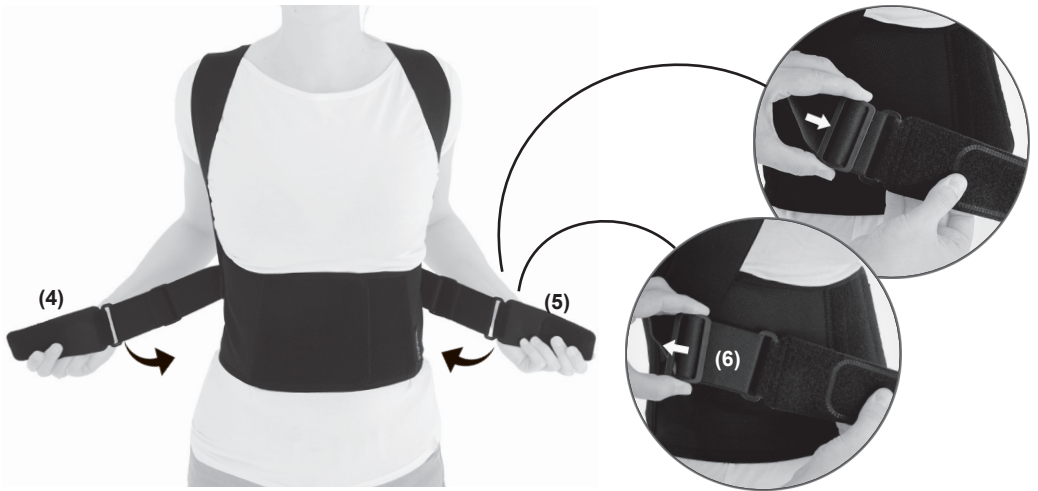

- 3. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję pasów dociągowych i zapnij je na rzepy (4,5) w przedniej części ortezy. Jeśli zajdzie potrzeba ustaw odpowiednią długość pasów za pomocą regulatora (6).
- EN:** Set the appropriate compression of the tension belts and fasten them with Velcro (4,5) in the front part of the brace. If necessary, adjust the strap length using the adjuster (6).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
- EN:** The product is ready to use.