



KOD KATALOGOWY	AM-D-07
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	AM-D-07
CODE	AM-D-07
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	AM-D-07

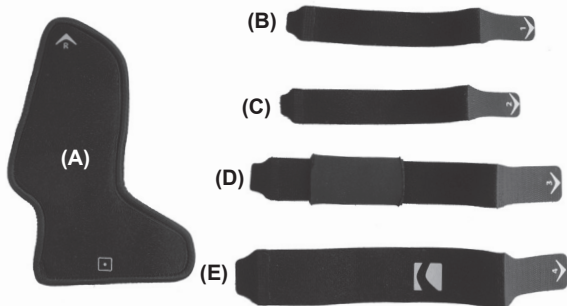


**A. Orteza / Brace**  
**B,C,D,E. Taśmy / Straps**


**1. PL:** Rozepnij ortezę.  
**EN:** Unfasten the brace.

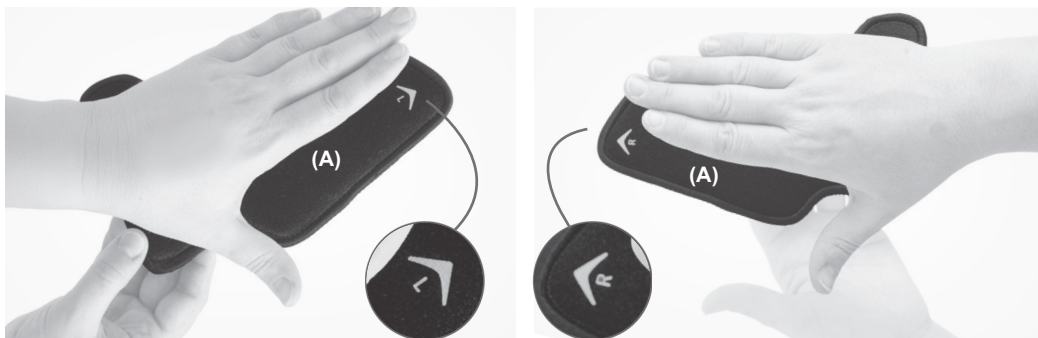



**2. PL:** Umieść dłoń na ortezie (A) w kierunku oznaczonym strzałką oraz stroną (lewa / prawa).  
**EN:** Place the hand on the brace (A) in the direction indicated by the arrow and according to the side (left / right).

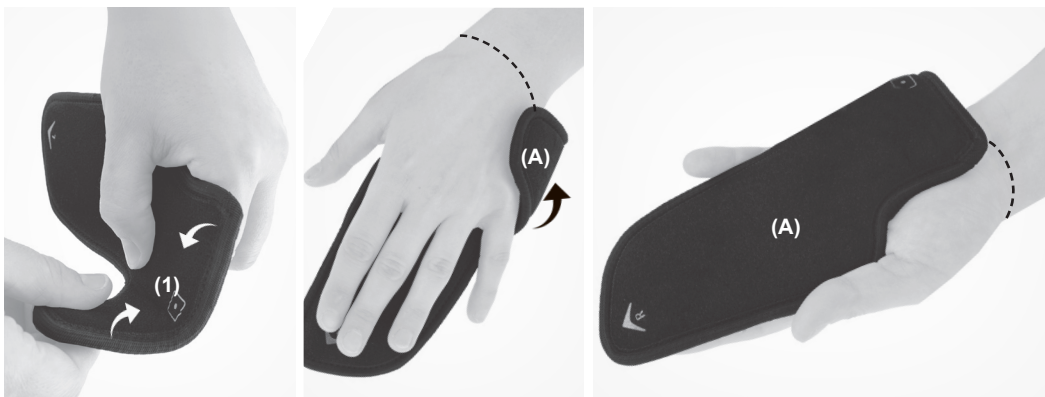


**3. PL:** Zegnij ortezę w miejscu oznaczonym kropką domino (1) i uformuj do dłoni.  
**EN:** Bend the brace at the point marked with the domino dot (1) and shape it to the hand.

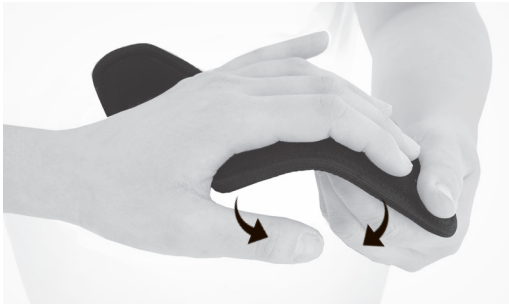

- 4. PL:** Jeśli jest potrzeba uformuj dłoniową część ortozy.  
**EN:** If necessary, shape the palmar part of the brace.

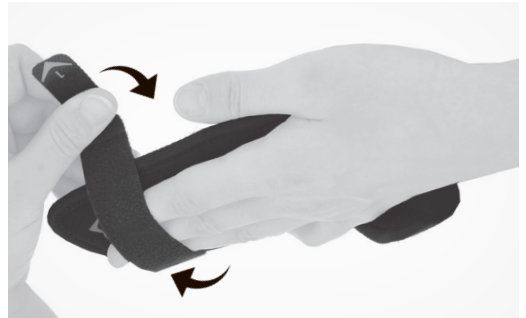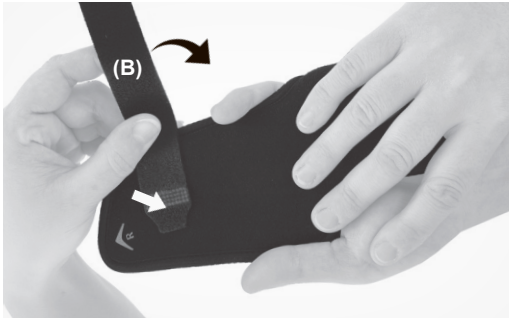

- 5. PL:** Zapnij paski według kolejności opisanej na rzepach (1-4). Przypnij rzep do spodniej części ortozy, ustaw odpowiednie napięcie paska i zapnij rzep.  
**EN:** Fasten the straps in the order indicated on the Velcro tabs (1-4). Attach each Velcro tab to the underside of the brace, adjust the appropriate strap tension, and secure the Velcro.

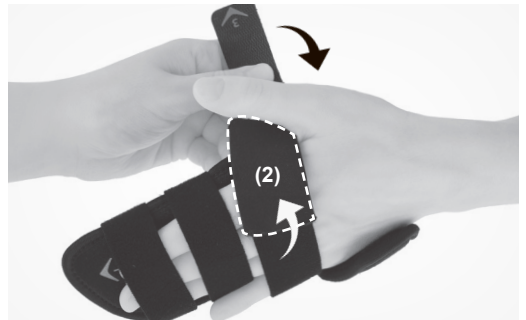

- 6. PL:** Zapinając pasek nr. 3 (D) ustaw osłonę pod kciukiem (2), napręż pasek i zapnij rzep.  
**EN:** When fastening strap no. 3 (D), position the support under the thumb (2), tighten the strap, and secure the Velcro.



**7. PL:** Przypnij pasek nadgarstka (nr. 4) opleć wokół nadgarstka i zapnij na rzep.

**EN:** Attach the wrist strap (no. 4), wrap it around the wrist, and fasten it with the Velcro.



**8. PL:** Gotowy produkt.

**EN:** The product is ready to use.