


KOD KATALOGOWY	AM-SO-12
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-SO-12
CODE	AM-SO-12
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-SO-12

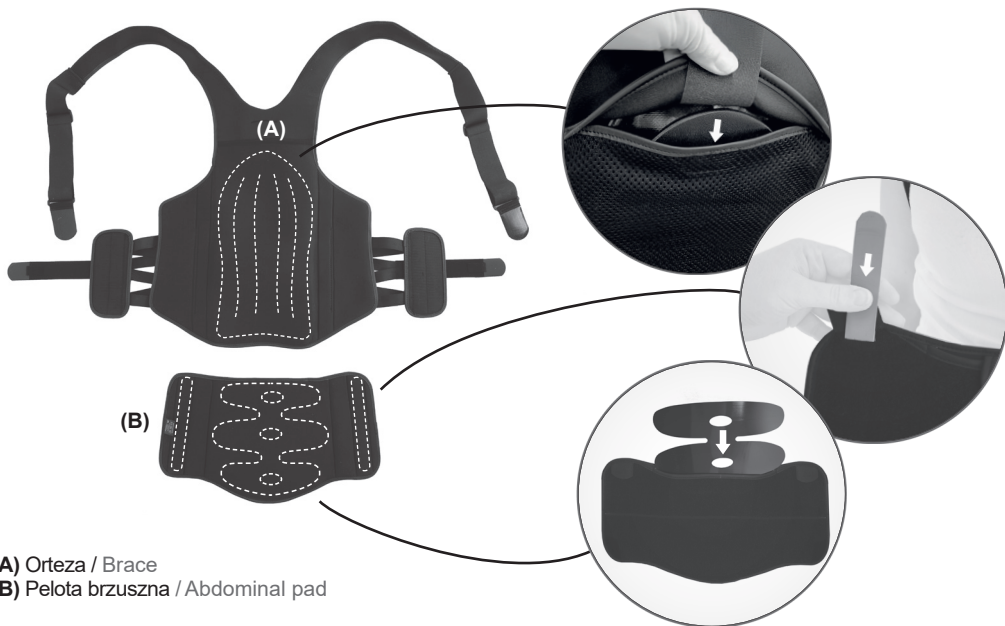


(A) Orteza / Brace

(B) Pelota brzuszna / Abdominal pad



1. PL: Zastosuj peloty i usztywnienia według wskazań terapeutycznych.

EN: Apply pads and reinforcements as indicated for therapeutic use.

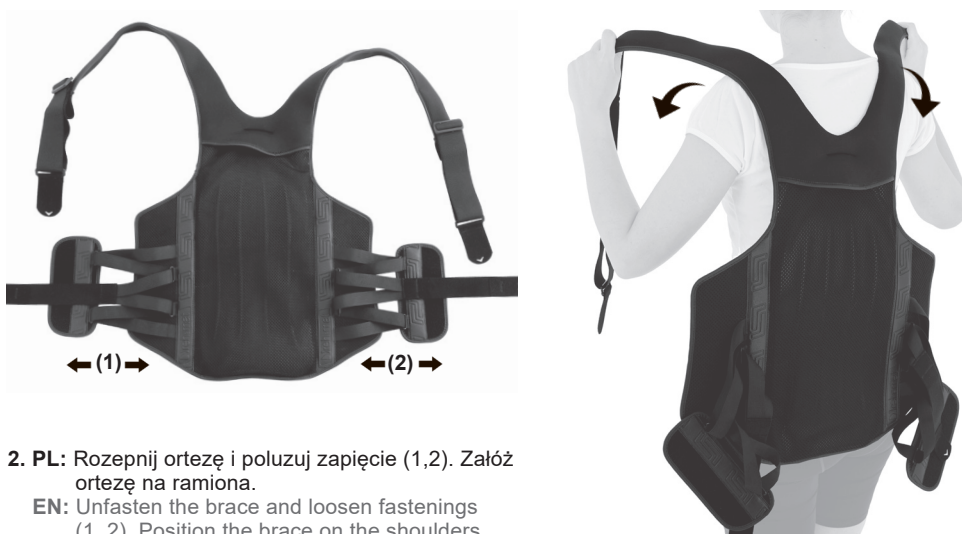


2. PL: Rozepnij ortezę i poluzuj zapięcie (1,2). Załóż ortezę na ramiona.

EN: Unfasten the brace and loosen fastenings (1, 2). Position the brace on the shoulders.

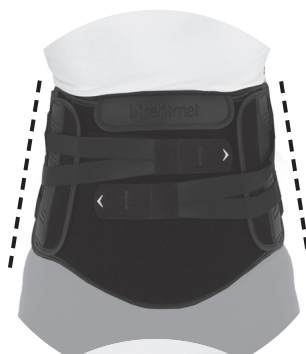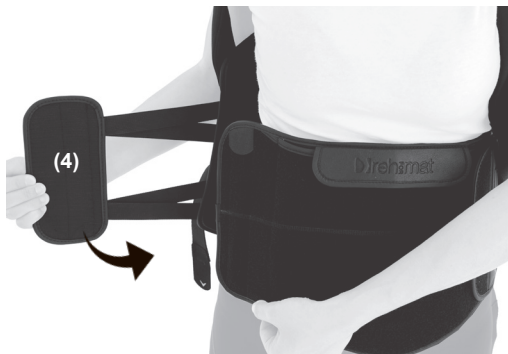


3. PL: Umieść pelotę brzuszną (B) na odpowiednim miejscu i zapnij na niej boczne zapięcia (3,4). Zapięcia umieść pod odpowiednim kontem w zależności od typu sylwetek.

EN: Position the abdominal pad (B) appropriately and secure the lateral fastenings (3, 4) onto it. Adjust the fastenings at an appropriate angle depending on the patient's body type.

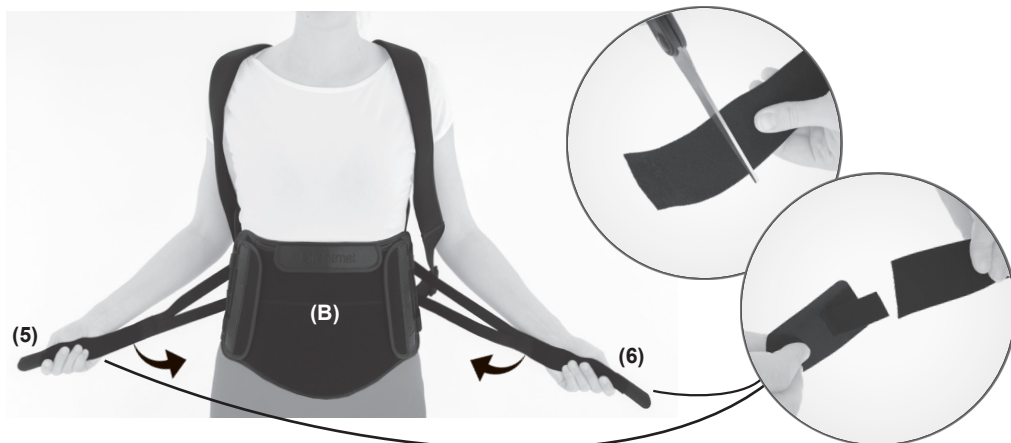

4. PL: Ustaw odpowiednie napięcie pasów dociągowych i zapnij je na rzepy (5,6) w przedniej części ortozy na pelocie brzusznej (B). Jeśli zajdzie potrzeba odetnij zbędną długość pasa.

EN: Adjust the appropriate tension of the tightening straps and fasten them with Velcro (5,6) at the front of the brace on the abdominal pad (B). If necessary, trim any excess strap length.

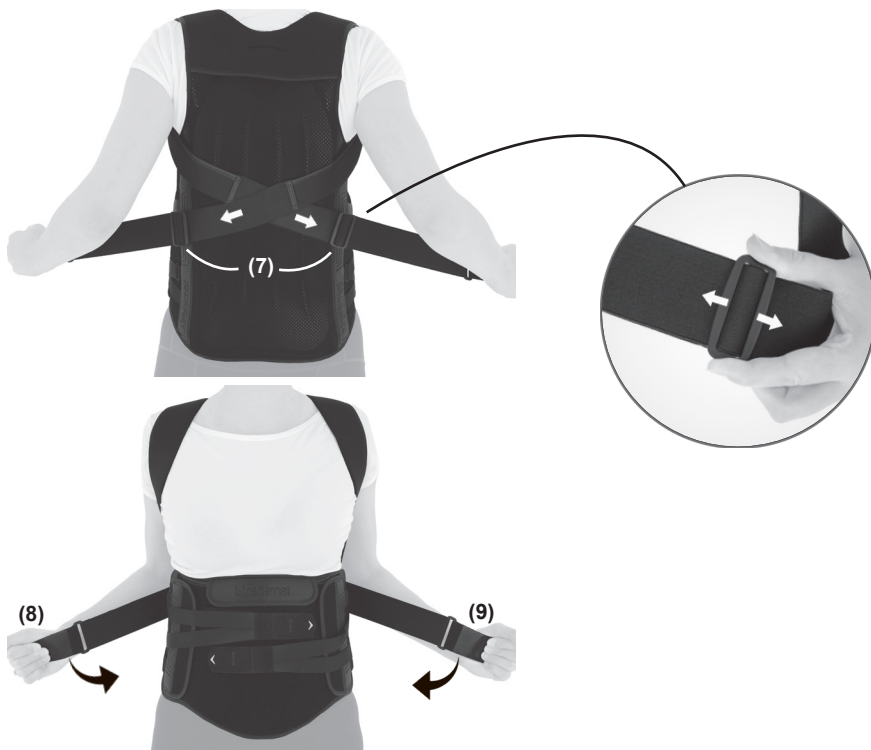

- 5. PL:** Za pomocą regulatorów (7) ustaw odpowiednią kompresję szelek i przypnij z przodu na rzepy (8,9).
EN: Using the adjusters (7), set the appropriate strap compression and fasten them at the front with Velcro (8,9).



- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: The product is ready to use.