



KOD KATALOGOWY	AM-SP-07
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	AM-SP-07
CODE	AM-SP-07
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	AM-SP-07

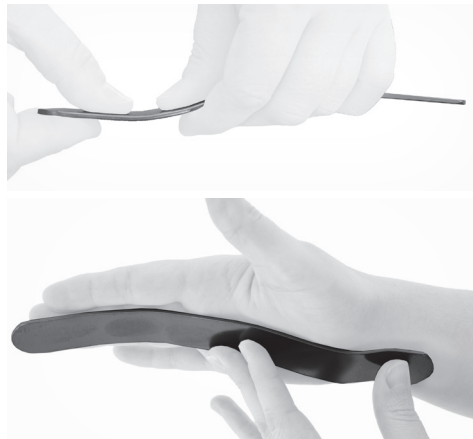

1. **PL:** Rozepnij ortezę i wyjmij usztywnienie.  
**EN:** Unfasten the brace and remove the stiffener.


2. **PL:** Przyłóż rękę do ortyzy. Jeśli istnieje taka potrzeba skoryguj kształt usztywnienia i włóż je z powrotem do ortyzy.  
**EN:** Place the hand into the brace. If necessary, adjust the shape of the support and reinsert it into the brace.

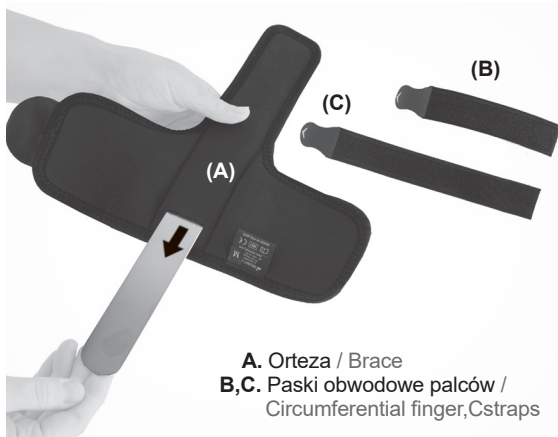

**UWAGA!**  
**ATTENTION!**

**PL:** Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia zainstalowane w ortyzy w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu lub innej części ciała.

**EN:** Warning! Before putting the brace on a patient, it is necessary to precisely adjust all the elements installed in the product in order to obtain the desired positioning of the secured joint or other part of the body.

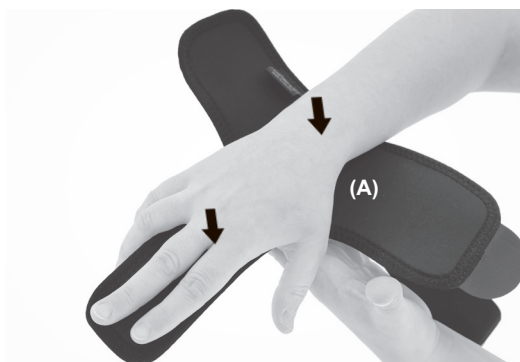


3. **PL:** Umieść rękę na ortyzy (A) i zapnij rzep (B) na nadgarstku (1).  
**EN:** Place the hand on the brace (A) and fasten the Velcro strap (B) around the wrist (1).





**4. PL:** Przepleć pasek obwodowy przez klamerkę (2) i zapnij na rzep (3).

**EN:** Thread the circumferential strap through the buckle (2) and fasten it with the Velcro (3).

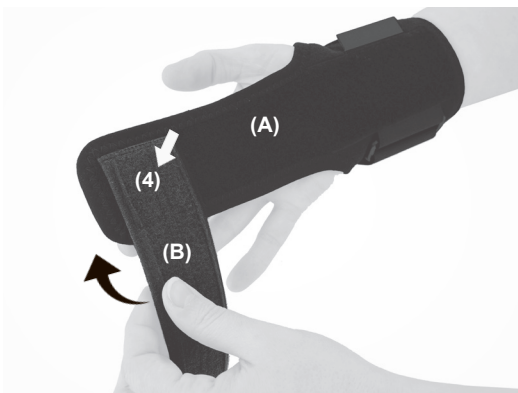

**5. PL:** Przypnij taśmę (B) w okolicy palców (4), opleć we wskazanym kierunku i zapnij rzep (5).

**EN:** Attach the strap (B) in the finger area (4), wrap it in the indicated direction, and fasten the Velcro strap (5).

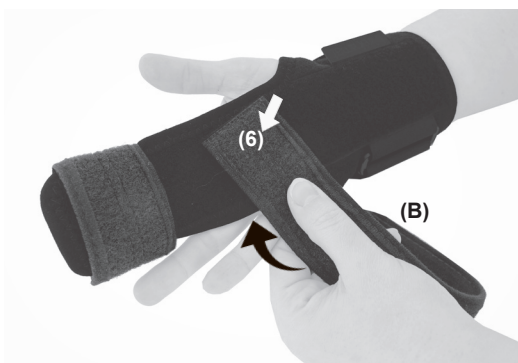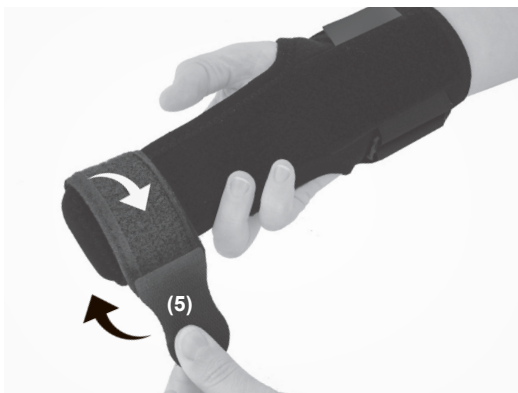

**6. PL:** Przypnij taśmę (C) w okolicy śródręcza (6), opleć we wskazanym kierunku i zapnij rzep (7).

**EN:** Attach the strap (C) in the metacarpal area (6), wrap it in the indicated direction, and fasten the Velcro strap (7).





7. **PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** The product is ready to use.