


KOD KATALOGOWY	AM-D-09
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	AM-D-09
CODE	AM-D-09
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	AM-D-09



- 1. PL:** Rozepnij ortezę i wyjmij usztywnienie.
EN: Unfasten the brace and remove the stiffener.

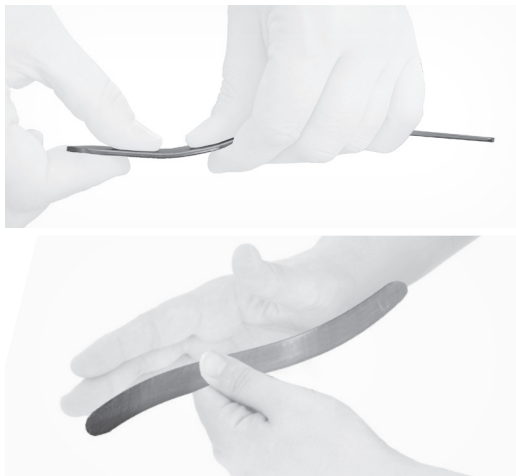


- 2. PL:** Przyłóż rękę do ortezy. Jeśli istnieje taka potrzeba skoryguj kształt usztywnienia i włóż je z powrotem do ortezy.
EN: Place the hand against the brace. If necessary, adjust the shape of the stiffener and insert it back into the brace.


! UWAGA!
ATTENTION!

PL: Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia zainstalowane w ortezie w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu lub innej części ciała.

EN: Warning! Before putting the brace on a patient, it is necessary to precisely adjust all the elements installed in the product in order to obtain the desired positioning of the secured joint or other part of the body.


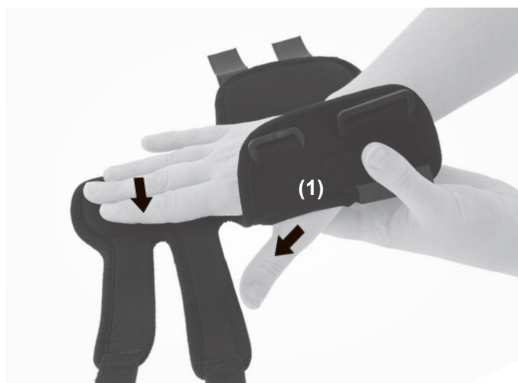


- 3. PL:** Załóż ortezę na rękę umieszczając kciuk w otworze (1).
EN: Place the brace on the hand, positioning the thumb in the opening (1).

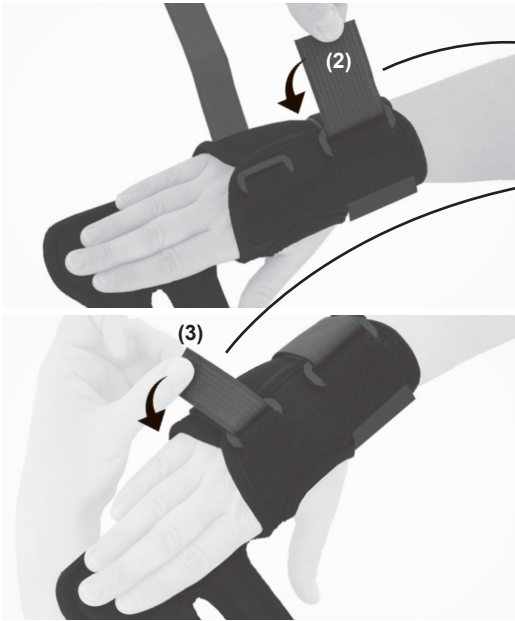

4. PL: Przepleć paski przez klamki i zapnij według podanej kolejności (2,3). Jeśli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość paska.

EN: Thread the straps through the buckles and fasten them in the given order (2,3). If necessary, trim any excess strap length.

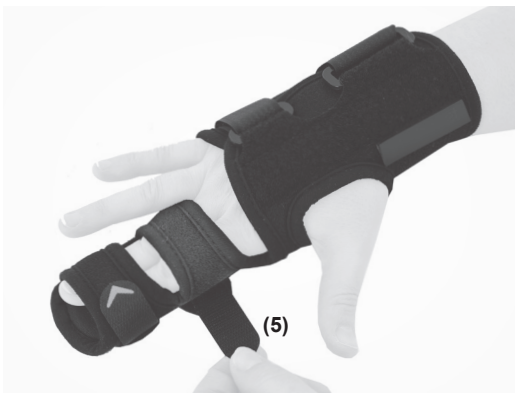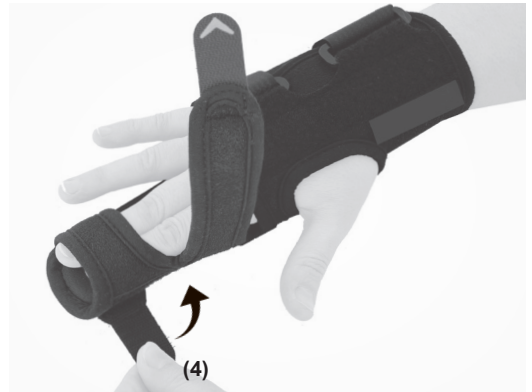

5. PL: Opleć pasy stabilizujące wokół palców i zapnij na rzep (4,5).

EN: Wrap the stabilizing strap around your fingers and fasten with Velcro (4,5).



II, III



III, IV



III, IV, V

6. PL: Gotowy wyrób.
EN: The product is ready to use.