



KOD KATALOGOWY	AM-SP-08
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	AM-SP-08
CODE	AM-SP-08
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	AM-SP-08

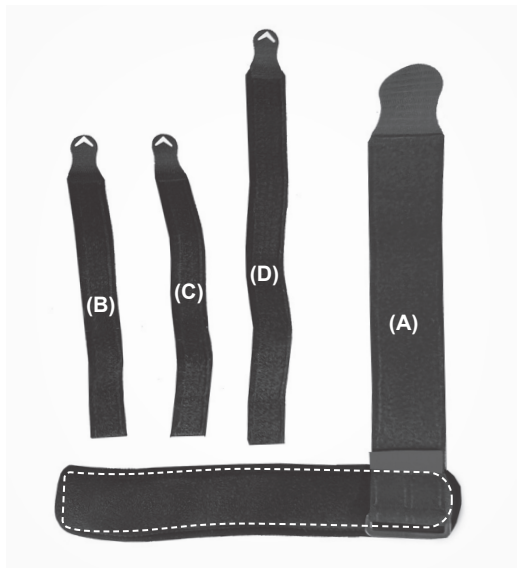

- 1. PL:** Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace.

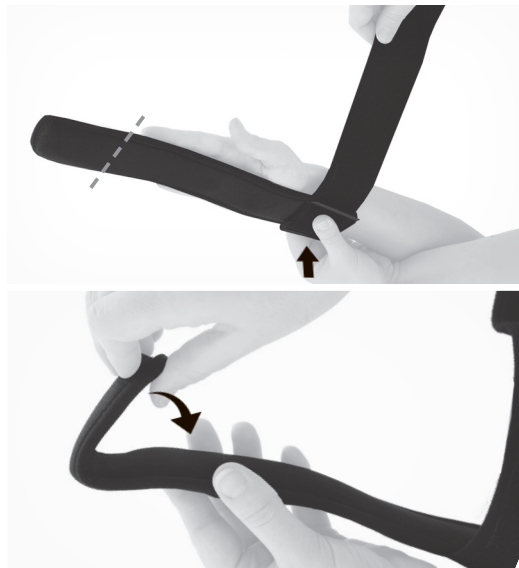


- 2. PL:** Przyłóż rękę do ortezi. Dopasuj usztywnienie i dognij je w odpowiednim miejscu.
EN: Place the hand on the brace. Adjust the support and bend it at the appropriate location.



UWAGA!
ATTENTION!

- PL:** Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia zainstalowane w ortezie w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu lub innej części ciała.
EN: Warning! Before putting the brace on a patient, it is necessary to precisely adjust all the elements installed in the product in order to obtain the desired positioning of the secured joint or other part of the body.


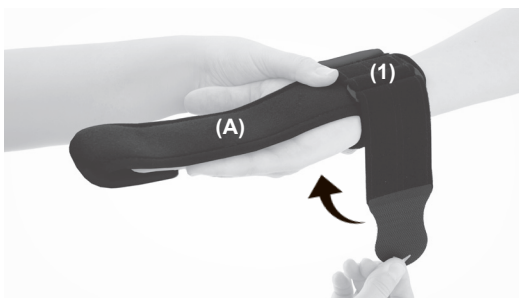


- 3. PL:** Przelóż pasek przez klamkę (1), opleć wokół nadgarstka i zapnij na rzep (2).
EN: Thread the strap through the buckle (1), wrap it around the wrist, and fasten it with the Velcro strap (2).



4. PL: Zapnij paski na rzepy według podanej kolejności (3,4) przypinając paski (B,C) do ortezy i oplatając je wokół palców.

EN: Fasten the Velcro straps in the indicated order (3, 4), securing straps (B, C) to the brace and wrapping them around the toes.

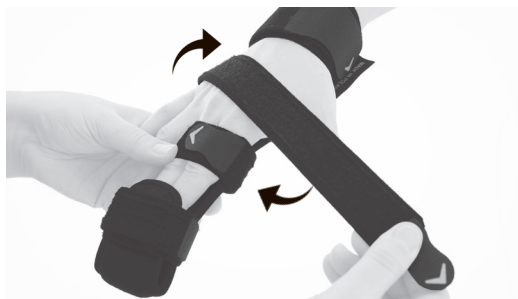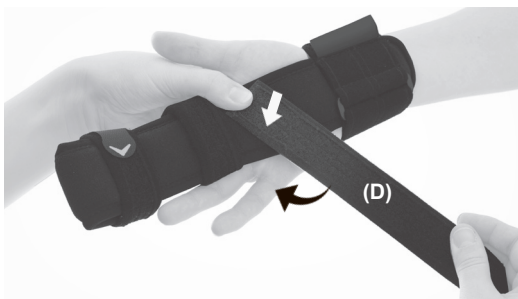

4. PL: Przypnij pasek (D) do ortezy na rzep, opleć wokół śródreżcza i zapnij na rzep (5).

EN: Attach strap (D) to the brace using the Velcro fastening, wrap it around the metacarpus, and secure it with Velcro (5).





5. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.