



KOD KATALOGOWY	AM-WSP-09
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA AM-WSP-09
CODE	AM-WSP-09
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT AM-WSP-09

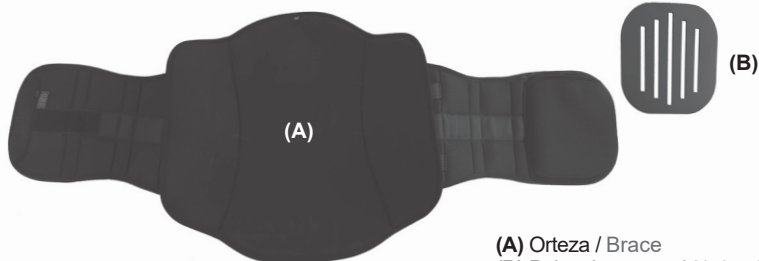


(A) Orteza / Brace
(B) Pelota brzuszna / Abdominal pad



- 1. PL:** Przed założeniem rozepnij ortezę i poluzuj BOA® Fit System (1).
EN: Before putting on unfasten the brace and loosen the BOA® Fit System (1).

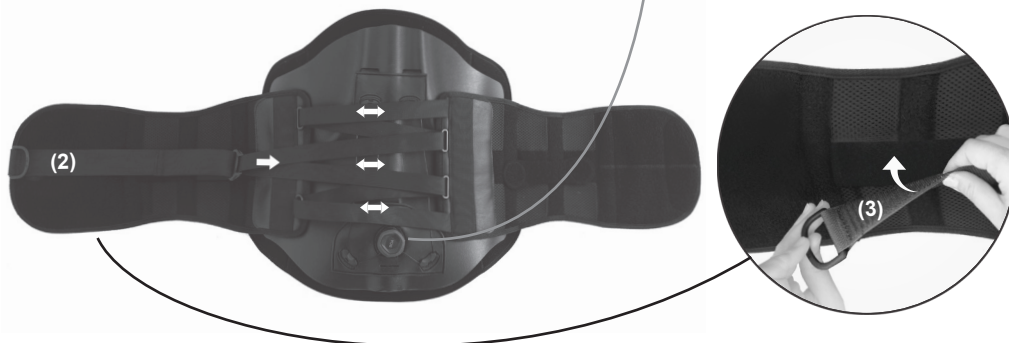

- 2. PL:** Poluzuj System Kompresyjny TLS (2) w taki sposób, aby element napinający (3) znajdował się w odpowiednim miejscu (przed przednim zapięciem).
EN: Loosen the TLS Compression System (2) so that the tensioning element (3) is positioned correctly (in front of the anterior fastening).

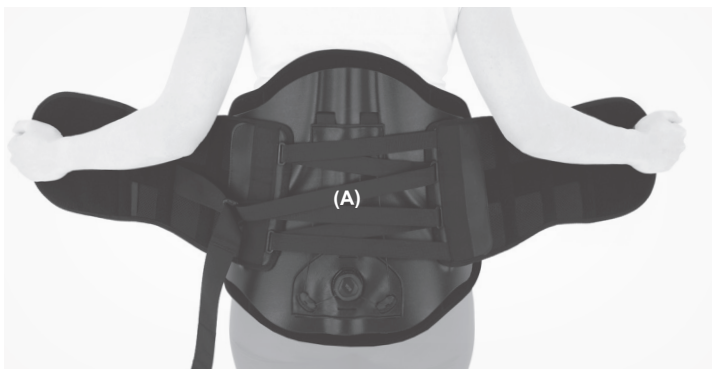

- 3. PL:** Przyłóż ortezę (A) do sylwetki, w celu jej dopasowania.
EN: Put the brace (A) on your body to adjust it.

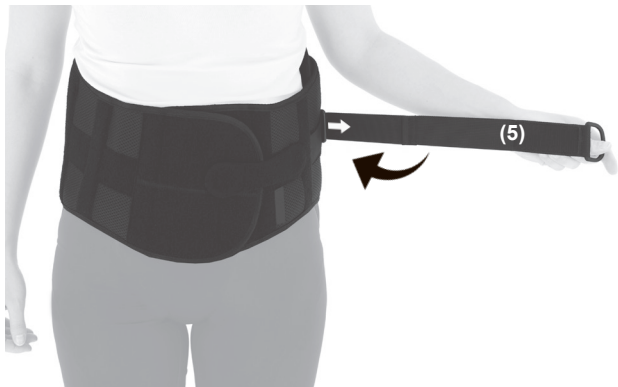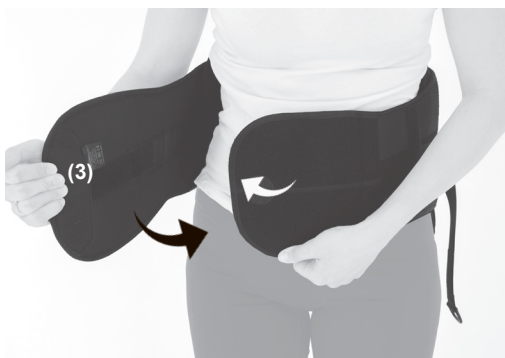

- 4. PL:** Zapnij ortezę z przodu na rzep (3). Zapnij element zabezpieczający (4) na przedniej części wyrobu. Ustaw odpowiednie napięcie taśmy za pomocą klamki z rzepem (5).
EN: Fasten the brace at the front using the Velcro closure (3). Secure the protective element (4) on the anterior part of the product. Adjust the appropriate strap tension using the Velcro buckle (5).



5. **PL:** Za pomocą BOA® Fit System ustaw dopasowanie peloty lędźwiowej do sylwetki.
EN: Use the BOA® Fit System to adjust the fit of the lumbar pad to the patient's body.



6. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: The product is ready to use.



UWAGA!
ATTENTION!

PL: UWAGA! Produkt może być stosowany bez peloty brzusznej (B).
EN: ATTENTION! The product can be used without the abdominal pad (B).